



Sitag Foam Silicone Light



Produktbeskrivelse:

Sitag foam silicone light er en tynn absorberende selvheftende polyuretanskumbandasje. Den ytre overflaten av skumbandasjen består av en fuktgjennomtrengelig polyuretanfilm som fungerer som en barriere mot væske og mikroorganismer. Såroverflaten av bandasjen er belagt med et lag silikongel som ikke setter seg fast i såret eller forårsaker skade på nydannet vev ved kassering av bandasjen. Silikonlaget er lett klebrig, noe som forenkler applisering og retensjon av bandasjen på intakt hud uten av den grunn å forårsake vevsskader eller smerte ved fjerning. Bandasjens kjerne absorberer eksudat og reduserer derigjennom risikoen for maserasjon.

Indikasjoner:

Bandasjen er egnet for lett til moderat væskende sår, skjør hud.

Kontraindikasjoner:

Må ikke brukes hvis pasienten er allergisk overfor noen av komponentene.

Applikasjon:

- Hudområdet rengjøres og tørkes nøye før applisering.
- Velg en størrelse på bandasjen slik at den overlapper minst 2 cm rundt på omkringliggende frisk hud.
- Grip beskyttelsespapiret og dra utover samtidig som applisering påbegynnes.

Byttefrekvens:

Tilpasses avhengig av mengden sårveske og sårets tilstand. Bandasje byttes i samsvar med den sårpleiepraksis som anvendes. Høyst 7 dager.

Artikkelnummer	Beskrivelse
810419	5 cm x 5 cm, S, 5 stk./avdpk., 100 stk./trppk.
810420	6 cm x 8,5 cm, S, 5 stk./avdpk., 100 stk./trppk.
810421	10 cm x 10 cm, S, 5 stk./avdpk., 100 stk./trppk.
810422	10 cm x 20 cm, S, 5 stk./avdpk., 100 stk./trppk.
810423	15 cm x 15 cm, S, 5 stk./avdpk., 100 stk./trppk.
810424	20 cm x 50 cm, S, 4 stk./avdpk., 80 stk./trppk.

ViTri Medical AB
Stensåtravägen 9 A
127 39 SKÄRHOLMEN
SWEDEN

Tlf.: +46-8-747 76 60
vitri.se
info@vitri.se