



Antibac®

Overflatedesinfeksjon 75% servietter

Overflatedesinfeksjon servietter



Antibac® Overflatedesinfeksjon 75 % kluter og servietter har dokumentert effekt på bakterier, ulike virus og gjærsopp, og brukes på overflater som tåler alkohol. Væsken gir ikke resistente bakterier og etterlater ingen stoffer på flaten etter fordamping. Virketid: minst 1 minutt.

Produktet leveres i ulike forpakninger og størrelser, se tabell under.

Bruksområde

Klutene og serviettene er utviklet for desinfisering av overflater, inventar og lignende innen blant annet innen helse, tannhelse, næringsmiddelindustri, storhusholdning, barnehage, skole og kontor. Kluter og servietter egner seg godt til desinfisering av blant annet kontaktpunkter, benker, bord, produksjonsutstyr og redskaper.

Produktegenskaper

Virketid: minst 1 minutt.

Kluter i spann måler 22 x 22 cm. Dekker inntil 5 m². Klutene dras enkelt ut gjennom lokket og rives av. Lokket tetter godt og sørger for at klutene bevarer fuktigheten. Mål på spann: Høyde 25,8 cm, diameter 28,5 cm. Vekt: 4 kg. Væskemengde: 3100 ml.

Store desinfeksjonskluter i flowpack måler 24 x 35 cm. Dekker inntil 10 m².

Servietter i boks måler 20 x 20 cm. Dekker inntil 1/2 m².

Enkeltpakkede servietter måler 17 x 22 cm. Leveres i praktisk og betjeningsvennlig displaykartong.

Keyboard Wipes måler 14 x 20 cm. Enkeltpakkede servietter i praktisk og brukervennlig displaykartong.

Testdokumentasjon: EN 13727, EN 13624: yeast, EN13697: bacteria & yeast, EN 14476: enveloped viruses, EN 14348, EN 16615: bacteria & yeast.

Bruksanvisning

Gni kluten/servietten over flaten slik at den er fuktig i minimum 1 minutt. Der fordamping skjer raskere, må prosedyren gjentas. Produktene brukes på alkoholbestandige overflater som er tørre og ikke synlig skitne.

Innhold**Aktive stoffer****Effekt**

Etanol

Biocide

Isopropylalkohol

Biocide

1-Propanol

Biocide

Oppbevaring

Uåpnet: 3 års holdbarhet fra produksjonsdato. Åpnet: 3 mnd
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.

**Forpakningsstørrelse
/ Artikkel nr.**

Salgsenhet	Artikkel nr.	GTIN	GTIN (salgsenhet)	Type forpakning
1 x 1 stk	603047	7054956030478	7054957030477	Spann
2 x 1 stk	603050	7054956030508	7054957030507	Refill
6 x 1 stk	601150	7054956011507	7054957011506	Boks
6 x 1 stk	603011	7054956030119	7054957030118	Displaykartong
6 x 1 stk	603025	7054956030256	7054957030255	Displaykartong
10 x 12 stk	601672	7054956016724	7054957016723	Flowpack
6 x 70 stk	601192	7054955011928	7054958011925	Boks

Tilleggsinformasjon

Sjekk den oppdaterte versjonen av en trykket brosjyre på vår nettside www.antibac.no, eller send en epost til vår kundeservice post.no@kiilto.com.