




Graviditetstest



Finns både som singel- och rörforpakning

Analyz hCG Strip

- Sikker - mer enn 99 %
- Raskt resultat med "Dypp og les-test"
- Miljøvennlig strip
- Følsomhet: 20 IU/l
- 25 tester/forpakning med singelpakket
- 25 tester/forpakning i rør

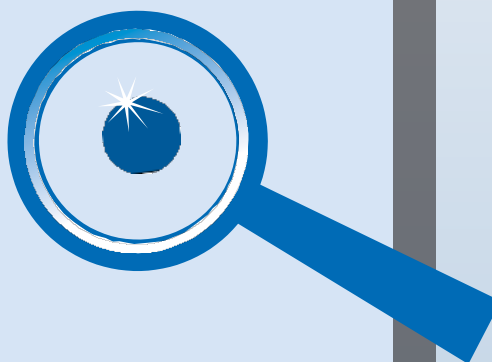



Analyz hCG Strip

TESTPROSEDYRE

på **Analyz** hCG Strip Graviditetstest

Analyz hCG Strip er en graviditetstest med følsomhet 20 IU/l, som innebærer at den kan brukes allerede 1-2 dager etter uteblitt menstruasjon. Sikkest resultat oppnås med morgenurin da konsentrasjonen av hCG er høyest. Urinen samles i en ren glass- eller plastkopp.

1

Stipsen dyppes i urinen og lar stå, eller tas opp etter 15 sekunder og legges plant. OBS! Ikke la urinen nå over linjen merket "MAX".

2

Testen avleses **etter 3 minutter**. Et positivt svar kan normalt avleses etter 30-40 sekunder da testlinjen ligger foran kontrollinjen på membranet. **OBS! Ikke avles etter 10 minutter!**

AVLESING AV TESTEN

3

Streken kan ha ulik intensitet avhengig av mengden hCG i urinen. Om ingen strek framtreder kan resultatet ikke tolkes fordi testen enten er for gammel eller utsatt for feilaktig behandling.

Ved eventuelle feil eller spørsmål:
Ring: +46 8 99 00 90, eller
faks: +46 8 99 20 40.

