

Sink Bandasje – "Unna's Boot"

Varicex® S er en bandasje mettet med sinkpasta. Den er klar til bruk og sparer tid ved påføring av semirigid (delvis stiv) permanent bandasje ved tromboflebitt, ødembehandling, kronisk venøs insuffisiens, venøse leggsår i helingsfasen, og ved oppfølging av bruddbehandling.



Tilhelende egenskaper!

Varicex® appliseres direkte mot huden og fremmer tilheling ved for eksempel leggsår etter venøse ødemer. Bandasjen er komfortabel, lett og smidig for pasienten. Det dannes ingen folder ved bandasjeringen da den er elastisk både i bredde og lengde.

Raskt



- Klar til bruk - Sparer tid
- Legges direkte på huden
- Fremmer sårtilheling
- Legges sirkulært eller i «fiskebenmønster»

Fordeler



- Elastisk både i bredde og lengde
- Tynn - Tar liten plass
- Jarekanter
- Kan klippes

Pasientvennlig



- Komfortabel
- Lindrer inflammasjon i huden
- Lindrer kløe
- Lindrer eksem
- Trygg å applisere når den brukes til det den er ment for

Indikasjoner

- Tromboflebitt (årebetennelse)
- Kronisk venøs insuffisiens
- Venøse leggsår i tilhelingsfasen
- Ødemer
- Kompresjon, støtte og avlastning
- Immobilisering



Bruksanvisning:

- Før applisering må huden rengjøres og eventuelle sår debrideres/behandles etter gjeldende prosedyre
- Ved applisering bør foten være i en vinkel på 90 grader for å kunne oppnå god bevegelighet
- Bandasjen legges sirkulært eller i "fiskebensmønster"
- Bandasjen må legges uten glipper og tilpasse seg benet slik at den ligger glatt. Den kan klippes i for bedre tilpassing
- Etter applisering kan den beskyttes med en tubegauze (Tg®) eller et fikseringsbind
- Kan legges under kompresjon

Forsiktighetsregler:

- Bandasjen bør ikke legges **sirkulært eller i "fiskeben"** hos pasienter med nedsatt arteriell sirkulasjon. Ankel-arm indeks 0,5-0,8 bare etter avtale med lege
- Overfølsomhet mot produktets bestanddeler
- Ubehandlet hjertesvikt

Varicex® S:

Lev.art.nr	Størrelse	Avd.fp	Trp.fp
20630	10cmx5m	10	80
20631	10cmx7m	10	60
20632	10cmx10m	10	30

Produktmateriale

- Materiale av viscose og polyamid impregnert med glycerol, vann, zinkoxid, gelantin og calcium chlorid dihydrate.
- Produktforpakningen består av polypropylen, parafin, cellulose, aluminium og polyetylene. Sorteres som metall.
- Lageremballasje og bruksanvisning av cellulose som kan kildesorteres.
- Transportemballasje i wellpapp/bølgepapp av cellulose. Kan kildesorteres.
- Produktet skal kasseres som farlig avfall da det inneholder sinkoxid.

Varicex®S

- CE- merket i henhold til MDR klasse 1
- Oppbevares tørt og rent i romtemperatur
- Holdbar i 3 år fra produksjonsdato