



Vliwasorb®

Vliwasorb® adhesive

Superabsorberende elastisk sårkompress med sperresjikt

Myk, **elastisk** og fleksibel superabsorberende sårbandasje med superabsorbenten (sodium polyacrylat) innkapslet i cellulose. Bandasjen binder høye volumer væske inklusive bakterier ved behandling av kraftig væskende sår og minsker dermed risikoen for maseration.

Vliwasorb tilbyr sjeldnere bandasjeskift. Brukes som superabsorberende kompress å legge som primær- og sekundærbandasje for kraftig væskende sår i kombinasjon med f.eks. alginatbandasje Suprasorb A, Suprasorb A+Ag og Vliwaktiv Ag. Bandasjen har et sperresjikt for å forhindre lekkasje mot klær og sengetøy. Skal ikke klippes! Legg bandasjen med 2-3cm overlapp. Bandasjen er lett å påføre og fiksere. Ikke legg i sårhuler da bandasjen kan ekspandere.

Brukes for behandling av kraftig til middels væskende sår f.eks. trykksår, arterielle sår, venøse leggsår, diabetiske sår, ved postoperativ tilheling, laparatomisår, fistler mm. Mengden såreksudat og eventuelt primærbandasje avgjør skiftfrekvensen. Kan brukes ved kompresjonsbehandling.

Vliwasorb adhesive har en hudvennlig elastisk limkant, med svært god vedhefting. Ingen ekstra fiksering kreves. Spesielt egnet for områder det normalt er vanskelig å feste en bandasje.

Innhold:

- Overflatesjikt av ikke-heftende, perforert og elastisk polyetylen.
- Absorberende mellomsjikt av superabsorbentpolymer (sodium polyacrylat) innkapslet i cellulose.
- Blått sperresjikt av nonwoven i polypropylen.

Vliwasorb®

Størrelse	Art.nr	Avdfp	Trpfp
7,5x7,5cm S	34 500	10	360
10x10cm S	24 501	10	360
10x20cm S	24 502	10	340
20x20cm S	24 503	10	300
20x30cm S	26 904	10	180

Ønskes størrelse 20x40cm – legg 2x(10x20cm) vedsiden av hverandre.

Vliwasorb® adhesive

Størrelse	Art.nr	Avdfp	Trpfp
12x12cm S	30 991	10	360
15x15cm S	30 992	10	360
15x25cm S	30 993	10	110

Fax: 046-32 42 20 E-post:
info@se.LRmed.com
www.lohmann-rauscher.se