

# EWACS Öronspolare

## Ear Water Cleaning System



**Lätthanterlig och effektiv**

**Behaglig och säker för patienten.**

**Ansluts till vanlig vattenledning.**

**Lätthanterlig;** tryck bara lätt på "avtryckaren"!

**Effektiv** behandling genom kontinuerligt vattenflöde.

**Behaglig** för patienten då vattentryck och flöde är konstanta.

**Säker;** inställt tryck hålls stabilt av en tryckregulator.

**Monteringen** är lätt att göra helt utan eller med enkla verktyg.



Öronspolaren består av tryckregulator och spolpistol som ansluts med snabbkopplingar inbördes och till vattenblandare. För bästa temperaturkontroll rekommenderas anslutning till termostatblandare. Då öronspolaren inte används kan blandaren samt handfat eller diskbänk användas som vanligt.



**Tryckregulatorn** ger ett stabilt spoltryck. Trycket visas på en manometer och justeras lätt med den svarta ratten. Ett sidoutlopp underlättar inställning av temperaturen.



**Spolpistolen** har bekväm avtryckare och reglerventil som medger "mjukstart" och gör spolningen lätt att utföra. Närmast örat används ett speciellt spolmunstycke i plast. Munstycket byts mellan varje patient.



**Spolmunstycket** är tillverkat i polyeten ansluts med snabbkoppling. Det tål rengöring vid behov och är tillverkat av miljövänligt material. Spolmunstycken köps i olika förpackningsstorlekar från 10 till 1000 st och 100 st följer med vid leverans.



**Strålsamlaren** (tillbehör) med fäste för snabbkoppling kan placeras i vattenblandarens snabbkoppling då öronspolaren inte används. Därigenom erhålls en mjuk och stänkfri vattenstråle.



**Extra Snabbkopplingssats** (tillbehör) används för att kunna använda öronspolare på alternativ plats. Genom att montera en extra snabbkoppling på ytterligare en vattenblandare kan öronspolaren lätt flyttas för användning i ett annat rum.



**Rondskål med avlopp** (tillbehör) finns för att slippa att tömma spillvatten så ofta. Materialet är plast och den tål alla vanligt förekommande rengöringsmedel samt autoklav 135°C. I leveransen ingår en 1,5 m lång PVC-slang

Rondskålen kan även fås **utan avlopp** (förp. om 5 st).

## EWACS Öronspolare, teknisk specifikation

|                                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |
|--------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Komplett leverans innehåller:</b> |                  | Regulator med manometer och kopplingar<br>Spolpistol med snabbkopplingar (handel)<br>Slang med snabbkopplingar (handel)<br>Snabbkopplingssats för vattenblandare i 3 delar*<br>Spolmunstycken, sats om 100 st<br>Bruksanvisning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |
| <b>Förbrukningsmaterial:</b>         |                  | Slang utan snabbkopplingar, standard 2 m<br>Spolmunstycken i olika förpackningsstorlekar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |
| <b>Övriga tillbehör:</b>             |                  | Strålsamlare passande till blandarens snabbkoppling<br>Snabbkopplingssats för anslutning till annan blandare<br>Rondskål med avlopp för spillvatten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |
| <b>Tekniska data:</b>                | <b>Material:</b> | Spolpistol<br>Regulatorhus<br>Slang<br>Spolmunstycke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Acetalplast<br>Mässing<br>Transparent PVC<br>HD polyeten |
|                                      | <b>Tryck</b>     | Vattenblandare (prim.)<br>Spolmunstycke (sek.)<br>Rek. spoltryck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | max 25 bar<br>reglerbart 0 – 3 bar<br>0,2 – 0,3 bar      |
|                                      | <b>Vikt</b>      | Komplett<br>Spolpistol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 750 g<br>180 g                                           |
|                                      | <b>Rengöring</b> | <b>Utvändigt:</b> enligt lokalt förekommande rutiner.<br><b>Invändigt:</b> töm utrustningen på vatten minst 1 gång per dag och låt torka över natten. Häng upp slangar.<br><b>Slangar:</b> utöver ovanstående; daglig rengöring med genomspolning i diskdesinfektor. Utbyte ca 1 gång/månad rekommenderas.<br><b>Munstycken:</b> kastas normalt efter användning. Annars rengöring med genomspolning i diskdesinfektor efter varje användning.<br><b>Allmänt:</b> All utrustning genomspolas grundligt med friskt vatten före varje användning i samband med inställning av lämplig vattentemperatur. Följ anvisningar i Vårdhandboken, vardhandboken.se . |                                                          |
|                                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |

\*/ 2 st olika gängövergångar ingår (inv. M22 och utv. M24) passar till all moderna handfats- och diskbänksblandare. Andra gängalternativ kan levereras vid behov.

### Övrigt.

#### Blandare för anslutning av Ewacs Öronspolare.

För maximal temperaturstabilitet och säkerhet **rekommenderas anslutning till termostatblandare**. Vid normalfunktion kan även engreppsblandare fungera bra.

#### Kortfattad installationsbeskrivning.

Öronspolaren ansluts till vattenblandare via en snabbkoppling som ersätter befintlig strålsamlare. Tryckregulatorn fästs i blandarens snabbkoppling och spolslang, spolpistol och spolmunstycke ansluts med snabbkopplingar. Blandaren öppnas helt och vattentemperaturen justeras. Spoltrycket ställs in med ratten på regulatorn som är justerbar i utdraget läge och ratten låses därefter. Förinställt spoltryck är ca 0,2 bar.

**Se Bruksanvisning för utförligare anvisningar om installation och användning!**