




Gipsöppnare

- Snabbt och enkelt
- Praktiskt - dammfritt
- Bekvämt för patienten
- Inga risker för skador



Anbringande

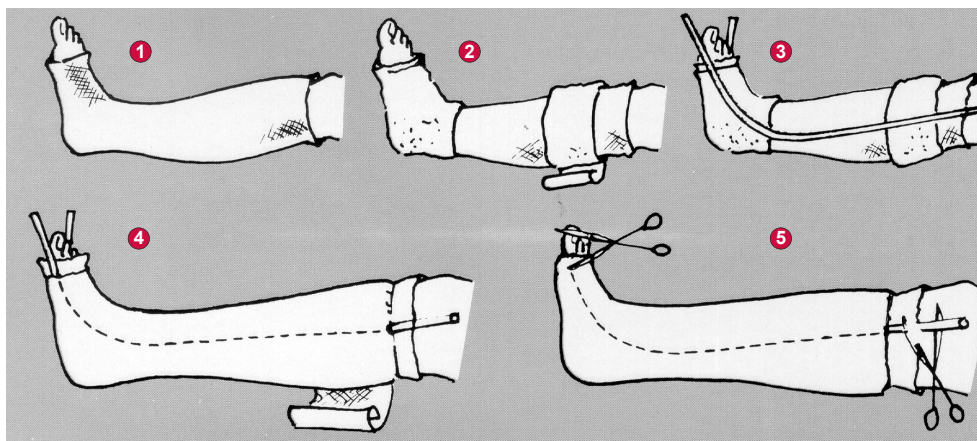


1. Trä på triksåstrumpan.
2. Polstra.
3. Fäst den självhäftande plastprofilen på extremiteten.
OBS! Plastprofilen måste vara något förskjuten åt böjsidan och läggas i så mjuk böj som möjligt.

Den får ej anbringas bakom eller på malleoler eller andra utskjutande bändelar.

4. Anlägg gipsen enligt vanlig rutin.
5. Klipp av eventuella utskjutande delar av plastprofilen vid gipsen, utan att sågtrådens införande förhindras.

Avlägsnande

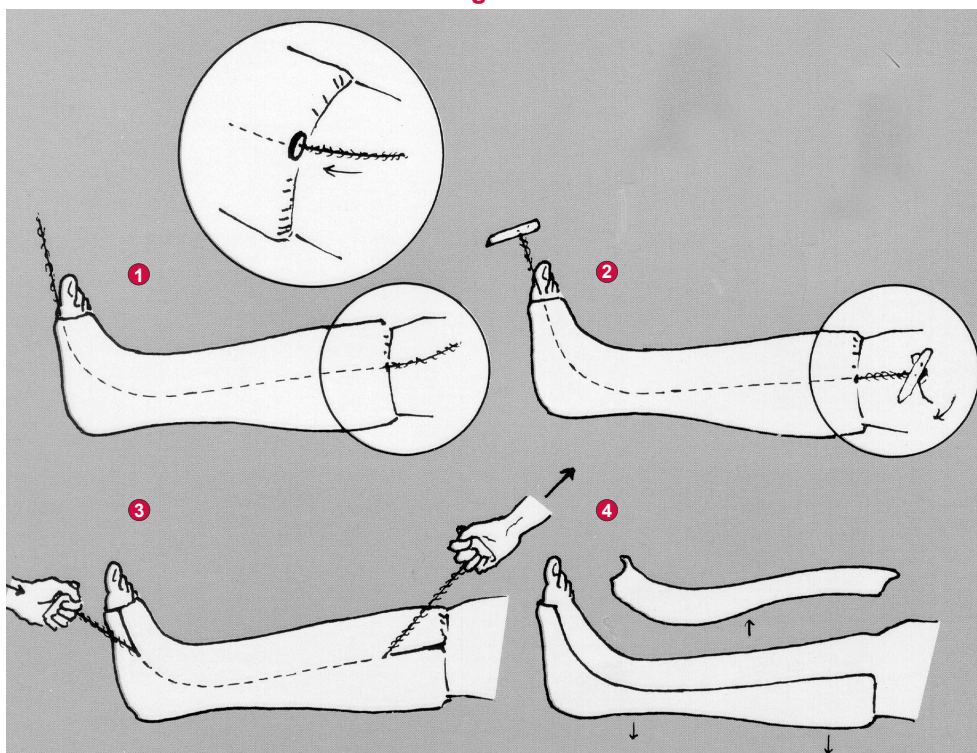

1. För in sågtråden genom plastprofilen.
2. Fäst ett handtag i vardera ändan av sågtråden.
3. Såga med försiktiga rörelser genom gipsen - inifrån och ut. Börja sågrörelsen parallellt med extremiteten och öka sedan angreppsvinkeln genom att höja sågtråden till maximalt 45°. Såga upp gipsen genom att dra handtagen fram och tillbaka. Om sågtråden går trögt, sänk handtagen och såga parallellt igen.

OBS! Skulle patienten säga att det känns varmt vid sågrörelserna, avvakta en liten stund och börja åter såga.

4. Sedan båda sidor genomsågats avlägsnas gipsen genom att det lösa locket avlyftes och triksåstrumpan och polstringen klipps upp, varefter extremiteten togs ur den bildade gipsskenan.

Stille gipsöppnare

413-2500-2	Handtag för STILLE gipsöppnare metall ledat t-form
413-2502-85	Sågtråd Stille 85 cm förp om 100 st
413-2502-125	Sågprofil Stille 125 cm förp om 100 st
413-2504-85	Plastprofil Stille 85 cm förp om 100 st
413-2504-125	Plastprofil Stille 125 cm förp om 100 st



Stille Surgical AB

Box 709

SE-169 27 Solna

Tel 08 588 58 000 Fax 08 588 58 005
website: www.stille.se e-mail: info@stille.se