



Brukervennlig håndtak (sterilt i pakningen) for godt grep og non-touch teknikk. Kan kobles til standard urinpose eller forlengerslange.

Aktiveres umiddelbart – steril saltvannssoppløsning inkludert, et trykk på posen og det er klart til bruk.

Diskret design.

Ytterpakningen er både en hygienisk og diskret pakning som kastes etter bruk.

Glatte kateterhull for maksimal komfort.

Uten PVC, phthalater eller latex.



Alle LoFric kateter har det unike overflatebelegget Urotonic™ Surface Technology.

Dette gjør katetret like skånsomt og trygt både når det settes inn og trekkes ut.

Bruksområde

LoFric® Sense™ urin tappekaterer for kvinner til intermitterende kateterisering via uretra. Kun til engangs bruk.

Sterilisering og holdbarhet

Alle katetre er strålesterilisert. Utløpsdato er trykket på pakningen.

Pakning

Peel-open pakning for engangsbruk.
30 kateter per eske.
4 esker per transportkartong.

Materiale

Hydrofilt overflatebelegg: Polyvinyl pyrrolidone (PVP).

Kateter: Polyolefinbasert elastomer, (POBE).

Vannbeholder: Laminert folie av polyethylene terephthalate (PET), aluminium og polyethylene (PE). Sterilt vann tilsatt salt (NaCl).

Pakning: Laminert folie av polyester med aluminium oksid (PET/Alox), lineær polyetylen med lav tetthet (LLDPE), aluminiumsfolie.

Produktsortiment

Artikkelnr.	Type	Lengde	Str.
416 08 20	LoFric® Sense™ Nelaton	15 cm	CH 08
416 10 20	LoFric® Sense™ Nelaton	15 cm	CH 10
416 12 20	LoFric® Sense™ Nelaton	15 cm	CH 12
416 14 20	LoFric® Sense™ Nelaton	15 cm	CH 14



Brukervennlig oppbevaringseske.

LoFric® Sense™


Instruksjoner

Viktig informasjon


Sørg for at brukeren får god opplæring i kateteriseringsprosedyren.

Start med å vaske hendene med såpe og vann.


Katetret er et engangsprodukt. Etter bruk vil overflatebelegget forringes, og katetret vil ikke lenger være sterilt. Bruk kun saltvannsoppløsningen som er inkludert i pakningen til å fukte katetret.

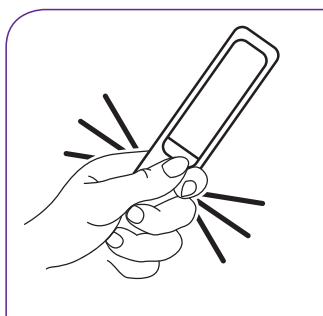


1. Trykk slik at posen med saltvannsoppløsningen utløses for å fukte katetret før bruk.

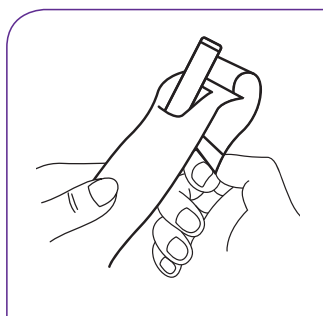

2a. Åpne pakningen ved å trekke fliken bakover.

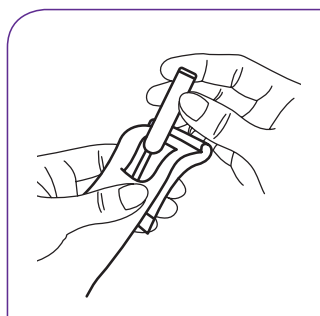

2b. Hold fliken på plass på baksiden av pakningen og ta ut katetret.

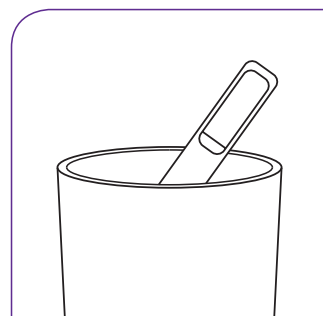

3. Pakningen er både hygienisk og diskret og kan kastes som restavfall.