

Produktbeskrivning

LoFric Elle är en hydrofil tappningskateter för kvinnor.

Användning

Engångskateter för kvinnor avsedd att användas vid intermittent kateterisering av urin.

Sterilisering och hållbarhet

Steriliserad med hjälp av strålning. Rekommenderad hållbarhet enligt datumstämpel på förpackningen.

Förpackning

Styckförpackning. 30 katetrar per kartong. 2 kartonger per transportförpackning.

*CE-märks Februari 2020

Produktsortiment

Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Storlek
418 12 20	LoFric® Elle™ Nelaton	10 cm	CH 12
418 10 20	LoFric® Elle™ Nelaton	10 cm	CH 10*
418 14 20	LoFric® Elle™ Nelaton	10 cm	CH 14*

Material

Katetermaterial:

Polyolefin-baserad elastomer (POBE).

Ytbeläggning:

Polyvinylpyrrolidon (PVP).

Aktiveringsvätska:


Vattenbaserad aktiveringsvätska med glycerol.

Material styckförpackning:

Polypropylen.



Användarvänlig kartong.

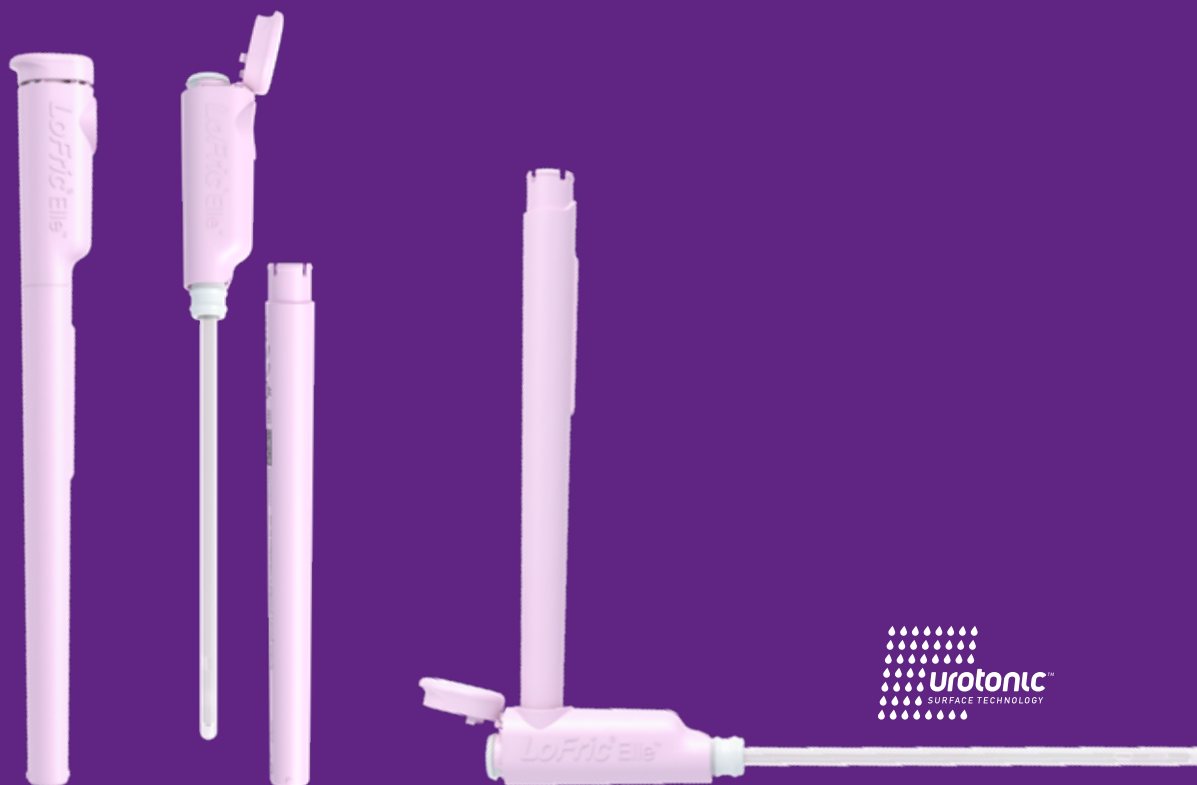

- Designad för att vara ergonomisk och användarvänlig. Med vinklat handtag - för bra grepp och hygien eftersom katetern aldrig behöver vidröras. Går att koppla till vanliga uppsamlingspåsar eller förlängningsslang.
- Klar att använda direkt när du behöver, för snabb hantering och kateterisering.
- Liten och diskret design
- Styckförpackningen är återvinningsbar som plast (polypropylen)
- Fri från PVC, ftalater och latex.
- Alla LoFric-katetrar har det unika ytskiktet Urotonic™ Surface Technology. Det gör ytan skonsam och säker både när katetern förs in och dras ut

LoFric® Elle™

Instruktioner

Viktig information

Var noga med att användaren får tillräcklig träning i att utföra kateteriseringen.

Börja med att tvätta händerna med tvål och vatten.

Detta är en engångsprodukt. När den har använts försämras ytbeläggningen och katetern är inte längre steril.

