



Visuell beskrivelse av prosedyren / bruksanvisning for Eurotrol GlucoTrol-NG

1 La flasken stå i romtemperaturen 15-30 °C i 15 minutter.

2 A Bland flasken forsiktig 8-10 ganger.

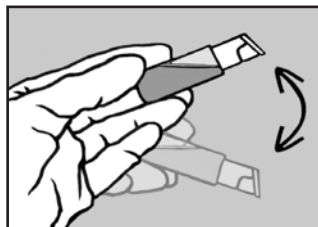


2 B Hold flasken rett opp og knips korken flere ganger.

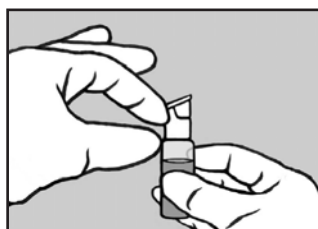


2 C Åpne opp flasken ved å dra korken opp.




3 A Ikke fyll kyvetten direkte fra flasken. Legg en dråpe med kontrollmateriale på et hydrofobt underlag, for eksempel en plastfilm.

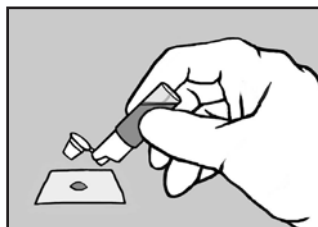

3 B Fyll kyvetten ifølge produsentens anvisning. Legg kyvetten i instrumentet for umiddelbar analyse.

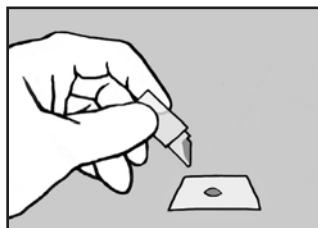

4 Tørk av overflødig kontrollmateriale fra dråpetuten og fra korken, med et rent tørkepapir. Sett på korken igjen så flasken er helt tett.

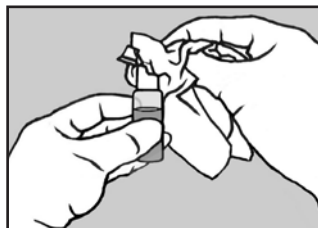

5 Oppbevares i kjøleskap 2-8 °C.

6 Hvis kontrollmaterialet ikke yter som forventet, se i bruksanvisningen for det aktuelle instrumentet for å sjekke at kontrollmålingen ble utført riktig. Kontrollér utløpsdatoen og sjekk at både kontrollen og kyvetten ble oppbevart riktig. Utfør en ny måling med kontrollmaterialet. Hvis det fortsatt ikke yter som forventet, ta kontakt med din lokale forhandler.

