

Tubigrip®

Allsidig elastisk, tubulær bandasje¹



Kan klippes til ønsket lengde¹ for tilpasset passform



Tilgjengelig i 11 ulike bredder for å dekke de fleste størrelser

Enkel i bruk:

Tubigrip er designet for enkel applisering og reapplisering¹. Ingen nåler eller tape er nødvendig.

Effektiv:

Tubigrip gir kontinuerlig og jevn støtte¹. Den gir lett kompresjon²⁻⁴ og kan brukes i behandling av ødem^{2,4}.

Gjenbrukbar:

Tubigrip kan vaskes og gjenbrukes opptil fem ganger¹.

Anbefalt bruk:

Gir god støtte ved forstuinger, strekk og hevelser.

Hvordan bruke Tubigrip



1. Klipp Tubigrip til to ganger størrelsen av det berørte området (f.eks. dobbelt så langt som leggen), inkludert 2-3 cm for overlapping.



2. Dra på Tubigrip som en strømpe over området.



3. Dra deretter enden av bandasjen over det første laget, slik at bandasjen ligger dobbelt. Pass på at kanten på det ytterste laget går ca. 2-3 cm over det første.

Om Tubigrip

Tubigrip gir god støtte ved forstuinger, strekk og hevelser. Den gir jevn kompresjon (5-30 mmHg trykk ved dobbelt lag)¹.

Bandasjen følger kroppens konturer og gir et jevnt trykk over hele flaten¹.

Tubigrip inneholder naturgummilatex, som kan forårsake allergiske reaksjoner, inkludert anafylaktiske reaksjoner, hos personer som er overfølsomme for dette materialet.



Tubigrip sortiment

Art. nr.	Betegnelse	Passer kroppsdel	Kroppsdel i cm	Antall i eske	Antall i kartong
1435	A	Barneføtter og -armer	10-14,5	1	44
1436	B	Små hender og armer	14,5-24	1	32
1443	C	Medium armer og små ankler	22-36	1	28
1437	D	Store armer, medium ankler, små knær	26-41	1	28
1434	E	Store ankler, medium knær, små lår	29-46	1	24
1438	F	Store knær, medium lår	33-53	1	20
1439	G	Store lår	39-62	1	12
1440	J	Liten kropp	54-82	1	8
1441	K	Medium kropp	70-113	1	6
1442	L	Stor kropp	106-149	1	4
1444	M	Ekstra stor kropp	119-167	1	4

1. Mölnlycke Health Care. Data on file. 2. Gleeson AP, Stuart MJ, Wilson B, Phillips B. Ultrasound assessment and conservative management of inversion injuries of the ankle in children: Plaster of Paris versus Tubigrip. Journal of Bone and Joint Surgery - Series B;1996;78(3):484-487. 3. Naeem M, Rahimnajiad MK, Rahimnajiad NA, Idrees Z, Shah GA, Abbas G. Assessment of functional treatment versus plaster of Paris in the treatment of grade 1 and 2 lateral ankle sprains. Journal of Orthopaedics and Traumatology. 2014. 4. Tivendale L, Wynne R, Law SS, Kenny L, Dean G, Tatoulis J. Effect of external compression bandage on forearm swelling, discomfort, and pain following the removal of a radial artery conduit for CABGS. Chest.2011;140(4).

Les mer på molnlycke.no

Mölnlycke Health Care AS, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo. Besøksadresse Brynsalléen 4, 0667 Oslo. Tlf. +47 22 70 63 70. Varemerkene, navnene og logoene til Mölnlycke er registrert globalt av ett eller flere av selskapene i konsernet Mölnlycke Health Care. ©2025 Mölnlycke Health Care AS. Med enerett. NOWC7032509

