

ELSET'S'

Spesialbandasje for amputasjonsstumper



- Svært elastisk
- Lett å forme
- Myk og smidig rayon
- Vokset kanter, skal ikke klippes
- Skal ikke strekkes ved bandasjering
- Vaskes for hånd, tørkes liggende
- Inneholder latex

Husk på følgende ved bruk av Elset'S'

1. Elset S levers strukket og festet med sikkerhetsnåler. Bandasjen må derfor ikke strekkes første gang den brukes.
2. Andra gången Elset S brukes må den kun strekkes til max halvparten av egen lengde. Man kan ellers risikere at bandasjen strekkes for hardt og medfører staser.
3. Elset S vaskes på 40 grader, håndvask anbefales. Skal ikke sentrifugeres. Tørkes liggende.
4. Elset S kan autoklaveres.
5. Om Elset S er for lang, bandasjer da noen ekstra runder. Kantene er vokset og skal derfor ikke klippes av.



Tillverkas av:
Mölnlycke Health Care
Box 13080
SE-402 52 Göteborg
Sweden

Elset'S' innehåll: 85% rayon med elastisk nylonomspunnen tråd av naturgummilates

Rest efter förbränning: Koldioxid och vatten.



Förp. innehåll:

-Prod: Polyeten
-Avd: Kartong
-Transp: 80% återvunnen fiber.

Rest efter förbränning: Koldioxid och vatten.

www.tillquist.se