

### For utsatte steder.

**Cellona® Padding** er et polstringsmateriale som ligger på plass og gir avlastning på trykkutsatte områder.



## Cellona® padding



### Ligger på plass.

#### **Cellona® Padding**

Er laget av myk og fleksibel polstring.

Den er luftgjennomtrengelig, selvklebende og hudvennlig.

Limet er påført i strimler.

### Raskere tilheling



- Sår oppstått på trykkutsatte steder tilheler raskere med god trykkavlastning.

### Lett å tilpasse



- Paddingen kan klippes til.

### Hudvennlig



- Dette skyldes et hudvennlig lim som påføres i strimler på polstringen.
- Den er permeabel (puster).

### Indikasjoner

- For trykkutsatte steder.
- Forebygge trykksår.
- Til trykkavlastning ved fotsår.
- Kan brukes som trykkavlastning ved gips foreksempel under harde kanter.

### Funksjon

- For trykkavlastning.
- For raskere sårtilheling.



## Bruksanvisning

1. Eventuelt sår skiftes på etter gjeldende prosedyre.
2. Huden må være ren og tørr. Unngå kremer der paddingen skal festes.
3. Ved trykkavlastning av sår bør man tilstrebe en bred trykkavlastende padding rundt såret slik at trykket kan fordeles på en større flate.
4. Ta av beskyttelsespapiret og lim paddingen direkte på huden.
5. Paddingen må ikke ligge på selve såret, det er ingen bandasje.
6. Kan klippes til og legges i flere lag ved behov for ekstra trykkavlastning.
7. Byttes når den er kontaminert med puss eller sekresjon fra såret, blir våt eller om den har blitt flatere pga trykkbelastning.

## Fint å vite

- Det er ingen risiko forbundet med å bruke Cellona® Padding dersom den brukes til det den er ment for.
- Produktet inneholder ikke latex.

## Cellona® Padding

Størrelser	Lev.art.nr.	Avd.fp	Trp.fp
5 mm tykk 19 x 38 cm	50810LR	10	60
2mm tykk 58 cm x 1 m	50811LR	1	10
2 mm tykk 28 cm x 10 m	50813LR	1	1

### Produktmateriale

- Cellona® padding består av et materiale laget av polyester, polypropylen og viskose. Den er belagt på den ene siden med et syntetisk gummilim som er påført i striper.
- Den selvklebende siden er dekket med hvitt papir som er silikonisert på den ene siden.
- Produktet er tilgjengelig i forskjellige størrelser.

### Cellona® Padding

- MDR klasse 1.
- Holdbar i 3 år.
- Oppbevares tørt og rent i romtemperatur.
- Produktemballasje av polyetylen.
- Lageremballasje av cellulose. Kan kildesorteres.
- Transportemballasje i bølgepapp av cellulose. Kan kildesorteres.
- Produktet behandles som brennbart avfall i henhold til nasjonale og lokale forskrifter.