

## Én kortelastisk bandasje. 3 i 1. Alt du trenger!

**Rosidal®1C** er et kortelastisk kompresjonssystem som bidrar til høyt og effektivt arbeidstrykk og et lavt hviletrykk (ca 40-60mmHg)

Kompresjonsbindet består av et hudbeskyttelseslag, et polstringslag og et kompresjonslag - 3 i 1



### Mange fordeler!

**Rosidal®1C** består av ett-lags kompresjonsbind som er klart til bruk!

Bandasjen gir et korrekt terapeutisk trykk ved full strekk, noe som sikrer maksimal effekt - med bare ett bind  
Effektiv, enkel og tidsbesparende

#### Raskt applisering



- Enkel og rask
- Trenger bare et bind
- Safe-Loc systemet sikrer korrekt terapeutisk trykk ved full strekk

#### Enkel å bruke



- 3 - i - 1 bind
- To-veis elastikk gjør den lett å påføre
- Kan sitte på i opptil 7 dager
- Slitesterk

#### Pasientvennlig



- Trygg og komfortabel
- Latexfri
- Komfortabel tekstil
- Skånsom for huden
- Kan være på hele døgnet
- Får plass i skoene

#### Indikasjoner:

- Venøs insuffisiens og følgetilstander
- Venøst leggsår og blandede venøst sår
- Behandling av ødem
- Etter skleroserende behandling og etter karkirurgi
- Kontusjoner, forstuinger, seneskader og leddluksasjoner
- Til å fikse bandasjer
- Ankel-arm indeks >0,8
- Ankel-arm indeks 0,5-0,8 bare etter avtale med lege





### Forsiktighetsregler:

- Avansert perifer karsykdom
- Ubehandlet hjertesvikt
- Diabetes med uttalt mikroangiopati
- Phlegmasia cerulea dolens (blå flegmasi)
- Septisk flebitt
- Overfølsomhet mot produktets bestanddeler

### Bestillingsinformasjon

| Størrelser cm x m (strukket lengde) | Lev Art.nr | Avd.fp | Trp.fp |
|-------------------------------------|------------|--------|--------|
| 8 x 6                               | 162 155    | 6      | 24     |
| 10 x 6                              | 162 157    | 6      | 24     |
| 8 x 6                               | 162 154    | 1      | 32     |
| 10 x 6                              | 162 156    | 1      | 32     |

### Produktmateriale


- Polyamid 48%
- Bomull 42%
- Polyester 6%
- Elastan 4%
- Latexfri

### Bruksanvisning

- Før applisering må huden rengjøres og eventuelle sår behandles etter gjeldende prosedyre
- Ved applisering bør foten være i en vinkel på 90 grader for å kunne oppnå god bevegelighet
- Hold bandasjerullen nær benet ved applisering
- Bindet skal appliseres med bindets utside vendt inn mot huden (LR merket)
- Start med to runder rundt forfoten og legg bandasjen sirkulært med ca 50 % overlapp fra tær, dekke hæl og opp til 3 cm under kneet
- Bindet skal legges med full strekk
- Fikses med tape

### Tips:

- Bindets bredde skal tilsvare diameteren på kroppsdelen som skal bandasjeres
- Bindet kan legges med ulike bandasjeringsteknikker

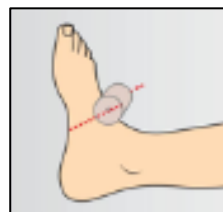

- Scan QR-kode for å komme til hjemmesiden og for å se film på hvordan den legges

### Rosidal®1c

- CE-merket i henhold til MDR klasse 1
- Oppbevares tørt og rent i romtemperatur
- Holdbar i 5 år fra produksjonsdato
- Produktemballasje av cellulose
- Lageremballasje og bruksanvisning av cellulose som kan kildesorteres.
- Transportemballasje i wellpapp/bølgepapp av cellulose. Kan kildesorteres
- Produktet behandles som brennbart avfall i henhold til lokale og nasjonale forskrifter