


Suprasorb® C

Bruksanvisning

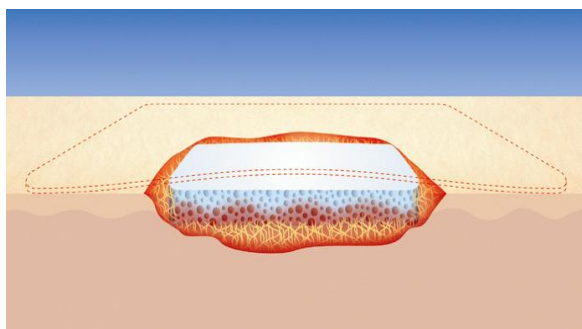

Suprasorb® C

Kollagent sårförband

Suprasorb C är ett sårförband med förmåga att sätta fart på sårsläkningen. Vanligtvis har denna typ av förband använts vid stagnerande sår, men kan även med fördel användas som förstahandsval till många andra sår där man vill stimulera och påskynda läkningsprocessen.

Suprasorb C accelererar sårsläkningen genom att stimulera hemostasen, verka upptätnings på såret och sätter fart på syntesen av kollagen och fibroblastaktiviteten.

Förbandet är upptätnings och har mycket goda absorberande egenskaper. Det kan absorbera stora mängder sårsekret, nekrotisk vävnad, bakterier och fibrin. Det stimulerar granulationsfasen och ger goda kosmetiska resultat vid ärrformationer.

Förbandet består av 100% kollagen och är helt resorberbart.

Indikationer:

Suprasorb C är lämpligt att använda vid ett flertal olika sårtyper såsom:

- stagnerade sår
- 2:e gradens brännskador
- skadad vävnad efter operationer
- både icke infekterade och infekterade sår
- även som förstahandsval

Storlek	Lev.artnr	Avdfp	Trpfp
4x6cm	20 481	5	225
6x8cm	20 482	5	180
8x12cm	20 483	5	90



Suprasorb® C

Sårförberedelse:

- Rengör såret noggrant enligt gängse rutiner
- Omgivande hud ska vara ren och torr



Applicering

Vid vätskande sår:

- Appliceras normalt torrt direkt på såret eller i sårhålan
- Klipps till efter sårets form/storlek med steril sax
- Lägg ej utanför såret - där har den ej någon effekt
- Den tätaste strukturen av kompressen läggs emot sårytan (den tätaste strukturen ligger nedåt i förpackningen vid leverans)
- Tryck lätt för att få kontakt med sårets yta



Vid torra sår:

- Kompressen fuktas med steril NaCl i den medföljande förpackningsskålen
- Den fuktiga kompressen luckrar upp den torra sårytan- och därmed kan såret ta till sig kollagenet.

Välj täckförband som bevarar fuktigheten

Täckförband

Lätt vätskande sår:

- Skapa fuktig sårmiljö
- Lätt absorberande kompress, typ Solvaline
- Sårfilm, typ Suprasorb F
- Hydrokolloid, typ Suprasorb H
- Tunt polyuretanförband

Måttligt vätskande sår:

- Bevara fuktig sårmiljö – ta hand om överflöd av sårvätska
- Hydrokolloid, typ Suprasorb H
- Polyuretanförband, typ Suprasorb P



Rikligt vätskande sår:

- Bevara fuktig sårmiljö – ta hand om överflöd av sårvätska
- Polyuretanförband, typ Suprasorb P
- Abs förband, typ Vliwazell

Byte hur ofta?

- Icke infekterat sår - beror på mängden sårexsudat men ca 2 ggr i veckan
- Infekterat sår inspekteras dagligen eller enligt rutin

Helt resorberbart!

- Kollagenkompressen är helt resorberbar
- Kan resorberas redan efter 2-3 dagar

Biverkningar:

Inga biverkningar är kända vid avsedd användning av Suprasorb C kollagenförband