

Strømpepåtrekker "Doff N'Donner" sett (muffe og kjeGLE)

Artikkel nr N7385253

Kommer komplett med Doff N donner kjeGLE og silikonmuffe.

Er laget av et veldig mykt materiale og lar deg ta på kompresjonsstrømper raskt og smertefritt over beinet.

- Denne strøpempåtrekkeren hjelper med en uavhengig på- og avkledning.
- Ideell støtte for omsorgspersoner.
- Kjeglen letter i vesentlig grad opprulling og avrulling av strømpen.
- Rulling og avrulling av strømpe.
- Mindre innsats når du ruller opp eller ruller ned strømpene
- Kompresjonsstrømper "glir" smertefritt over sår og arr
- Myke materialer har en mild effekt på strømpene og kan forlenge holdbarheten

Rengjøring av Doff N'Donner muffen:

Etter bruk anbefales det at Doff N'Donner muffen blir rengjort eller desinfisert. Ved privat bruk anbefales det at muffen rengjøres i en vanlig pose fylt med såpevann, samtidig som posen svinges frem og tilbake.

Ved bruk til flere pasienter på institusjoner, sykehus m.m. skal muffen desiniseres eller steriliseres.

For å desinfisere muffen anbefales følgende metode:

1. Trekk en plastpose i passende størrelse ned over kjeGlen
2. Sett muffen på kjeGlen og rull den nedover
3. Ta fatt i posens åpne del og trekk den oppover
4. Fyll posen med steriliserende væske, til muffen er lett dekket av væsken
5. Beveg posen opp og ned slik at væsken fordeles jevnt over muffen
6. Trekk posen av kjeGlen med muffen i posen
7. Hell væsken av posen
8. Ta muffen ut av posen og la den tørke helt
9. Posen kasseres og skal bare brukes en gang.

