


Produktdatablad TENA Men Active Fit Level 1-3

Bruksområde

TENA Men Level 1-3 er et lekkasjesikkert, behagelig og diskret produkt med en passform spesielt tilpasset menn. Det har doble kjerner for lett/middels inkontinens, og inngår i TENA Men-sortimentet med produkter i seks absorpsjonsnivåer og to modeller.

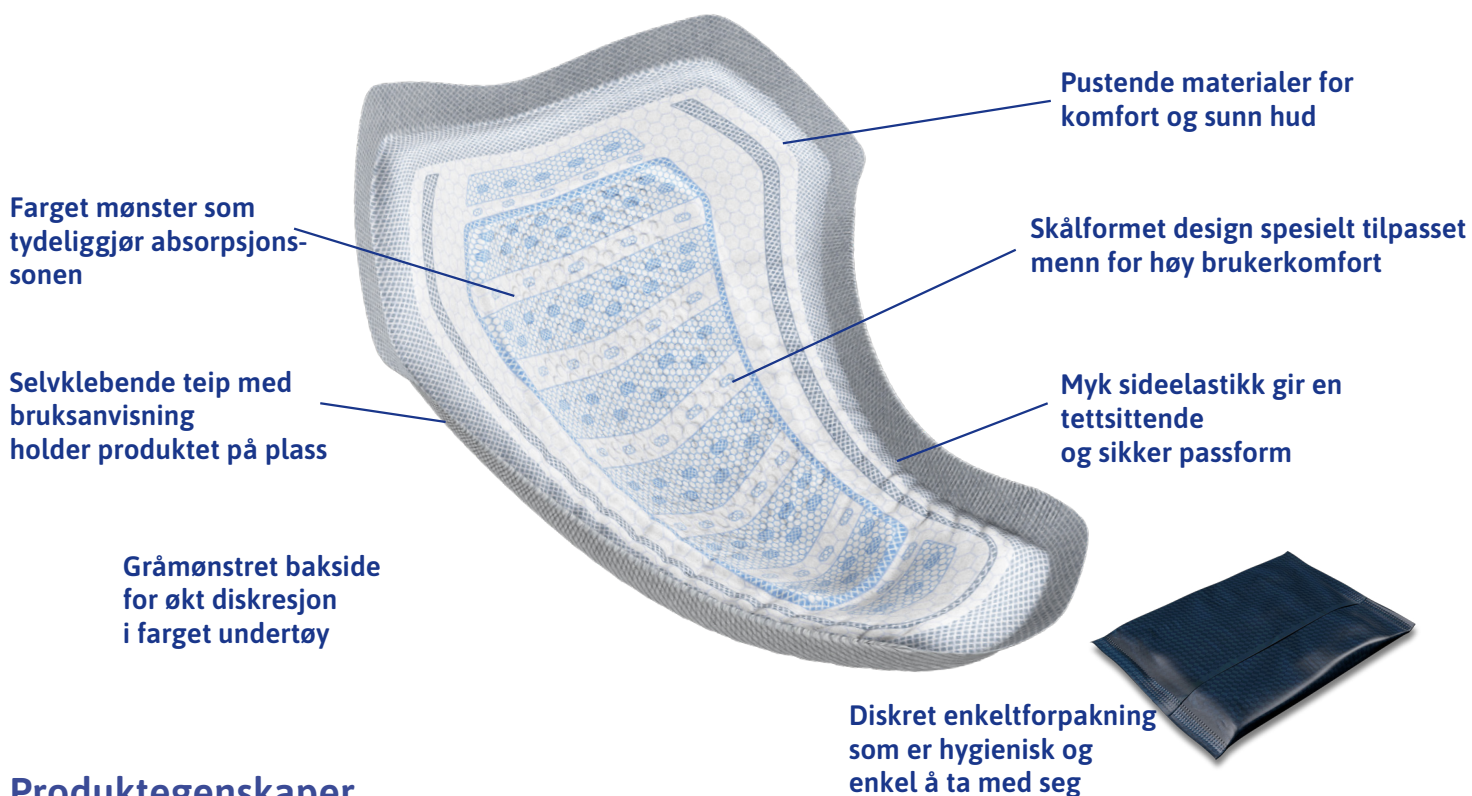

Produktegenskaper

TENA Men Level 1-3 har doble absorberende kjerner med superabsorbenter for maksimal absorpsjon. Urinen absorberes raskt, spres og kapsles inn i produktet, hvilket gjør at overflaten holdes tørr. TENA Men Level 1-3 har en myk og stabil elastikk i sidene som øker både lekkasjesikkerheten, skålfasongen og komforten.

TENA Men Level 1-3 har Odour Control™ som motvirker uønsket lukt. Tekstilliknende pustende materialer rundt hele produktet, samt et pustende sperresjikt gir økt komfort og bidrar til å minske risikoen for hudproblem.

TENA Men Level 1-3 festes ved hjelp av teip på produktets bakside i tetsittende undertøy eller fikseringstruser. Teipen holder produktet sikkert på plass uten å etterlate limrester på klærne. Teipens beskyttelsespapir er merket med produkt navn/størrelse og illustrasjoner som viser hvilken del av produktet som skal peke oppover, samt hvordan det festes.



Produktdatablad TENA Men Level 1-3


TENA Men							
Absorpsjonsnivå/størrelse	Lengde cm	Bredde cm	Vekt g	Antall/pose stk	Antall/kart stk	ISO 11948-1 Absorpsjonskapasitet	Essity Art.nr
Level 1 eske				12	96		750661
Level 1 pose				24	144		750684
Level 2 eske				10	60		750796
Level 2 pose				20	120		750874
Level 3 eske	27	23,6	31	8	48	717 ml	750856
Level 3 pose	27	23,6	31	16	96	717 ml	750876



Absorberende kjerne låser effektivt inn urin



Fasong spesielt designet for mannens anatomi

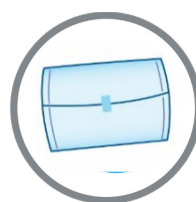

Enkeltpakkede



Odour Control motvirker uønsket lukt




Doble kjerne for maksimal absorpsjonskapasitet



Sitter sikkert og diskret i tettsittende undertøy

Bruksanvisning

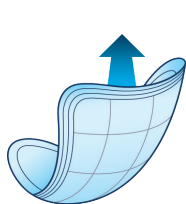

Ta ut produktet ut av emballasjen og brett det ut.

Dra av beskyttelsespapiret på baksiden.

Plasser produktet over penis og pung, og fest det i tettsittende undertøy eller fikseringstruse.

Rull sammen produktet etter bruk og kast i henhold til gjeldende regler for avfallshåndtering.

Produktdatablad TENA Men Level 1-3

Varedeklarasjon

OVERFLATE

Materiale: Non-woven; Polypropylen (PP)

Funksjon: Gjør produktet mykt, holde huden tørr

LEKKASJESPERRE

Materiale: Vatt av polypropylen og polyester

Funksjon: Slippe urinen raskt gjennom og motvirke at urin kommer tilbake til overflaten

ABSORBSJONSKJERNE

Materiale: Cellulosemasse og superabsorbenter

Funksjon: Absorbere og lagre urin

SUPERABSORBENT

Materiale: Polyacrylat

Funksjon: Absorbere og holde på væske, samt nøytralisere uønsket lukt

BARRIERE-ELASTIKK

Syntetisk gummi; Polyisopren

Funksjon: Forhindre lekkasje, holde på passformen, samt god komfort

SPERRESJIKT

Materiale: Permeabel polyetenfilm (PE)

Funksjon: Hindre gjennomvæting

TENA Men-produkter inneholder ikke: Naturgummi (latex), PVC, kolofonium, duftkomponenter, hudpleiende midler eller parfyme.

Produktene kan benyttes inntil tre år etter produksjonsdato. Lagres under normale forhold, og bør ikke utsettes for ekstreme temperaturer eller fukt. Produktene er klassifisert som medisintekniske, og de er CE-merkede.

Kontakt oss for mer informasjon

☎ 22 70 62 00

tena.no



TENA
an Essity brand

