

PRODUKTFAKTABLAD

TENA PANTS

SUPER OCH MAXI



Användningsområde

TENA Pants i Super och Maxi absorption är ett säkert, bekvämt och diskret byxskydd för medelstora till mycket stora urinläckage och är mycket lämpligt för uppegående vårdtagare. Finns i fem storlekar från XS till XL och två absorptionsnivåer. Skyddet tas enkelt på och av som vanliga underkläder, vilket ger användaren större möjlighet att klara sig själv samt ökar känslan av välbefinnande och oberoende.



Sidosömmar som går att riva

Mjuka, andningsbara, textilliknande material i hela produkten för god hudhälsa och komfort för användaren

Dubbla läckagebarriärer för hög läckagesäkerhet och med färgad elastik som visar absorptionsnivå

Spridningsskikt FeelDry™ kapslar snabbt in urin och håller huden torr

Odour Neutralizer för neutraliserande effekt på oönskad lukt

Färgad midjeelastik visar absorptionsnivå

Innovativ resår under kärnan ger kroppsnära passform och smidighet i grenen. Produkten sjunker inte ner i vått tillstånd.

Diskret våtindikator



Anpassad för användning tillsammans med TENA SmartCare Change Indicator

PRODUKTFAKTABLAD

TENA PANTS **SUPER OCH MAXI**

Produktegenskaper

TENA Pants är gjorda av mjuka, andningsbara material vilket ger ett mycket bekvämt och hudvänligt skydd. Produkten har andningsbart spärrskikt. Midjeresåren (elastiska trådar som även går ner över absorptionskärnan) ger en kroppsnära passform vilket gör produkten mycket bekväm och säker under hela användningstiden. Storlekarna L och XL har extra elastiktrådar framtill för ännu bättre passform och komfort.

Benelastik tillsammans med läckagebarriärer som sluter tätt mot huden gör skyddet både bekvämt och läckagesäkert. Mjuk och hög läckagebarriär med färgad elastik som visar absorptionsnivå. Dubbla absorberande kärnor med superabsorbenter tillsammans med spridningsskiktet FeelDry™ gör att urinen sprids och absorberas effektivt. Ytan mot huden hålls torr, vilket främjar en god hudhälsa.

TENA Pants är ett mycket diskret skydd. Den kroppsnära passformen förhindrar att skyddet syns utanpå kläder och det textilliknande materialet gör skyddet prasselfritt. Odour neutralizer neutraliserar effekten av oönskad lukt.

Färgad trådelastik i bakre linningen visar absorptionsnivå. Storleksmarkeringen finns printad på utsidan av produkten i grenpartiet. Tejprensan på baksidan av skyddet gör det enkelt att fästa ihop skyddet innan det slängs.



TENA Pants									
Uppsugningsnivå/ storlek	Svanen- märkt	Midja/höft cm	Vikt g	Ben- öppning cm	Antal/påse st	Antal/kart st	ISO 11948-1 Absorptions- kapacitet	Praktisk absorption	Essity Art.nr
Super									
X-Small	✓	50-70	79	35-55	12	48	1917	639	79 23 43
Small	✓	65-85	80	40-65	12	48	1865	622	79 34 64
Medium	✓	80-110	83	45-70	12	48	1893	631	79 35 65
Large	✓	100-135	86	55-80	12	48	1872	624	79 36 65
X-Large	✓	120-160	90	65-90	12	48	1888	629	79 37 65
Maxi									
Small	✓	65-80	99	40-65	10	40	2453	818	79 44 12
Medium	✓	80-110	102	45-70	10	40	2482	827	79 45 63
Large	✓	100-135	105	55-80	10	40	2403	801	79 46 63
X-Large	✓	120-160	117	65-90	10	40	2728	909	79 47 64

Användarinstruktion



PRODUKTFAKTABLAD

TENA PANTS **SUPER OCH MAXI**

Ingående material

YTSKIKT INSIDA

Material: Nonwoven

Funktion: Torrhet/mjukhet mot huden

YTSKIKT UTSIDA

Material: Nonwoven

Funktion: Ökad bekvämlighet och diskretion (prasselfri)

INSLÄPPS- OCH SPRIDNINGSMATERIAL

Material: High loft nonwoven

Funktion: Snabbt insläpp och effektiv spridning av urin, motverkar urin att tränga tillbaka upp till ytan

ABSORBTIONSKÄRNA, Övre

Material: Cellulosamassa och superabsorbenter

Funktion: Sprida, absorbera och hålla kvar vätska

ABSORBTIONSKÄRNA, Undre

Material: Cellulosamassa

Funktion: Sprida, absorbera och hålla kvar vätska

SUPERABSORBENT

Material: Polyacrylat

Funktion: Absorbera och hålla kvar vätska samt till viss del neutralisera oönskad lukt

HÖFT-, GREN- OCH MIDJEELASTIK

Material: Syntetiska polyeter-polyuretantrådar (Spandex)

Funktion: Bekvämlighet och kroppsnära passform

BEN – OCH BARRIÄRELASTIK

Material: Syntetiska polyeter-polyuretantrådar (Spandex)

Funktion: Bekvämlighet och förhindra läckage

SPÄRRSKIKT

Material: Polyeten andningsbar

Funktion: Förhindra läckage/genomvätning, tillåta fuktig luft att ventileras ut från skyddet och på så sätt bibehålla en god hudmiljö och komfort

För samtliga TENA Pants skydd gäller att följande material /ämnen inte har tillsatts produkterna: naturgummi (latex), PVC, kolofonium, doftämnen, hudvårdande medel eller parfym.

Produkterna kan användas tre år efter tillverkningsdatum. Lagras under normala förhållanden och bör ej utsättas för extrema temperaturer eller väta. Produkterna är klassificerade som medicinteknisk produkt och är CE-märkta.

Kontakta oss för mer information

☎ 020 - 27 20 20

🌐 tena.nu

✉ tena.nu@essity.com

📘 facebook.com/TENASverige

 **essity** TENA,
an Essity brand

