

Ny og forbedret: Svært god klebeevne og ekstra hudvennlig

Perforert fikseringstape/-bandasje på rull

# 3M™ Medipore™ H Fikseringstape



## Produktbeskrivelse

En myk, elastisk og formbar fikseringstape/-bandasje som er meget enkel å bruke og ekstra hudvennlig.

Den er porøs og hypoallergisk - lar huden puste. Meget god klebeevne. Perforeringen forenkler bruken: Klar til bruk uten saks. Ingen beskyttelsespapir som skal fjernes. Den ferdige perforeringen gjør det enkelt å tilpasse ønsket lengde. *Enkelt å håndtere fordi det ikke krøller og ikke kleber til seg selv.* Enkel å håndtere med hansker på. Kostnadseffektiv - mindre spill.

## Innholdsdeklarasjon

Non-woven polyester med hypoallergent og trykksensitivt klebestoff på acrylbase.

## Lagring og holdbarhet

3M™ Medipore™ H perforert fikseringstape/-bandasje oppbevares ved normal luftfuktighet ved temperaturer mellom 15 og 30° C. Kan lagres i 3 år.



## Bruksområder

- Feste av kompresser over operasjons- og kroniske sår
- Spesielt godt egnet på ujevne og bevegelige områder
- Der det forventes hevelse eller bevegelse etter operasjon
- På tynn, følsom hud eller ved gjentatt bandasjering
- Til feste av katetre og annet utstyr

## Bruerveiledning

1. Sett tape og bandasjer på ren, tørr hud fri for kjemikalier og fett
2. Fest den fra midten og utover, og gni eller trykk etter applikering for å oppnå maksimal klebeevne
3. Ikke sett tape og bandasjer på med strekk! Strekk kan skade huden
4. Se også vår brosjyre "Tape teknikker/Tips om tape"



Ny og forbedret: Svært god klebeevne og ekstra hudvennlig

Perforert fikseringstape/-bandasje på rull

# 3M™ Medipore™ H Fikseringstape



BR53-NO56-4-0/2012-03

3M-produktnr.	Størrelse	Antall/eske
2861	2,5 cm x 9,1 m	24
2862	5 cm x 9,1 m	12
2863	7,5 cm x 9,1 m	12
2864	10 cm x 9,1 m	12
2866	15 cm x 9,1 m	12
2868	20 cm x 9,1 m	6

## 3M Norge A/S

Avd. Helseprodukter  
Postboks 100, 2026 Skjetten  
Tel: 0 63 84  
Faks: 63 84 17 88  
[www.3m.no/helse](http://www.3m.no/helse)

