

Ny og forbedret: Svært god klebeevne og ekstra hudvennlig

Perforert fikseringstape/-bandasje på rull

3M™ Medipore™ H Fikseringstape



Produktbeskrivelse

En myk, elastisk og formbar fikseringstape/-bandasje som er meget enkel å bruke og ekstra hudvennlig.

Den er porøs og hypoallergisk - lar huden puste. Meget god klebeevne. Perforeringen forenkler bruken: Klar til bruk uten saks. Ingen beskyttelsespapir som skal fjernes. Den ferdige perforeringen gjør det enkelt å tilpasse ønsket lengde. *Enkelt å håndtere fordi det ikke krøller og ikke kleber til seg selv.* Enkel å håndtere med hansker på. Kostnadseffektiv - mindre spill.

Innholdsdeklarasjon

Non-woven polyester med hypoallergent og trykksensitivt klebestoff på acrylbase.

Lagring og holdbarhet

3M™ Medipore™ H perforert fikseringstape/-bandasje oppbevares ved normal luftfuktighet ved temperaturer mellom 15 og 30° C. Kan lagres i 3 år.



Bruksområder

- Feste av kompresser over operasjons- og kroniske sår
- Spesielt godt egnet på ujevne og bevegelige områder
- Der det forventes hevelse eller bevegelse etter operasjon
- På tynn, følsom hud eller ved gjentatt bandasjering
- Til feste av katetre og annet utstyr

Bruerveiledning


1. Sett tape og bandasjer på ren, tørr hud fri for kjemikalier og fett
2. Fest den fra midten og utover, og gni eller trykk etter applikering for å oppnå maksimal klebeevne
3. Ikke sett tape og bandasjer på med strekk! Strekk kan skade huden
4. Se også vår brosjyre "Tape teknikker/Tips om tape"



Ny og forbedret: Svært god klebeevne og ekstra hudvennlig

Perforert fikseringstape/-bandasje på rull

3M™ Medipore™ H Fikseringstape

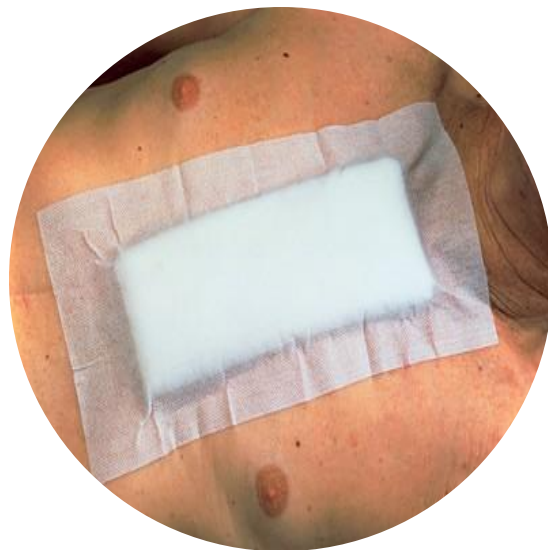

BR53-NO66-4-0/2012-03

3M-produktnr.	Størrelse	Antall/eske
2861	2,5 cm x 9,1 m	24
2862	5 cm x 9,1 m	12
2863	7,5 cm x 9,1 m	12
2864	10 cm x 9,1 m	12
2866	15 cm x 9,1 m	12
2868	20 cm x 9,1 m	6

3M Norge A/S

Avd. Helseprodukter
Postboks 100, 2026 Skjetten
Tel: 0 63 84
Faks: 63 84 17 88
www.3m.no/helse

