


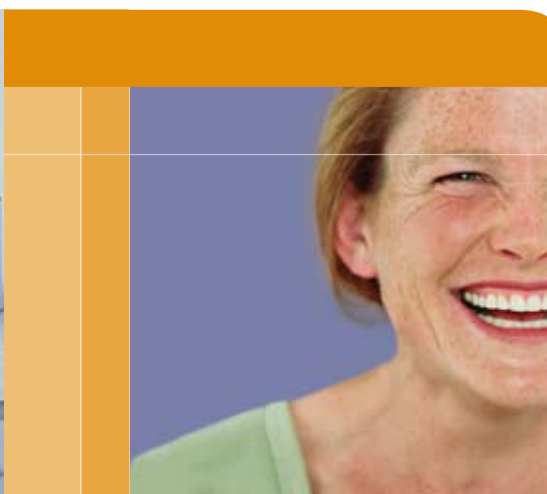

Duschbart förband

Skyddar mot bakterier

Tegaderm™ + Pad är en tunn, elastiskt och semipermeabel polyuretanfilm med absorberande dyna. Förbandet är duschbart och skyddar mot bakterier. Används bl a som postoperativt förband på kirurgiska sår.

Tegaderm™ + Pad

Polyuretanfilm

Egenskaper

- **Ramsystem** - säkrar en aseptisk hantering samt förebygger spännblåsor
- **Elastisk** och bekväm- Tegaderm™ + Pad är följsam vid ödembildning och över leder. Följsamheten gör förbandet komfortabelt för patienten.
- **Transparent** - Tillåter inspektion av av sår eller underliggande förband, absorption samt huden runt såret utan att lyfta förbandet.
- **Semipermeabel** - Tegaderm™ + Pad är genomsläpplig för fukt och syre, vilket låter huden "andas" och bibehålla sin naturliga fuktighet. Förbandet släpper inte igenom bakterier och vätskor vilket ger en barriär mot kontamination och ett skydd mot maceration.
- **Hudvänligt häftämne** - Täcker hela ytan av filmen för en säker fixering. Lämnar ej häftämnesrester på huden.
- **Ikke vidhäftande sårdyna**

Applicering

Snabb och enkel applicering med Tegaderm™ + Pad ramsystem.

Applicering med ramsystemet säkrar en bra fixering av förbandet samt minimerar risken för mekaniska hudskador som t ex spännblåsor.

Välj en förbandsstorlek anpassad efter såret. Förbandet bör gå ca 2,5 cm utanför såret på omkringliggande hud. Tegaderm™ + Pad kan sitta upp till 7 dagar.

1. Håll förbandet i fliken på sidan och dra bort skyddspappret från baksidan. Håll förbandet över såret med den häftande sidan nedåt. Undvik att sträcka eller dra i förbandet.
2. Tryck försiktigt förbandet på plats och stryk med handen från mitten och utåt.
3. Avlägsna ramen samtidigt som du pressar lätt på förbandet för att säkerställa en god vidhäftning av kanten på förbandet.

Indikationer:

- Lätt till måttligt vätskande sår
- Postoperativt förband
- Små incisioner; artroskopi, laparaskopi
- Sårskador
- Skrubbsår
- Ytliga brännskador
- Täckförband



- **Det pålitliga varumärket Tegaderm™**
- **Enkel och säker fixering med ramsystem**
- **Duschbart**



Hälsovård
3M Svenska AB
191 89 SOLLENTUNA
Tel: 08-92 21 00 vxl
Fax: 08-92 22 89
www.3M.com/se

Beställningsinformation

Art nr	Storlek	Sårdyna	Ant/fp	Fp/lev fp
3582	5 x 7 cm	2,5 x 4 cm	50	4
3584	6 x 10 cm	2,5 x 6 cm	50	4
3586	9 x 10 cm	4,5 x 6 cm	25	4
3587	9 x 10,5 cm	4,5 x 6 cm (oval)	25	4
3589	9 x 15 cm	4,5 x 10 cm	25	4
3590	9 x 20 cm	4,5 x 15 cm	25	4
3591	9 x 25 cm	4,5 x 20 cm	25	4
3593	9 x 35 cm	4,5 x 30 cm	25	4