




# Tegaderm™ Alginate

## Alginatbandasje

Tegaderm™ Alginate er en høyabsorberende  
kalsiumalginatbandasje som brukes på middels til kraftig  
væskende sår.

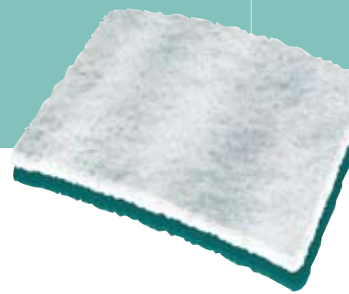

# Tegaderm™ Alginate

## Alginatbandasje

### Egenskaper

Tegaderm™ Alginate er en høyabsorberende kalsiumalginatbandasje som brukes på middels til kraftig væskende sår.

Bandasjen består av non-woven materiell utvunnet fra brunalger. Når bandasjen kommer i kontakt med sårvæske dannes en fuktighetsbevarende og beskyttende gele. Bandasjen absorberer sårvæske og lukker den inn i bandasjen. Gir et fuktig sårhelingsmiljø hvilket fremskynder sårheling.

Når bandasjen absorberer sveller den ikke opp, men beholder sin opprinnelige struktur, og er enkel å fjerne.

Tegaderm™ Alginate inneholder mye kalsium hvilket gir en blodstillende effekt i såret.

- Høy absorberingsevne
- Danner en fuktighetsgivende gele
- Blodstillende effekt

### Påføring

Velg en størrelse som er tilpasset såret. Bandasjen kan klippes og tilpasses, men bør ikke være større enn 0,5 cm en sårets ytterkanter.

Påfør bandasjen i såret, pakkes løst og dekk så til med en passende bandasje, feks Tegaderm™ Film.

Tegaderm™ Film tillåter inspeksjon gjennom forbandet och skyddar mot bakterier och vatten och är duschbart. Låt täckförbandet gå ca 2,5 cm utanför sårkanten.

### Indikasjon

Middels til kraftig væskende sår.

- Trykksår
- Fotsår hos diabetiker
- Venøse og arterielle sår
- Postoperative sår/kirurgiske sår
- Infiserte sår
- Blødende sår
- Transplantasjonsområder



Hälsovård  
3M Svenska AB  
191 89 SOLLENTUNA  
Tel: 08-92 21 00 vxl  
Fax: 08-92 22 89  
[www.3M.com/se](http://www.3M.com/se)