


Melgisorb® Plus

Høyabsorberende alginatbandasje

Melgisorb Plus er en høyabsorberende bandasje for middels til kraftig væskende sår.

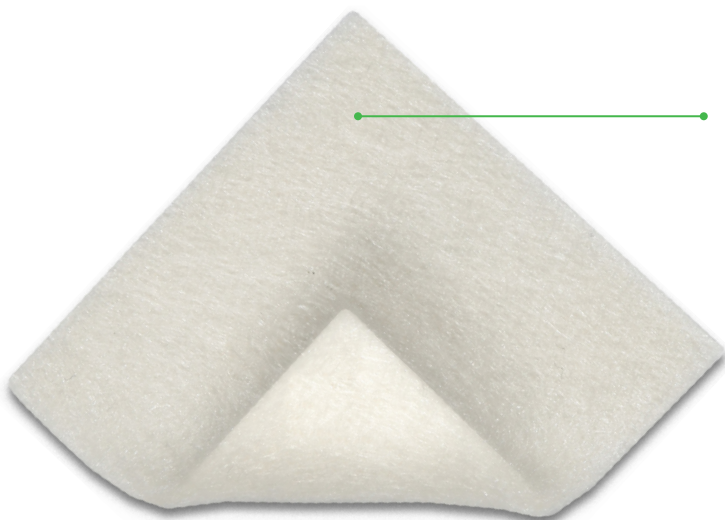


Hydrofile alginatfibrer


Myk og steril bandasje som er produsert i kalsium natriumalginatfibre.

- Høyabsorberende bandasje til middels og kraftig væskende sår
- Høy fiberstyrke muliggjør fjerning i et stykke

Slik brukes Melgisorb® Plus

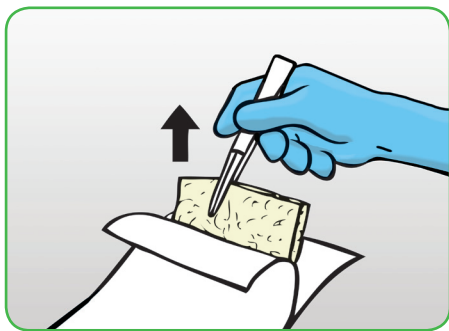


1. Velg en størrelse av Melgisorb Plus som er noe større enn såret. Åpne forpakningen og ta ut bandasjen.

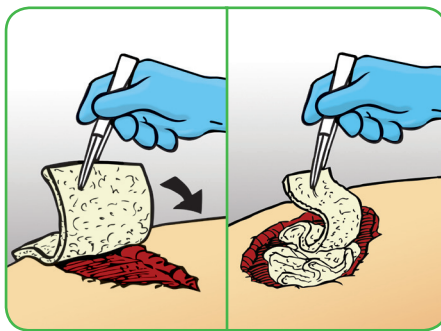

2. Påfør en tørr Melisorb Plus på den fuktige sårkanten.

Overflatesår: Velg en korrekt størrelse av kompress som dekker hele såret.

Dype sår og hulrom: Klipp en passende lengde tamponade og plasser dette løst i såret.

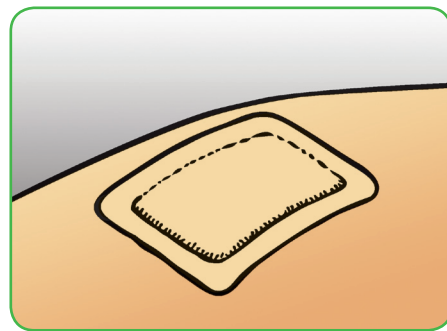

3. Dekk og fiksér Melgisorb Plus med en passende ytterbandasje som for eksempel Mepilex® Border.

Kompressjonsterapi kan kombineres med Melgisorb Plus.

Slik fungerer Melgisorb Plus

Melgisorb Plus absorberer store mengder sårveske. Ved absorbasjon danner alignatfibrene en myk fuktighetsgivende gel, og skaper et fuktig miljø som fremmer sårhelingen. Geleen kan lett skylles bort med vanlig koksaltløsning.

Fordeler med Melgisorb Plus

- Høyabsorberende
- Danner en gele (en natriumløsning) ved kontakt med sårveske
- Fester ikke på sårflate når gele er dannet
- Passende for hulrom
- Minskar risken for maserasjon
- Opprettholder fuktigs sårmiljø
- Myk og formbar
- Kan klippes til ønsket form
- Framkaller ikke allergier

Merk

Melgisorb Plus skal ikke brukes på tørre sår eller tredje grads brannskader.

Ved kliniske tegn på infeksjon kan Melgisorb fortsatt brukes dersom passende infeksjonsbehandling iverksettes.

Bruksområde

Melgisorb Plus kan brukes på ulike typer av middels til kraftig væskende sår som:

- Trykksår
- Bensår
- Fotsår hos diabetiker
- Transplantasjonsområder
- Kirurgiske sår
- Traumatiske sår

Melgisorb Plus finnes både som kompresser og tamponade.

Melgisorb Plus leveres sterile og i enkeltforpakning

