

# Mepore® Film

## Pustende, transparent selvheftende filmbandasje

Mepore Film er en transparent, selvheftende filmbandasje ideell som sekundær fikseringsbandasje og som primær bandasje for en rekke rene sår.

Mepore Film er enkel å applisere.

Beskyttelsesfoil og papirramme for enkel applisering



Transparent, pustende og elastisk polyuretanfilm for pasientkomfort og optimalisert sårhelingsmiljø

Virus- og bakterietett film for sikkerhet og beskyttelse

Hudvennlig polyakrylatlim for sikker- og skånsom fiksering

### Slik fungerer Mepore Film

Mepore Film former seg etter kroppen. Bandasjen beskytter såret mot virus og bakterier, og er dusjett. Gjennomsiktigheten gjør det enkelt å inspisere såret og/eller huden rundt, og gjør det mulig å senke skiftefrekvensen på en sikker måte.


### Bruksområder

Mepore Film brukes med fordel til fiksering av andre bandasjer som for eksempel hydrogeler, alginater og skumbandasjer. Mepore Film er også utviklet for en rekke rene sår i granulasjonsfasen, som for eksempel:


- Overfladiske brannskader
- Hudavskrapninger
- Småskader
- Donorflater
- Overfladiske trykksår
- Lukkede operasjonssår
- Hudbeskyttelse

Andre bruksområder kan være: fiksering av IV kanyler som SVK eller IV kanyler for barn.


### Hvordan bruke Mepore Film

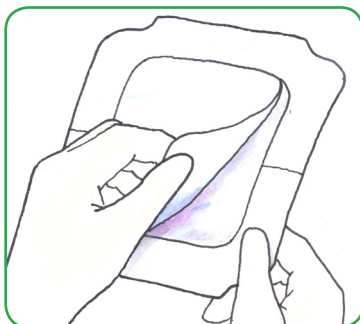

For størrelsene 10x25cm og 15x20cm:  
Fjern det midterste beskyttelsespapiret.

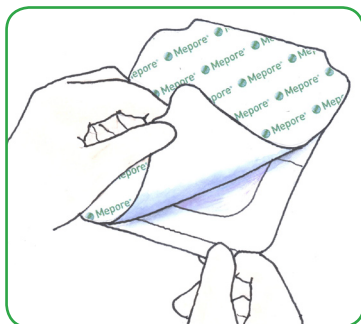

Fjern beskyttelsespapiret (med Mepore logo) slik at hefteflaten kommer til syne.

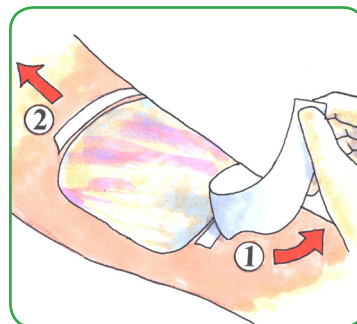

Tilpass bandasjen med hånden. Fjern papirrammen. Fjern også sidestriplene. Ikke strekk bandasjen ved applisering!

### Fordeler med Mepore Film

- Pustende
- Enkel å applisere, også ved bruk av hansker
- Minimerer risikoen for skade på nydannet vev
- Former seg etter kroppen
- Hudvennlig lim
- Sikker fiksering
- Opprettholder et fuktig sårmiljø
- Virus- og bakterietett, og lager en barriere mot lekkasje
- Væsketett

### Forholdsregler

Mepore Film må ikke brukes på delhudskader som går inn til muskler, sener eller ben, eller på tredjegrads forbrenninger. Mepore Film må ikke appliseres på pasienter som reagerer på akrylatlim.



### Sortiment

Art.nr.	Str. i cm	Antall i eske	Antall i kartong
270600	6 x 7	100	400
271500	10 x 12	50	200
272500	10 x 25	20	100
273000	15 x 20	10	80
273500	20 x 30	5	30

Mepore Film er pakket i sterile enhetspakninger

Mölnlycke Health Care  
Postboks 6229, Etterstad  
0603 Oslo  
Telefon: 22 70 63 70  
www.molnlycke.com

