


Mepilex® Ag


Antimikrobiell myk silikon skumbandasje

Absorberende skumpute:

- Absorberer eksudat
- Former seg etter kroppen

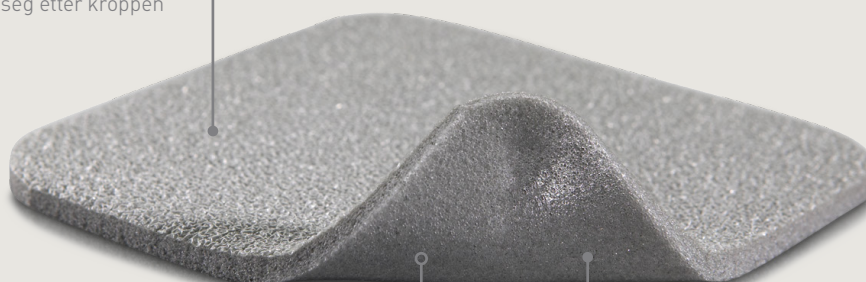

- Antimikrobiell virkning innen 30 minutter og opptil 7 dager¹

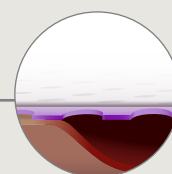

Safetac® teknologi


Safetac er en unik og patentert hefteteknologi som minimerer smerte for pasienten og skade på såret. Safetac finnes kun i bandasjer fra Mölnlycke Health Care, slik som Mepilex Border Post-Op, Mepilex- familien, Mepitel, Mepiform og Mepitac.

- Atraumatisk mot såret og omkringliggende hud ved fjerning²
- Hefter skånsomt til tørre overflater som hud, men ikke til fuktige sårflater³
- Minimerer risikoen for maserasjon ved å danne en barriere rundt sårkantene⁴
- Føyer seg etter hudens konturer




- Rask og vedvarende antimikrobiell virkning¹
- Atraumatisk mot såret og omkringliggende hud²
- God væskehåndtering


Hvordan bruke Mepilex® Ag

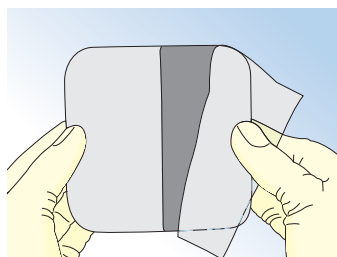

Rens sårområdet med saltvann eller vann avhengig av standard kliniske prosedyrer. Tørk huden godt.

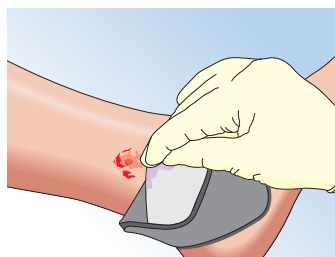

Fjern releasefilmen og appliser den heftende siden mot såret. Ikke strekk. Mepilex Ag bør overlape omkringliggende hud med minst 2 cm. Om nødvendig kan Mepilex Ag klippes og tilpasses ulike sårformer og plasseringer.

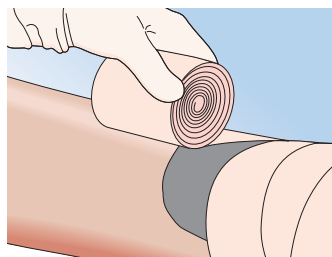

Fikser Mepilex Ag med en bandasje eller annen fiksering, som for eksempel Tubifast.

Slik fungerer Mepilex Ag

Mepilex Ag er en antimikrobiell myk silikon skumbandasje som absorberer eksudat og opprettholder et fuktig sårmiljø. Mepilex Ag inaktiverer sårrelaterte patogener innen 30 minutter med vedvarende effekt opptil 7 dager. Ved å redusere antall mikroorganismer kan Mepilex Ag også redusere odør.

Bruksområder

Mepilex Ag egner seg til en rekke lite til moderat væskende sår, som for eksempel: legg- og fotsår, trykksår, delhudsbrannskader. Mepilex Ag kan brukes under kompresjonsbehandling.

Når bruke Mepilex Ag

Dersom såret er kritisk kolonisert eller infisert påvirkes sårhelingen. Mepilex Ag anbefales i den hensikt å raskt redusere bakteriefloraen. Bruk Mepilex Ag på sår som ikke heler normalt og viser tegn til infeksjon eller kritisk kolonisering.

Forbehold

- Må ikke brukes på pasienter som reagerer på sølv.
- Bruk ikke Mepilex Ag under strålebehandling eller undersøkelser som for eksempel røntgen, ultralyd, diatermi eller MR.
- Bruk ikke Mepilex Ag i kombinasjon med oksiderende midler som hypokloride løsninger eller hydrogenperoxid.

Mepilex Ag sortiment (er pakket i sterile enhetspakninger)

Art.nr.	Str. i cm	Antall i eske	Antall i kartong
287110	10 x 10	5	70
287210	10 x 20	5	45
287310	15 x 15	5	35
287410	20 x 20	5	25
287510	20 x 50 cm	2	12
Mepilex Heel Ag			
388100	13 x 20	5	25
388300	15 x 22	5	30

Referanse: 1. Taherinejad and Hamberg. Antimicrobial effect of silver-containing foam dressing on a broad range of common wound pathogens. Poster publication, WUWHS 2008. 2. White R., A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008; Vol 4, No 1. 3. Dykes PJ et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. J Wound Care 2001; 10(2):7-10. 4. Dykes PJ. The effect of adhesive dressing edges on cutaneous irritancy and skin barrier function. J Wound Care 2007; 16(3):97-100



For mer informasjon, se www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care, Postboks 6229, Etterstad, 0603 Oslo. Telefon: 22 70 63 70
The Mölnlycke Health Care name and logo, Safetac and Mepilex are registered trademarks of Mölnlycke Health Care AB.