



DET EFFEKTIVA ABSORBERANDE SKUMFÖRBANDET


- Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte^{1,2}
- Skonsam vidhäftning och behagligt att bära
- Enkelt att applicera och glider inte iväg under fixering
- Mycket formbart och kan enkelt klippas till rätt storlek*

Safetac® yta:

- Minskar smärta och vävnadsskada före, under och efter förbandsbyte¹
- Vidhäftar inte i det fuktiga såret utan endast på den torra huden
- Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration³

Absorberande polyuretanskum:

- Absorberar sårsekret
- Kan användas under kompression
- Formar sig lätt efter kroppens konturer

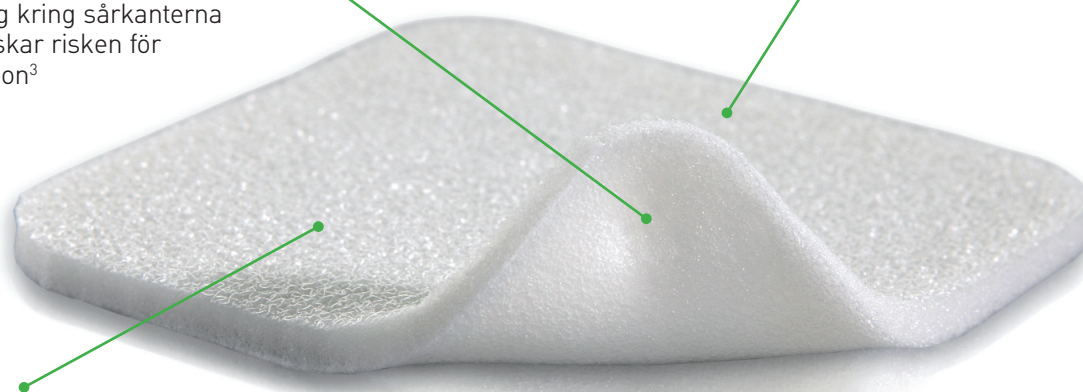

Polyuretanfilm på ovensidan:

- Andningsbar
- Vätsketät
- Skyddar mot virus och bakterier

Safetac[®]
TECHNOLOGY


Safetac® teknologi

*Mepilex behövs inte klippas till sårets storlek vid kompressionsbehandling


Safetac® teknologi. Mindre smärta. Mindre vävnadsskada.™

Safetac är en patenterad vidhäftningsteknologi. Förband med Safetac är skonsamma vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret och på den omkringliggande huden, vilket minskar smärtan för patienten. Safetac finns exklusivt på Mepilex® sortimentet, Mepitel®, Mepiform® och Mepitac® samt andra utvalda förband från Mölnlycke Health Care.

För mer information besök www.safetac.se

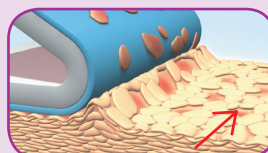


Hudceller dras av (hudstrippning) med traditionell vidhäftning.

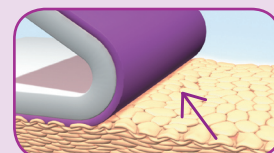

Få eller inga hudceller dras av med Safetac teknologi.


Så här används Mepilex®

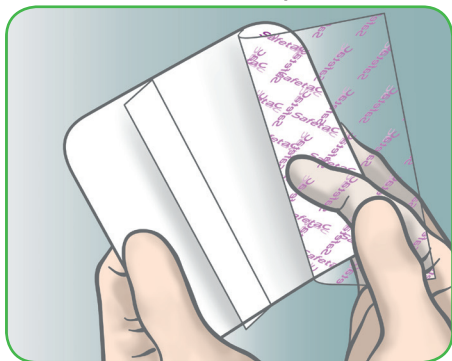

Rengör sårområdet.
Ta bort skyddsfilmerna.



Mepilex ska överlappa den omkringliggande huden med ca 2 cm. Lägg den kläbbiga sidan mot såret. Sträck inte förbandet.

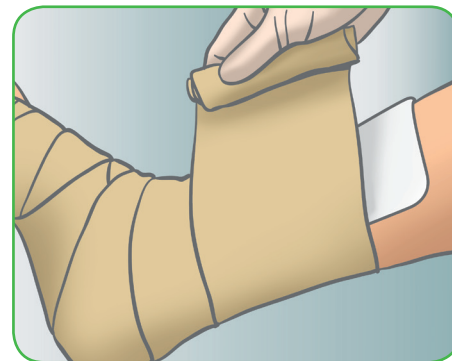

Om nödvändigt, fixera Mepilex med binda eller annan fixeringsprodukt.

Så här fungerar Mepilex

Mepilex är ett mjukt och formbart skumförband som absorberar sårsekret och bibehåller en fuktig sårmiljö. Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar att sårsekret läcker ut på den omkringliggande huden och därmed minskar risken för maceration. Safetac är skonsamt vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret samt på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten.

Fördelar med Mepilex

- Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte
- Frigör båda händerna vilket underlättar applicering av fixeringslösning
- Fungerar bra under kompression
- Förbandet är följsamt och kan enkelt klippas till för att passa områden som är svåra att lägga om
- Skonsam vidhäftning och behagligt att bära
- Kan sitta kvar i flera dagar beroende på sårets tillstånd
- Förbandet kan justeras och återappliceras utan att tappa vidhäftningsförmågan
- Låg risk för hudirritation och allergi

Användningsområden

Mepilex kan användas på ett stort antal sår som t.ex. ben- och fotsår, trycksår, traumatiska- och smärtsamma sår, sår med skadad eller ömtålig hud.

Notera

Vid kliniska tecken på infektion kan man fortsätta behandlingen med Mepilex om lämplig infektionsbehandling inleds.



MEPILEX levereras sterila, enstycksförpackade

Art nr	Storlek cm	Avd fp	Trp fp
294100	10 x 10	5	70
294200	10 x 20	5	45
294300	15 x 15	5	25
294400	20 x 20	5	20
294500	20 x 50	2	12

MEPILEX HEEL levereras sterila, enstycksförpackade

288100	13 x 20	5	25
288300	15 x 22	5	30