



## MYK SILIKON SÅRKONTAKTLAG

- Atraumatisk mot såret og omkringliggende hud ved fjerning<sup>1,2</sup>
- Kan ligge på såret i flere dager<sup>3,4,5</sup> og gir kostnadseffektiv<sup>5,6</sup>- og uforstyrret sårtilheling

### Safetac®-lag (myk silikon)

- Atraumatisk mot såret og omkringliggende hud ved fjerning<sup>7</sup>
- Minimerer risikoen for maserasjon<sup>8</sup>

### Releasefilm

- Beskytter Safetac laget

### Polyamidnett

- Muliggjør applisering av topisk behandling, som for eksempel salver
- Transparent




## Safetac® teknologi

### Safetac® teknologi. Mindre skade. Mindre smerte.™

Safetac er en patentert hefteteknologi som minimerer skade på såret og smerte for pasienten. Safetac teknologi finnes kun i bandasjer fra Mölnlycke Health Care, inkludert Mepilex®-familien, Mepitel®, Mepiform® og Mepitac®.

For mer informasjon se [www.safetac.com](http://www.safetac.com)

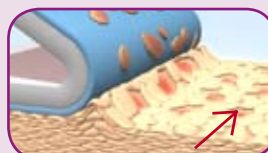


Hudstripping ved bruk av tradisjonelle heftemidler




Ingen hudstripping ved bruk av Safetac


## Hvordan bruke Mepitel®

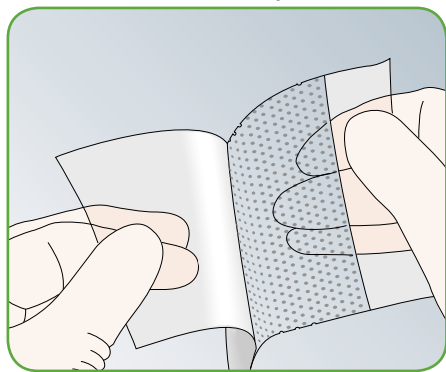

Rens sårområdet. Fjern releasefilmen.

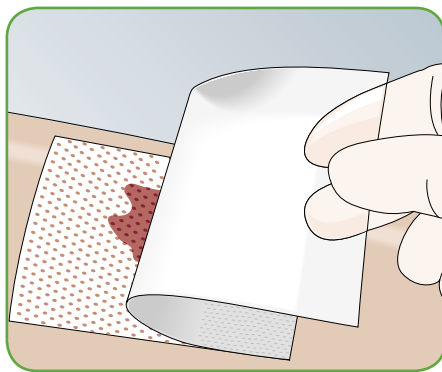

Appliser Mepitel på såret.

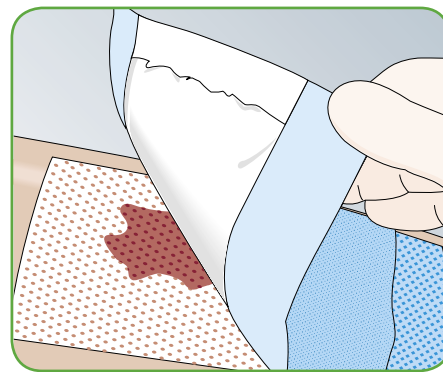

Appliser en sekundær absorberende bandasje.

### Slik fungerer Mepitel

Mepitel kan ligge på såret i flere dager<sup>3,4,5</sup> avhengig av sårets tilstand. Den åpne strukturen gjør at eksudat kan passere ut i en sekundær absorberende bandasje. Mepitel hindrer således den sekundære bandasjen i å feste seg i såret og minimerer dermed skade og smerte ved bandasjeskift. Dette medfører mindre ubehag for pasienten som igjen bidrar til uforstyrret sårtilheling.

### Fordeler med Mepitel

- Fester ikke til en fuktig såroverflate, men skånsomt til omkringliggende hud
- Minimerer skade og smerte ved bandasjeskift
- Kan ligge på i flere dager og sikrer uforstyrret sårtilheling
- Tillater færre bandasjeskift
- Minimerer risikoen for maserasjon
- Hindrer nydannet vev i å bli skadet
- Gjennomsiktighet gjør det lett å inspisere ved applisering og ved bandasjebruk
- Former seg etter kroppen og gir god komfort

### Bruksområder

Mepitel egner seg til en rekke typer sår som for eksempel, hudflenger, hudavskrapninger, kirurgiske snitt, annengrads forbrenninger, blemmer, fiksering av hudtransplantat, diabetiske fotsår og venøse- og arterielle sår.

### Advarsler

Ved bruk av Mepitel på brannskader behandlet med meshedgrafts eller etter ansiktsoperasjoner kan avtrykk (merker) oppstå dersom Mepitel ikke brukes riktig.

### Forholdsregler

- Såret må sjekkes for tegn til infeksjon i henhold til klinisk praksis. Rådfør deg med profesjonelt helsepersonell for en passende medisinsk behandling.
- Ved bruk av Mepitel på brannskader behandlet med meshedgrafts: unngå å legge unødvendig press på bandasjen. Mepitel brukt etter ansiktsoperasjoner: unngå å legge press på bandasjen, reposisjoner bandasjen annenhver dag.
- På blødende sår eller svært væskende sår bør Mepitel dekkes med en fuktig absorberende bandasje.
- Når Mepitel brukes til fiksering av hudflenger og beskyttelse av blemmer, bør ikke bandasjen skiftes før etter fem dager.

### Hva er Safetac teknologi?

Safetac er en patentert teknologi for skånsom men sikker fiksering med myk silikon. Safetac minimerer skade og smerte på såret og omkringliggende hud ved bandasjeskift.



#### MEPITEL Sortiment

Art.nr.	Str. i cm	Antall i eske	Antall i kartong
290510	5 x 7,5	5	10 60
290560	5 x 7,5	2	16/128
290710	7,5 x 10	10	50
291010	10 x 18	10	50
292005	20 x 30	5	30

Mepitel er pakket i sterile enhetspakninger