



EFFEKTIV SELVHEFTENDE BANDASJE FOR ARRBEHANDLING.


- Minsker smerte og vevsskade ved bytte av bandasje^{1,2,3}
- Ikke behov for ekstra fiksering
- Former seg etter kroppens konturer
- Kan brukes under daglige aktiviteter

Safetac® -overflate


- Heftende med mykt silikon
- Minsker smerte og vevsskade ved fjerning¹

Nonwoven baksidefilm


- Pustende
- Vanntett

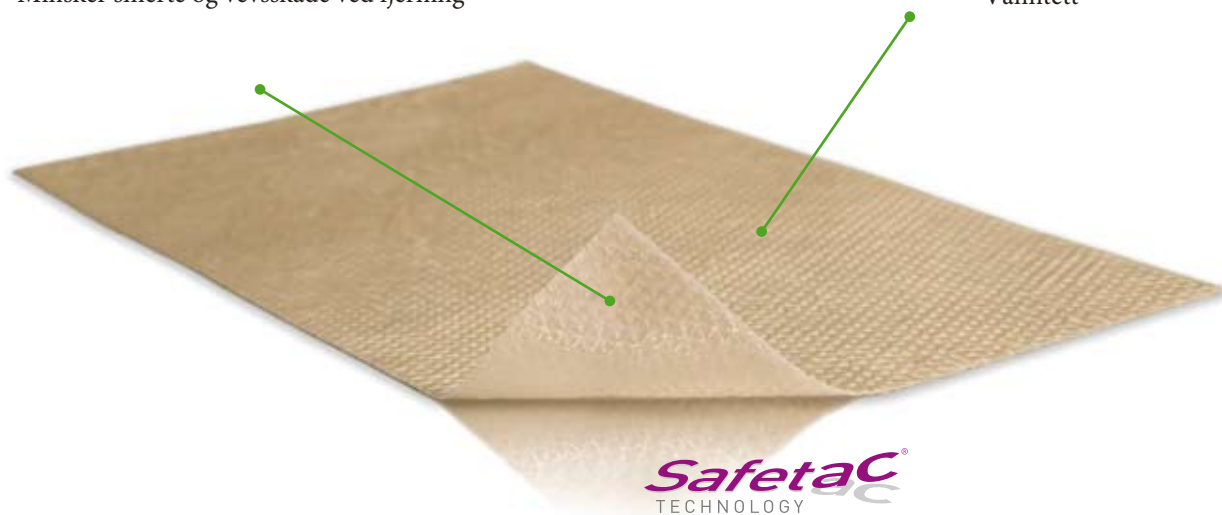


Slik brukes Mepiform®

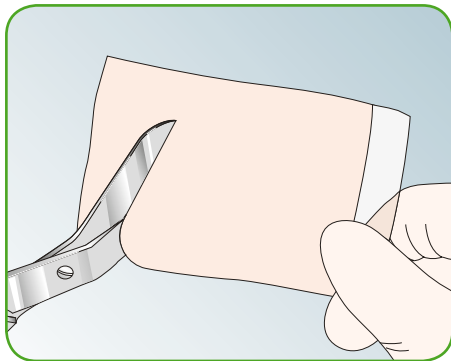

Fjern beskyttelsespapir. Ved behov, klipp ønsket størrelse.

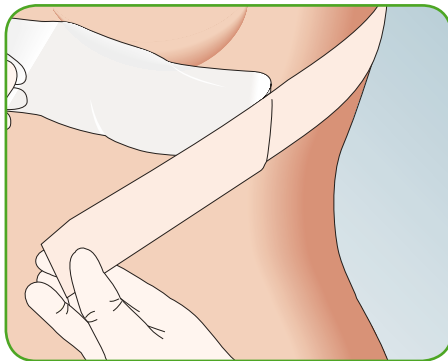

Appliker Mepiform på arret. Sørg for at huden er ren, tørr og fri for salve etc.

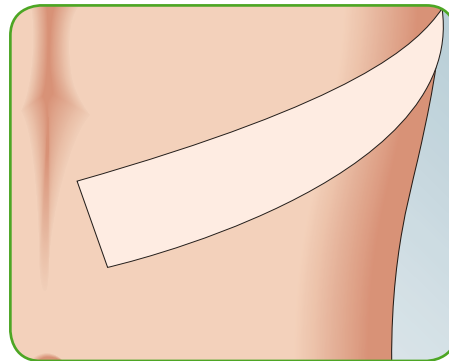

Re-appliker etter daglig rengjøring av arret. Tørk av huden før Mepiform settes på igjen.

Slik fungerer Mepiform

Silikon har en dokumentert positiv påvirkning på hypertrofiske arr og keloider.^{4,5} Det kan ta 3-12 måneder å forbedre gamle arr, avhengig av arrevevets tilstand. For optimal effekt skal Mepiform brukes 24 timer per dag. Det er anbefalt at Mepiform tas av en gang om dagen, f.eks. ved dusj eller bad, dette for å innsisere og vaske huden. For profylaktisk behandling, skal Mepiform brukes 2-6 måneder, avhengig av hudens tilstand.

Fordeler med Mepiform

- Minsker smerte og vevsskade ved bandasjebytte
- Ingen ekstra fiksering er nødvendig
- Tynn, flexibel og diskret
- Kan brukes ved daglige aktiviteter
- Kan re-applikeres etter fjerning
- Mepiform kan sitte på i flere dager
- Mepiform har en solfaktor på UPF 5⁶

Bruksområde

- Gamle og nye, røde og opphøyde hypertrofiske arr og keloider
- Forseglede sår som kan forhindre dannelse av hypertrofiske eller kelloide arr

Merk

Om masjerasjon eller rødhet skulle oppstå, la huden hvile til symptomene er borte. Fortsett med behandling og øk behandlingstiden gradvis per dag.

