




Selvheftende fiksering

Mefix er den ideelle fiksering for bandasjer, kateter og slanger.
Den gir en sikker og skånsom fiksering.

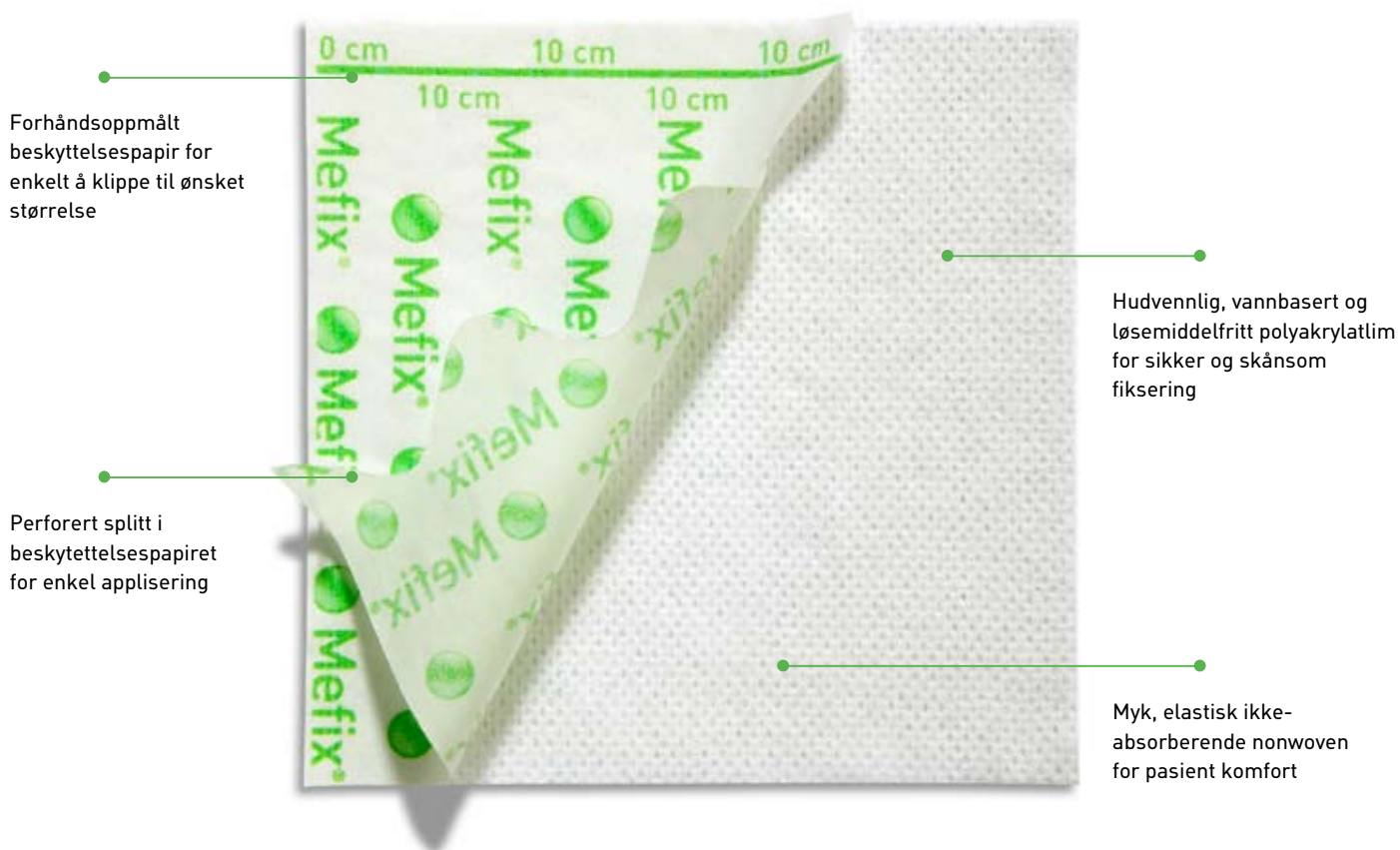

Slik fungerer Mefix

Den porøse strukturen i nonwovenmaterialet gjør at luft og vann slippes igjennom. Materialet er tøyelig, former seg etter kroppen og gjør at pasienten kan bevege seg. Materialet er ikke-absorberende og lager en barriere mot blod- og væskegjennomtrengning. Det vannbaserte polyakrylatlimet er skånsomt mot huden, men gir likevel en sikker fiksering. Beskyttelsespapiret

er forhåndsoppmålt i 10cm intervaller, og har en perforert splitt. Mefix kan enkelt klippes til ønsket fasong og størrelse.


Bruksområder

Mefix kan brukes i mange situasjoner hvor fiksering er påkrevet, inkludert fiksering av bandasjer, kateter og slanger.


Hvordan bruke Mefix



Klipp til ønsket størrelse.

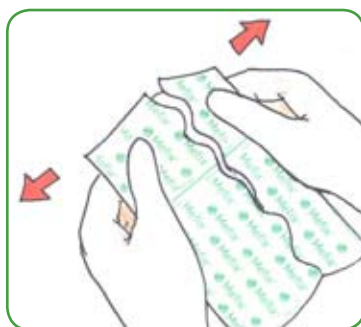

Trekk de to delene av beskyttelsespapiret fra hverandre og fjern den smaleste delen.

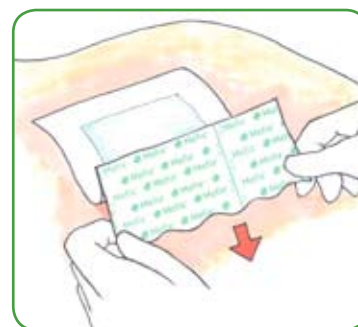

Appliser fikseringen og fjern resten av beskyttelsespapiret. Tilpass fikseringen skånsomt med hånden for å oppnå optimal heftefunksjon. Ikke strekk Mefix ved applisering.

Fordeler med Mefix

- Hudvennlig, vannbasert og løsemiddelfritt lim
- Forhåndsoppmålt beskyttelsespapir for enkelt å klippe til ønsket størrelse
- Former seg etter kroppen
- Luftgjennomslippelig
- Kan damp- og Eto steriliseres

Forholdsregler

Mefix bør ikke strekkes under applisering, da friksjon kan forårsake hudskader. Dette er spesielt viktig ved applisering over ledd.



Mefix er tilgjengelig i usterile ruller på 10 og 2,5 meter i dispensereskler

Art.nr.	Bredde i cm	Antall esker per kartong
10 meters ruller		
310250	2,5	39
310500	5	20
311000	10	20
311500	15	20
312000	20	10
313000	30	10
2,5 meters ruller		
310570	5	36
311070	10	18
311570	15	12