

Mepilex® Border Ag

DEN EFFEKTIVE, ANTIMIKROBIELLE, ABSORBERENDE ALT-I-ETT SKUMBANDASJEN

- Minimerer skade og smerte ved bandasjeskift^{1,2,3}
- Hurtig og vedvarende antimikrobiell virkning⁵
- Effektiv væskehåndtering
- Sikker fiksering, men likevel atraumatisk ved fjerning

Polyuretan baksidefilm

- Pustende
- Dusjtett
- Bakterie - og virusbarriere*

Safetac® teknologi

- Minimerer skade og smerte, under og etter bandasjeskift¹
- Hefter til tørr hud, men ikke til det fuktige såret³
- Minimerer risikoen for maserasjon ved å danne en barriere rundt sårkantene⁴

Absorberende skumpute med flere lag

- Hydrofilt polyuretanskum med sølv, absorberer og sprer sårvesken samtidig som sølvet frigis
- Fiberlag for maksimal oppsamling

Safetac
TECHNOLOGY

- Antimikrobiell effekt innen 30 minutter og opptil 7 dager³


* Mikroorganismer større enn 25 nm

Safetac® teknologi


Safetac® teknologi. Mindre skade. Mindre smerte.

Safetac er en patentert hefteteknologi som minimerer skade på såret og smerte for pasienten. Safetac teknologi finnes kun i bandasjer fra Mölnlycke Health Care, inkludert Mepilex® - familien, Mepitel®, Mepiform® og Mepitac®.

For mer informasjon www.safetac.com

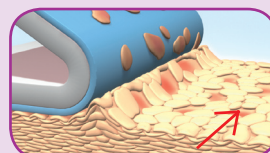


Hudskade ved bruk av tradisjonelle heftemidler

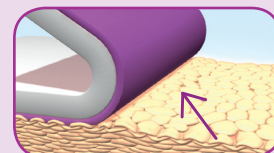


Ingen hudskade med Safetac teknologi

Hvordan bruke Mepilex® Border Ag

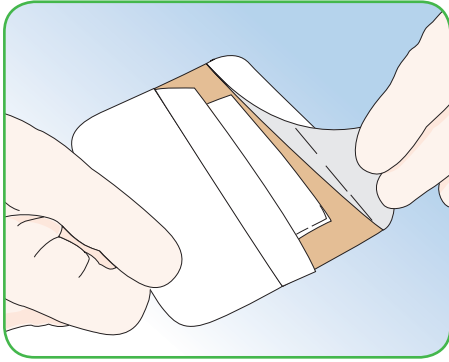

Rens sårområdet.
Fjern releasepapiret.

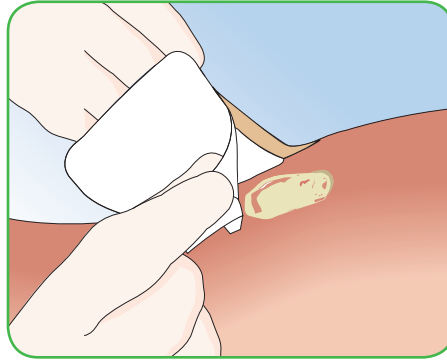

Appliser den heftende siden mot såret, ikke strekk.


Slik fungerer Mepilex Border Ag

Mepilex Border Ag er en antimikrobiell alt-i-ett skumbandasje som effektivt absorberer og holder på sårvesken og et fuktig sårmiljø. Safetac forsegler sårkantene og hindrer at sårveske lekker ut på omkringliggende hud. Dermed forhindres maserasjon. Safetac sikrer at bandasjen kan skiftes uten å skade den omkringliggende huden og uten å utsette pasienten for mer smerte.

Mepilex Border Ag inaktiverer sårrelaterte patogener innen 30 minutter med vedvarende effekt opptil 7 dager. Ved å redusere antall mikroorganismer kan Mepilex Border Ag også redusere ødør.

Fordeler med Mepilex Border Ag

- Minimerer skade og smerte ved bandasjeskift
- Selvheftende – ikke behov for fiksering
- Dusjtett
- Kan brukes under kompresjon
- Komfortabel i bruk
- Kan ligge på såret i opptil syv dager avhengig av sårets tilstand
- Kan løftes og justeres uten å miste den heftende egenskapen
- Liten risiko for hudirritasjon og allergi

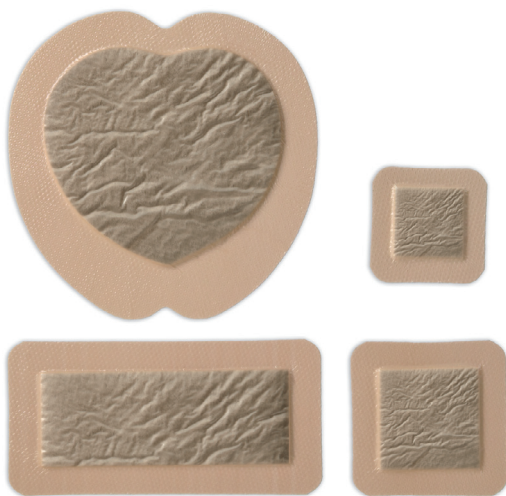

Bruksområder

Mepilex Border Ag egner seg til en rekke medium til svært væskende sår som for eksempel: Legg- og fotsår, trykksår, maligne sår, delhudsbrannskade, traumatiske og kirurgiske sår der et fuktig sårmiljø, væskehåndtering, enkel fiksering og en antimikrobiell effekt er ønsket.

For detaljert informasjon se pakningsvedlegget.



MEPILEX BORDER AG SORTIMENT

Mepilex Border Ag er pakket i sterile enhetspakninger.

| Art. nr. | Str. i cm | Antall i eske | Antall i kartong |
|--------------------------|-----------|---------------|------------------|
| 395200 | 7,5 x 7,5 | 5 | 70 |
| 395300 | 10 x 10 | 5 | 50 |
| 395400 | 15 x 15 | 5 | 50 |
| 395600 | 15 x 20 | 5 | 45 |
| 395800 | 10 x 20 | 5 | 35 |
| 395700 | 10 x 25 | 5 | 35 |
| 395900 | 10 x 30 | 5 | 25 |
| Mepilex Border Sacrum Ag | | | |
| 382000 | 18 x 18 | 5 | 40 |
| 382400 | 23 x 23 | 5 | 25 |