




Absorberende bandasje med sperresjikt

Mesorb er en myk høyabsorberende bandasje som kan holde på store mengder såreksudat. Den væskeavisende barrieren hindrer at klær og sengetøy tilsøles.

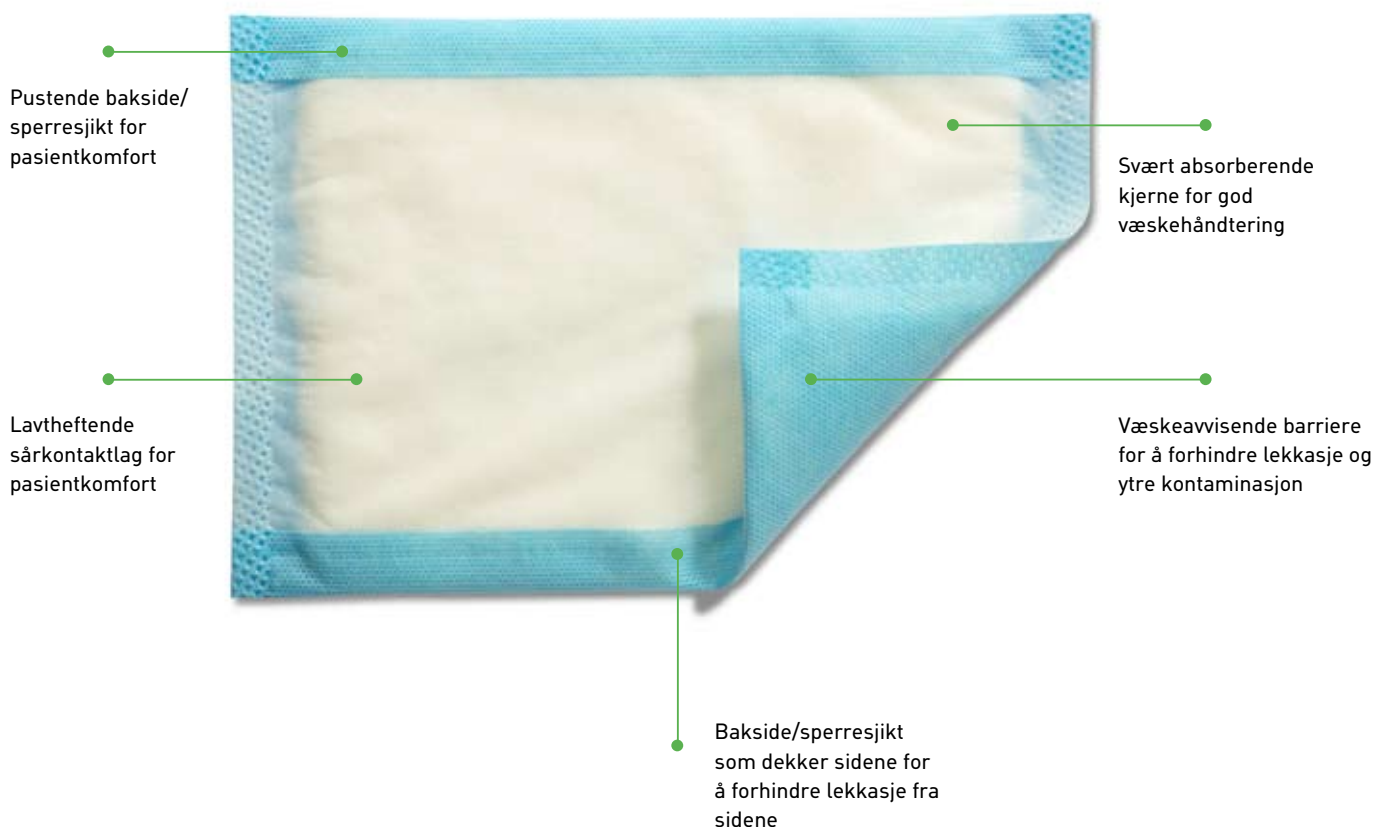

Slik fungerer Mesorb

Sårsekudat absorberes og transporteres inn i Mesorb av sårkontaktlaget og diffusjonslaget. Den svært absorberende kjernen absorberer eksudat, og er samtidig en sårpute med god beskyttelse og ventilasjon. Den væskeavvisende barrieren hindrer ytre kontaminasjon av såret og beskytter klær og sengetøy mot lekkasje av sårsekudat. Baksiden/sperresjiktet forhindrer lekkasje fra sidene.

Bruksområder

Mesorb egner seg for moderat- til sterkt væskende sår. Mesorb kan brukes som primær bandasje (direkte på såret) eller som sekundær bandasje, hvor høy absorpsjon er påkrevet (for eksempel sammen med Mepitel eller Mepilex Transfer).


Hvordan bruke Mesorb



Åpne pakningen. Ta ut bandasjen.



Appliser Mesorb på såret eller på valgt primærbandasje med minst 1cm overlapping til omkringliggende hud.

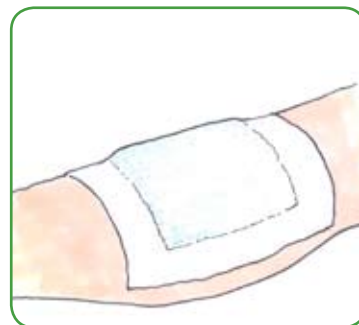

Appliser en passende fiksering (for eksempel Mefix, Mepore Film eller Tubifast).

Skiftefrekvens

Mesorb kan ligge på i mange dager, avhengig av sårets tilstand eller som avtalt med kyndig helsepersonell.

Fordeler med Mesorb

- Absorberer store mengder væske
- Beskyttende pute
- Pustende
- Kostnadseffektiv
- Den unike væskeavvisende barrieren reduserer skiftefrekvensen og forhindrer at klær og sengetøy tilsøles



Forholdsregler

Ved mistanke om infeksjon bør kyndig helsepersonell kontaktes.

Sortiment

Art.nr.	Str. i cm	Antall i eske	Antall i kartong
677001	10 x 10	50	400
677201	10 x 15	50	300
677401	10 x 20	50	300
677601	15 x 20	50	300
677701	20 x 25	30	120
677801	20 x 30	30	120

Mesorb er pakket i sterile enhetspakninger