

Corega Ultra Creme 40 ml



Produktinformasjon

Med Corega Ultra Creme festes tannprotesen raskt. Den har en ekstra sterk festeevne og god støtdempende effekt, slik at du kan føle deg trygg og komfortabel hele dagen. Corega Ultra Creme er spesielt tilpasset for deg som lett får gnagsår i munnen eller har følsomme slimhinner.

Corega Ultra Creme er lett å påføre og hindrer mat i å trenge inn mellom protesen og gommen.

- Gjør klar protesen ved å vaske den grundig med lunkent vann. Tørk den godt.
- Legg kremen på protesen i tynne striper eller som flere prikker, men ikke for nær kanten av protesen. Start med en liten mengde av produktet. Ønsker du at den skal sitte bedre, legger du på en større mengde.
- Press protesen på plass og hold den fast i noen sekunder.
- Når du tar ut protesen på kvelden, bør det meste av festemiddelet være oppløst.
- Hvis det sitter igjen mye festemiddel på protesen, kan du i framtiden redusere mengden.

Varemerke: Corega

Kategori: Munn & Tenner > Tannprotese & bittskinne

Forpakningsstørrelse: 40 ml