

# Prontosan®

For skylling og rens av sår med biofilm

## Bruksanvisning

### Egenskaper:

- Løser opp og fjerner biofilm, cellerester, nekrotisk vev mm
- Beskytter granulasjonsvev og epitelisering
- Forebygger infeksjon
- Sikrer et sår miljø som fremmer sårheling
- Reduserer lukt svært raskt og er smertefri for pasienten
- Kan brukes sammen med alle typer bandasjer
- Økonomisk fordelaktig da sårbehandlingstiden reduseres vesentlig
- Prontosan er holdbar i opptil 8 uker etter at pakning er åpnet
- For repeterende og langvarig bruk

### Indikasjon:

- For fjerning av biofilm i akutte sår, I og II grads forbrenning, stråleskadet hud samt sår grunnet kjemiske skader.
- For å redusere risiko for infeksjon i såret
- For å løsne bandasjer som har festnet i såret

### Produktbeskrivelse:

- Luktfri, steril, bruksklar løsning bestående av Polyhexanid (PHMB) og Betain
- Dermatologisk uskadelig
- Høy vestoleranse, også hos allergikere
- CE-merket, Klasse III – medisinteknisk produkt

## Wound Bed Preparation med Prontosan®

### Optimal forberedelse


Såret skylles raskt med Prontosan for å ta bort løst belegg. Væt en kompress med løsningen la den ligge over såret i 10–15 minutter. Avslutt med å tørke av såret med en kompress. Om den gamle bandasjen sitter fast i såret, vørt bandasjen og la middelet virke en liten stund.

### Behandling av overfladiske sår


Etter skylling samt behandling med fuktet kompress, så påføres Prontosan fra flasken før vanlig bandasje settes på. Sårets overflate bør alltid være dekket med et lag gele på 35-mm.

### Behandling av dype sår

Etter skylling med skyllevæske skal den belagte overflaten i det dype såret dekket med et lag gele, minst 3-5mm. Deretter bandasjerer såret som vanlig.

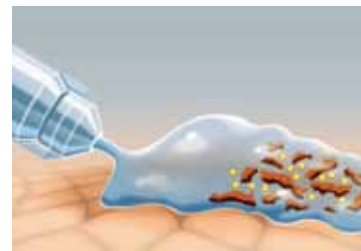

Tensiden Betain i Prontosan® Sårskyllevæske bidrar til en effektiv rensing .

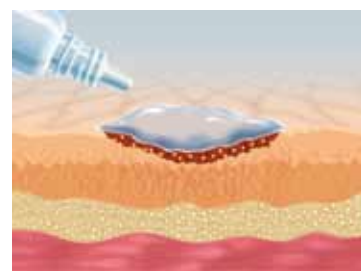

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

**B. Braun Medical AB**  
Box 110  
182 12 Danderyd  
Tfn 08-634 34 00  
Fax: 08-634 34 34  
mail: info.sverige@bbraun.com  
www.bbraun.se