

Prontosan®

For skylling og opprensing av sår med biofilm

Bruksanvisning

Egenskaper:

- Løser opp og fjerner biofilm, cellerester, fibrinbelegg, nekrotiskvev mm
- Beskytter granulasjonsvev og epitelisering
- Forebygger infeksjon
- Sikrer et sårmiljø som fremmer sårheling
- Reduserer raskt lukt og er smertefri for pasienten
- Kan brukes med samtlige bandasjer på markedet
- Økonomisk fordelaktig da sårbehandlingstiden vesentlig reduseres
- Prontosan er holdbart i opp til 8 uker etter åpnet forpakning
- For gjentatt og langvarig bruk

Indikasjon:

- For fjerning av biofilm i sår som vanskelig gror, akutte sår, I og II grads brannskader, stråleskadet hud samt kjemisk forårsakede sår. Prontosan gel X kan også brukes til III og IV grads brannskader
- For å redusere risikoen for infeksjon i såret
- For å løsne bandasje som har festet i såret

Produktbeskrivelse:

- Luktfri, steril, bruksklar løsning bestående av Polyhexanid (PHMB) og Betain
- Dermatologisk ufarlig
- Høyvevstoleranse, også hos allergikere
- CE-merket, Klasse III – medisin- teknisk produkt

Wound Bed Preparation med Prontosan®

Optimal forberedelse

Såret skylles kortvarig med Prontosan Sårskyllevæske for å fjerne løst belegg. Fukt deretter godt en kompress med Prontosan Sårskylleløsning og la den ligge over såret i 10-15 minutter. Dermed brytes overflatespenningen i biofilmen, slik at opprensingen blir mer effektiv. Avslutt med å tørke av såret med en kompress. Hvis den gamle bandasjen sitter fast i såret, fukt bandasjen og la det virke en kort stund.


Best effekt sees i kombinasjon med etterfølgende bruk av Prontosan Sårigel.

Behandling av overfladiske sår


Etter skyllingen samt behandling med fuktet kompress så påføres Prontosan Sårigel fra den praktiske 30ml flasken hvor den vanlige bandasjen appliseres. Sårrets overflate bør alltid være dekket med et lag av gel på 3–5 mm.

Behandling av dype sår

Etter skylling med skyllevæsken så skal den belagte flaten i det dype såret dekket med et lag på minst 3–5 mm gel. Deretter bandasjeres såret som vanlig. Lokale rutiner og valg av bandasje avgjør når skifte skal skje.

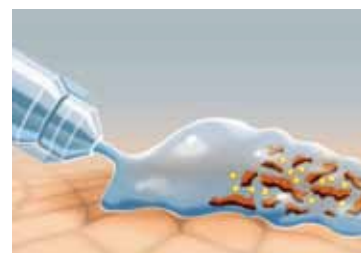

Tensiden Betain i Prontosan® Sårspolväska bidrar till en effektiv opprensning .

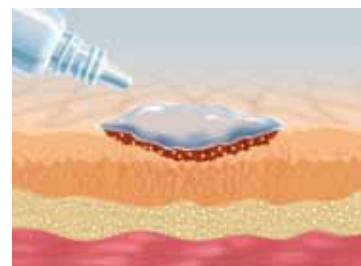

Sortimentsoversikt

Artikkelnr	Produktnavn	Forpakning
400 413	Prontosan® sårskyllevæske, engangsampulle 40 ml	30 x 40 ml
400 415	Prontosan® sårskyllevæske, flaske 350 ml	10 x 350 ml
400 446	Prontosan® sårskyllevæske, flaske 1000 ml (med opphengsanordning i bunn)	10 x 1000 ml
400 515	Prontosan® sårigel 30 ml	20 x 30 ml
400 517	Prontosan® gel X, tub 50 gr	20 x 50 gr
400 508	Prontosan® gel X, tub 250 gr	20 x 250 gr