

Ecoflac® Connect

Et sikkert system for tilberedning
av antibiotika i singeldose



Ecoflac® Plus – Ecoflac® Connect – Intrafix® Safeset.

Enkelhet og sikkerhet – fra tilberedning til infusjon.

Ecoflac® plus

Ved legemiddeltilberedning og administrering stilles høye krav på beholderne som brukes. Sikkerhet kan ikke garanteres før alle komponenter i kjeden tilpasses til hverandre og samvirker for å skape et pålitelig system.

Risikoen for stikkskader og perforasjon av beholderen er betydelig større når en myk beholder med smal, bevegelig injeksjons-/aggregatport håndteres.

Ecoflac® plus står stødig ved tilsatsarbeid, er stabil å jobbe med og har selvlukkende membran.

Beholderen er fremstilt av polyeten (LD-PE), et materiale som er kompatibelt med de fleste kjente substanser. Dokumentasjon finnes tilgjengelig i B. Brauns ConComp® kompatibilitetsdatabase—kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Ecoflac® plus:

- Ikke behov for ytterpose
- Den grove halsen og dobbelporten beskytter deg mot nålstikk
- Sikker og stabil aggregatsetting
- Fungerer som en pose- kollapser under infusjon



1. Central del
Ecoflac® plus



3. Infusion: Int



Intrafix® SafeSet

Intrafix® SafeSet er en unik kombinasjon av sikkerhet og bekvemmelighet.

Prime-Stop forhindrer lekkasje ved fylling av slangen og opprettholder et lukket system fram til at tilkobling til pasienten skjer, derfor kan et flertall infusjoner forberedes uten risiko at dråper renner ut i enden av slangen. Beskyttelseshylsen med hydrofob filter (1,2µ) hindrer væske å lekke ut og minker dermed risikoen for kontaminering.

Air-Stop minimerer risikoen for luftinfusjon, Air-Stop hindrer at luft går ned i slangen når infusjonen er slutt, hvilket stopper luft fra å nå pasienten. Bytte til ny infusjon underlettes takket være Air-Stop, da rulleklemmen ikke må stenges når skifte til ny infusjon skjer. Den unike hydrofile membranen (15µ) i dråpekammeret hindrer at luft går ned i slangen samtidig som det stopper eventuelle partikler.

2. Beredning Ecoflac® Connect



Intrafix® SafeSet



Intrafix® SafeSet:

- Air-Stop:
unngår risiko for luftinfusjon
- Prime-Stop:
 - Automatisk priming
av slangen
 - Lukket system
 - Tidsbesparende
 - Forhindrer lekkasje

Ecoflac® Connect:

- Lukket system:
 - Reduserer pleierelaterte infeksjoner
 - Minsket eksponering av helsepersonell
- Reduserer risiko for
feilmedisinsering:
injeksjonsflasken henger
igjen under
administrering av
legemiddelet.



Ecoflac® Connect

Ecoflac® Connect setter en ny standard ved singeldoseberedning og administrering av f.eks. antibiotika. En integrert toveisventil muliggjør at injeksjonsflasken kan henge igjen under infusjonen uten at tilbakeslag av legemiddelet skjer. Dermed er det lett å identifisere hvilket legemiddel som administreres – noe som reduserer risikoen for feiladministrering.

Ved at injeksjonsflasken sitter fast i Ecoflac® Connect kan hele systemet kasseres i sin helhet etter utført infusjon.

Legemiddeltilberedning

Produkt		Art.nr.	Antall/forp
Ecoflac® plus	Natriumklorid 9 mg/ml	Vnr. 21 4– 61	20 x 100 ml
	Glukose 50 mg/ml	Vnr. 45 10 05	20 x 100 ml
Ecoflac® Connect		4090550	50
Intrafix® SafeSet	180 cm DEHP-fri	4063000	100
	180 cm m. tilb.slagsventil DEHP-fri	4063001	100
	180 cm NTP pvc-fri	4063002	100
	230 cm DEHP-fri	4063003	100
	210 cm m. Safeflow ventil DEHP-fri	4063004	100
	205 cm m. Discofix C 25 cm	4063006	100
	320 cm DEHP-fri	4187989	50
	320 cm NTP pvc-fri	4187890	50



B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

B. Braun Medical AB

Box110, 182 12 Danderyd
Svärdsvägen 21
Tel. 08-634 34 00
e-post: info.sverige@bbraun.com
order.sverige@bbraun.com
www.bbraun.com