

Askina® DresSil

Skumförband med silikonhäfta

Table with 3 columns: Stl., Ant./box, Art.Nr.

Stl.	Ant./box	Art.Nr.
5 x 7cm	10	5295710
10 x 10 cm	10	5291010
10 x 20 cm	10	5291210
15 x 15 cm	10	5291510
20 x 20 cm	5	5292005

The content of this document, in particular the data, the information, the trademarks and the logos are B BRAUN MEDICAL SAS's sole property and are protected under copyright ©2010, B BRAUN MEDICAL all rights reserved. Consequently, all representation and/or reproduction, whether in part or in full, is forbidden and would be considered a violation of B BRAUN MEDICALSAS's copyright and other proprietary rights.

Askina® DresSil

Skumförband med silikonhäfta



Hud och Sårbehandling

FUTURAMA®


For healthcare professional use only.



Askina® DresSil Egenskaper


Phrmförband med vidhäftande silikon

Of . qbhklildf

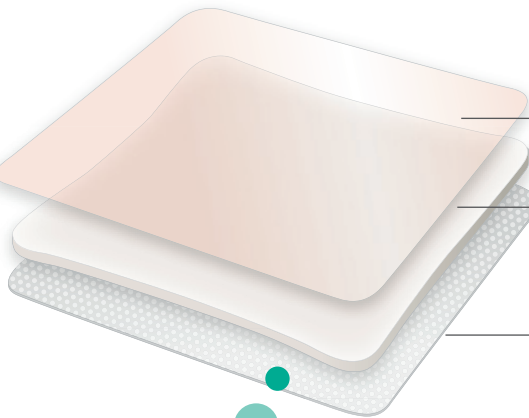

Askina® DresSil är ett skumförband med mjuk vidhäftande silikon på ena sidan och en ånggenomsläpplig, vattentät film på den andra sidan. Askina® DresSil är ett kombinations bandage med hög absorptionskapacitet på skummet och den mjuka vidhäftningen på silikonkontaktlaget.

- 1 Skyddande polyuretanfilm**
Hög andningsförmåga – Vattentät – Bakteriebarriär
- 2 Hydrofilt foamlager**
Reglerar fukten – Mjuk och formbar
Mycket bra absorptionskapacitet
- 3 Silikon vidhäftande lager**
Atraumatiskt – Öppen struktur som låter exudat passera in i absorberande foamen

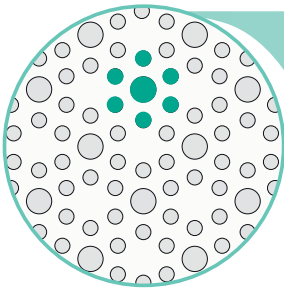


Blommönstret

Det återkommande flommönsterhålen i den belagda vidhäftningen är designad för att underlätta så att exudat fritt kan passera genom till foamen.

- Snabb absorptionskapacitet
- Säker vidhäftning till den omgivande huden
- Bindande effekt av exudat genom hålen innebär minimal risk för läckage

Hro crkdbo^o abq <

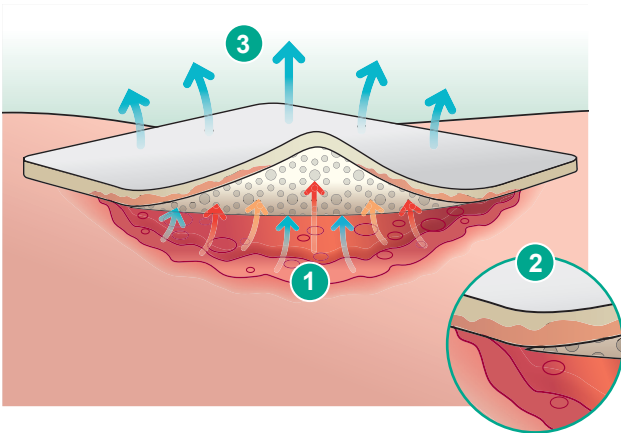

- 1 Exudat** passerar vertikalt in i foamlagret genom silikonlagrets öppna struktur.
- 2 Exudat** absorberas snabbt in i foamlagret och därigenom skapas snabbt en fuktighetsbevarande sårmiljö
- 3 Överskottsfukten** evapoerar genom den semipermeabla polyuretanfilmen


Fördelar för användare

Askina® DresSil

Phrmförband med vidhäftande silikon

>qo^r j ^qfphq _vqb



- Smärtfritt förbandsbyte
- Ingen "stripping" av hudceller under förbandsbyte
- Mindre bekymmer för patienten
- Mjuk vidhäftning på den omkringliggande huden
- Säker vidhäftning

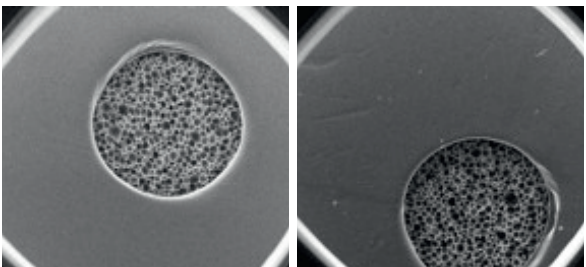

Fkdbk stripping ^s epidermal^ cellbo sfa _loqq^d^kab

Hlkqo liibo^a ^_p lomqflk


- Exudat passerar snabbt genom silikonhäftan till foamen, tack vare utmärkta fukttransporterande egenskaper
- Betydande absorptionsförmåga
- Vertikal fukttransport genom förbandet
- Reducerad risk för maceration av sårkanter

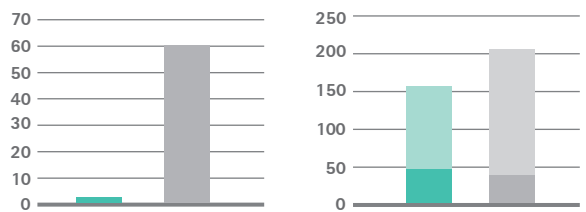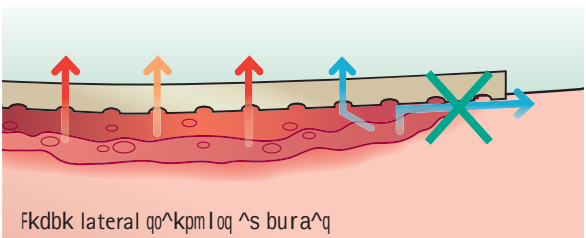

>_p^ qfa & j fk'

Kv pq^ka^oa

- Förbättrad komfort för patienten
- Begränsar behovet av sekundärförband
- Enkel sårövervakning
- Går att fästa på nytt och kan klippas till efter behov
- Formar sig lätt, även på svåråtkomliga ställen

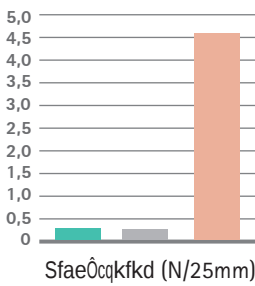

B.Braun, data

>ksôkakfkdp1 j oõabk

?orhp^ksfpkfk

Trycksår


Artäriella bensår

Första och andra gradens brännskador


Venösa sår

Diabetesfotsår


Traumatiska sår

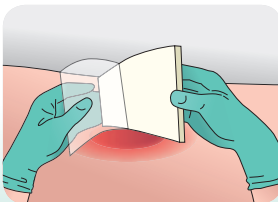

1
Q^ _loq
phvaapci j bk^

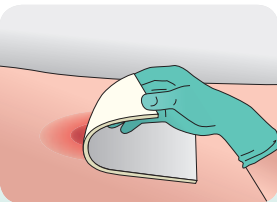

2
Iôdd abk hif _fd^
pfa^k j lq p0obq^
Cão _^kabq ph^ii asbo^
i^mm^ abk l j hofkd^
ifdd^kab erabk j ba ^
/ ^ j^

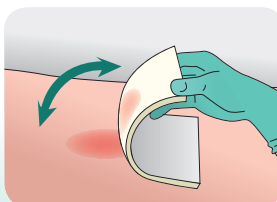

3
Bkhbi _loq^dkfk d cão
^qq hlkqo liibo^ p0obq^
Kôo p0obq ôo iôhq)
q^ _loq cão _^kabq
>phfk^© AobpPfi^