

Uro-Tainer®

Sköljsystem för urinkatetrar



Förebygger och motverkar avlagringar
och infektion i urinvägarna

Uro-Tainer®

-lösningar för underhåll av katetrar

Forskning har visat att 10-12 % av de patienter som läggs in på sjukhus (Crow et al 1988)¹ och 4 % av de patienter som vårdas i hemmet vid något tillfälle har en urinkateter (Getliffe K. 1994)².

Långtidsbruk av kvarliggande katetrar kan orsaka många problem. Därför är skötsel och underhåll av kvarliggande urin-katetrar en mycket viktig del av vården. Problemen kan minimeras genom individuell bedömning, ett holistiskt synsätt och evidensbaserad praktik.

Uro-Tainer-konceptet utvecklades för att ersätta de stora sprutor som användes för sköljning av katetrar på 1980-talet.

Detta nya koncept minskade riskerna för att urinblåsans slemhinna skulle bli utsatt för högt tryck eller sugas fast, vilket kunde inträffa när sprutor användes.

De två olika Uro-Tainer-lösningarna som finns på den svenska marknaden har olika användningsområden, men den vanligaste är Suby G som motverkar att avlagringar bildas.

Professor Getliffe (1994) upptäckte att återkommande avlagringar i katetrar som orsakar blockering uppstår på upp till hälften av de patienter som är kateteriserade under en lång tid.

För varje patient med kateter...

undersökt in vitro⁽³⁾



utan sköljning



NaCl 0,9 %



Uro-Tainer® Suby G

bekräftat in vivo⁽⁴⁾



NaCl 0,9 %



Uro-Tainer® Suby G

⁽¹⁾ Crow R, Mulhall A, Chapman R G (1988) Indwelling catheterisation and related nursing practice. Journal of Advanced Nursing 13. 489-495

⁽²⁾ Getliffe K A (1994) The characteristics and management of patients with recurrent blockage of long term urinary catheters. Journal of Advanced Nursing 20:1 140-149

⁽³⁾ Hesse A, Schreyer F, Tuschewitzki GJ, Classen A, Bach D, Experimental Investigations on Dissolution of encrustation on the Surface of Catheters Urologia Internationalis 1989, 44:364-369

⁽⁴⁾ Bach D, Hesse A, Prange C.H, Inkrustations- und Harnwegsinfektophylaxe beim transurethralen Dauerkatheter Urologie/Nephrologie 1990; 2:25-32

Uro-Tainer®

Enklare kateterunderhåll

Uro-Tainer® är ett sterilt engångssystem som är färdigt att användas.


Bruksanvisning:

steg 1




Värm Uro-Tainer® i ljummet vatten. Desinficera händerna noggrant. Använd om möjligt engångshandskar.

steg 2

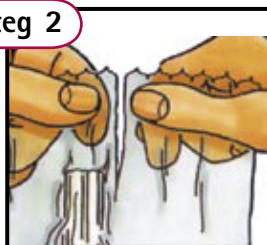


Öppna den yttre plastförpackningen och ta ut Uro-Tainer®.

steg 3

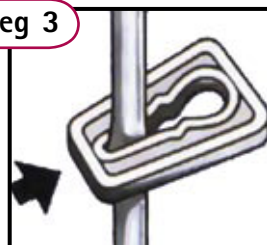


Stäng Uro-Tainer® genom att föra klämman över slangen.

steg 4

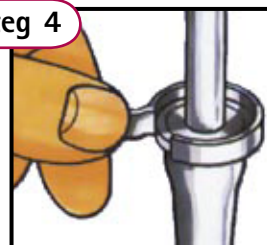


Ta bort hylsan genom att dra i fliken. Vrid på hylsan och ta bort den utan att vidröra den sterila kopplingen.

steg 5

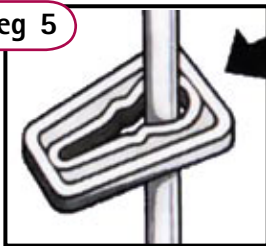


Lossa klämman till öppet läge och låt några droppar Uro-Tainer®-lösning rinna in i slangen för att avlägsna eventuell luft.

steg 6

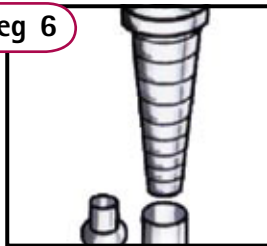


För in Uro-Tainer®-kopplingen i katetern och låt Uro-Tainer®-lösningen rinna in i katetern på det sätt som visas i steg 7.

steg 7

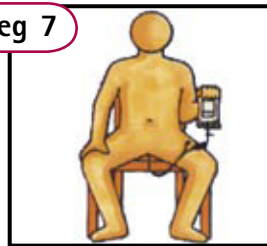

Låt lösningen rinna in med hjälp av tyngdkraften tills flödet upphör. Kläm inte på påsen. Stäng Uro-Tainer®-klämman och låt lösningen vara kvar i katetern under 15-20 minuter. Koppla inte bort påsen från katetern.

steg 8

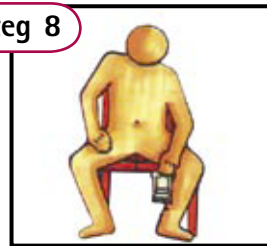

Öppna klämman och håll påsen nedåt så att den använda lösningen rinner tillbaka i Uro-Tainer®-påsen. När påsen är full stänger du klämman och tar bort den från katetern. Anslut kateterpåsen och kassera Uro-Tainer® efter användning. Desinficera händerna. Endast för engångsbruk.

Uro-Tainer[®] produktsortiment



Suby G (citronsyra 3,23 %) €€

Suby G rekommenderas om patientens kateter ofta blir blockerad.

Genom regelbunden användning i förebyggande syfte kan man förhindra att avlagringar bildas och att katetern blockeras.

Följ sjukhusets lokala rutiner för katetersköljning. Om sådana saknas bör startdosen vara två gånger i veckan. Den kan sedan utökas vid behov till högst två gånger per dag.

Om irritation uppstår ska behandlingen avbrytas.

Sammansättning: Citronsyra H_2O 32,3g/l; lätt magnesiumoxid 3,8 g/l; natrium bikarbonat 7 g/l; disnatriumedetat $2H_2O$ 0,1 g/l.

Förpackningsstorlek: 10 x 100 ml påsar.



Solutio R (citronsyra 6 %) €€

Solutio R rekommenderas före kateterbyte och även vid återkommande blockeringar.

Med Solutio R kan man effektivt rengöra en kateter som är helt blockerad av avlagringar. Om lösningen används innan katetern tas bort, avlägsnas kristaller som bildats i och omkring kateterspetsen, vilket minskar risken för skador på den känsliga vävnaden i urinröret.

En kombination av Suby G och Solutio R är också ett alternativ vid återkommande blockeringar. Maximal dos är två gånger per dag. Om irritation uppstår ska behandlingen avbrytas.

Sammansättning: Citronsyra H_2O 60 g/l; glukonolakton 6 g/l; magnesiumkarbonat alc. 28 g/l; disnatriumedetat $2H_2O$ 0,1 g/l.

Förpackningsstorlek: 10 x 100 ml påsar