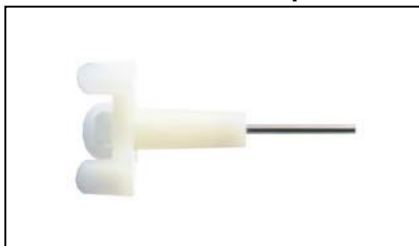


BD Diff Safe™ Bloddispenser**Produkt nr. 366005**

Bruksområde: Bloddispenser Diff Safe™ brukes for å ta ut en dråpe blod av et vakuumrør uten å åpne forseglingen, ved eksempelvis blodutstryk.

Produksjonsinformasjon

Juridisk produsent	Alpha Scientific corporation PO Box 725, Southeastern, PA 19 399-0725
Representant innen EU	BD Diagnostics – Preanalytical Systems Belliver Industrial Estate Plymouth, Devon, PL6 7BP Storbritannien
Produksjonssted:	USA

Sterilisering

Ikke steril

Materiale

Rustfritt stål og plast

Engangsprodukt**Oppbevaring**

Unngå lagring i direkte sollys

Merking

All merking oppfyller kravene i EU-direktiv 98/79/EG om medisintekniske produkter for in vitro-diagnostikk og inneholder CE-merket.

Forpakningsspesifikasjoner

Produktnummer	366005
100 stk. forpakkingsmateriale	Polyetylen
100 stk. forpakkingsvekt	0,400 kg
1000 stk. forpakkingsmateriale	eske
1000 stk. forpakkingsvekt	1,000 kg
10000 stk. forpakkingsmateriale	kartong
10000 stk. forpakkingsvekt	5,2000 kg



Bruksanvisning

- 1. Hold røret i lodrett posisjon**
- 2. Stikk Diff Safe stiften gjennom proppens gummimembran**
- 3. Bland røret. Press stiften mot objektglaset.**
- 4. Dråpens størrelse reguleres enkelt gjennom hvor lenge stiften holdes nedtrykket mot underlaget.**
- 5. Løft røret, snu det og fjern Diff Safe**
- 6. Hiv det i risikoavfallsbeholderen.**

Referenser

1. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI; formerly NCCLS): Procedures and Devices for the Collection of Diagnostic Capillary Blood Specimens; Approved Standard. Document H04-A6, Wayne, PA, USA, 2003.