

BD Vacutainer® Plasmarör (Heparin)



Användningsområde: BD Vacutainer™ plasmarör används normalt för kliniskt kemiska plasmaanalyser.

Tillsatser: Röret innehåller natrium- eller litium-heparin. Koncentrationen av litium- eller natrium-heparin i BD Vacutainer™ plasmarör är 17 IE heparin/ml blod. Tillsatsen har sprejats på insidan av plast-rören och i glasrören är den antingen lyofiliserad (2 och 3 mL) eller vakumtorkad (5 och 7 mL).

Blandningsrekommendation: Plasmarör ska blandas försiktigt 8-10 gånger.

Centrifugeringsanvisningar: 1300 G under 10 minuter i rumstemperatur. BD Heparinrör kan centrifugeras direkt efter provtagning.

Annat: Rören finns i ett antal storlekar, både i plast och glas, och har en grön Hemogard™ förslutning.

BD art nr	Tillsats	Volym	Storlek (mm)	Färg	Etikett	Avd./Transp. förp
BD Vacutainer™ Litium-Heparinrör i plast med grön BD Hemogard™ förslutning						
368494	Litium-Heparin	2	13x75 (5)		Papper	100/1000
368496	Litium-Heparin	4	13x75 (5)		Transparent	100/1000
368884	Litium-Heparin	4	13x75 (5)		Papper	100/1000
368886	Litium-Heparin	6	13x100 (7)		Papper	100/1000
367526	Litium-Heparin	10	16x100 (10)		Papper	100/1000
BD Vacutainer™ Natrium-Heparinrör i plast med grön BD Hemogard™ förslutning						
367869	Natrium-Heparin	4	13x75 (5)		Papper	100/1000
367876	Natrium-Heparin	6	13x100 (7)		Papper	100/1000

Kontakta oss gärna för att få kopior av BD:s kliniska studier på BD Vacutainer™ plasmarör

