

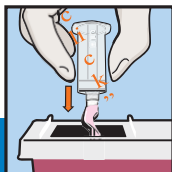
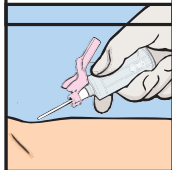
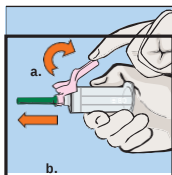


BD Vacutainer® Eclipse™ Sikkerhetskanyle

med formontert holder

1. Klar til å brukes direkte ut av forpakning.
2. (a) Dra forsiktig tilbake den rosa beskyttelsen over holderen.
(b) Vri av den fargekodede transporthylsen.
3. Utfør prøvetakingen etter gjeldende interne prosedyrer.
4. Rett etter kanylen er dratt ut av karet, plasser tommel på den bredeste plassen på beskyttelsen. Dra så ned beskyttelsen framover til et «klikk» høres. Undersøk at beskyttelsen nå er låst over kanylen. Dra IKKE over beskyttelsen ved å presse det mot en annen flate.
5. **Forsøk IKKE å fjerne nålen fra holderen. Kasser produktet umiddelbart i egnet beholder for stikkende gjenstander. IKKE FOR GJENBRUK.**

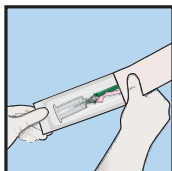

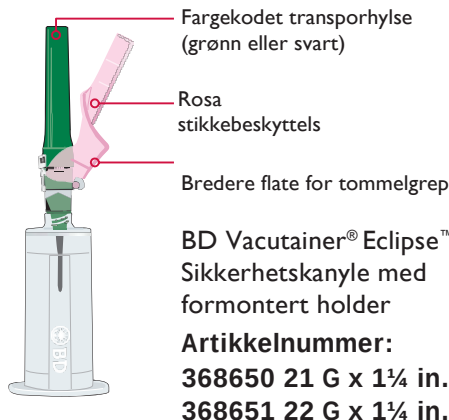

Fargekodet transporhylse
(grønn eller svart)

Rosa
stikkebeskyttels

Bredere flate for tommelgrep

BD Vacutainer® Eclipse™
Sikkerhetskanyle med
formontert holder

Artikkelnummer:
368650 21 G x 1¼ in.
368651 22 G x 1¼ in.

VIKTIGE TIPS FOR DIN SIKKERHET

- **IKKE GJENBRUK HOLDEREN**
- Holderens gjenger er designet for å brukes kun **EN** gang
- Gjenbruk av holdere kan være vanskelig og resultere i eksponering av blodbåren smitte
- Kasser nål og holder sammen

TIL ENGANGSBRUK

BD kundeservice: +46 (0) 8 775 51 00

ADVARSEL: håndter alle biologiske prøver samt stikkende gjenstander etter lokale retningslinjer. Sørg for medisinsk tilsyn ved eventuell eksponering av biologisk materiale da disse kan overføre hepatitt, HIV eller andre smittsomme sykdommer.

BD, BD logo, BD Vacutainer och Eclipse är varumärken som tillhör Becton, Dickinson and Company. ©2007 BD.



BD Diagnostics
Preanalytical Systems