



Kiilto Pro Ytdesinfektion Plus

Ytdesinfektion



Kiilto Pro Ytdesinfektion Plus består av ca 45 vol% isopropylalkohol samt tensid (smutslösande) och är avsedd för desinfektion av släta ytor, t.ex. undersökningsbritsar, bänkar och bord. Produkten är effektiv mot bakterier, svamp och höljeförsedda virus som t.ex. Corona, Hepatit b & C samt HIV. Verkar snabbt och avdunstar utan att lämna spår på den behandlade ytan.

Mikrobiologisk information:

EN13727 (baktericidal effekt) 30 sek

EN13697 (baktericidal/jästicid effekt) 1 min

EN13624 (jästicidal effekt) 30 sek

EN16615 (baktericidal/jästicidal effekt) 1 min

EN14476 (Vacciniavirus/höljeförsedda virus) 30 sek, (Adenovirus 5 min)

EN14348 (mycobactericidal effekt) 1 min (clean), 5 min (dirty)

Desinfektionsmedel BPR-reg. nr. 5654-1-3. Verksamma ämnen och biocidprodukt är godkända enligt biocidförordningen (Förordning (EU) nr 528/2012).

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Användningsområde Lämplig för ytdesinfektion inom hälso- och sjukvården, tandvården eller djursjukvården. Även lämplig för privat bruk.

Produktegenskaper Består av ipa och har 45 volymprocent alkoholstyrka
Verkar snabbt och avdunstar utan att lämna spår efter sig på den behandlade ytan
Tillsatsen av tensid som smutslösare gör att ytan inte behöver förbehandlas
God upplösande effekt på t.ex. spill av blod

Bruksanvisning Används på ytor som tål alkohol. Tillsatsen av tensid gör att ytan inte behöver rengöras först.
Innehåller inte castor oil.

Gör så här:

1. Spruta rikligt på ytan alternativt dränk in en torkduk med utspädd vätska.
2. Bearbeta ytan upprepade gånger under minst 30 sek (se etiketten för kontakttider)
3. Lämna ytan att lufttorka

Sammansättning

Aktiva ämen

Effekt

Isopropanol

45vol%

Med tensid

pH koncentrat

8.5 svagt alkaliskt

Förvaring Förvaras i rumstemperatur, stäng kapsylen efter användning. Hållbar 3 år från produktion även i öppen flaska förutsatt att produkten förvaras enligt anvisningar. Utgångsdatum står tryckt på flaskan.

Tillverkningsland SVERIGE

Förpackningsvolym / Artikelnr.	Transport krt.	Artikelnr.	GTIN	GTIN (krt)
	12 x 1 l	468-12	7331964004685	7331964904688
	3 x 5 l	469-3	7331964004692	7331964904695
	24 x 300 ml	461-24	7331964004616	7331964904619



Ytterligare information Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.