



Antibac®

Overflatedesinfeksjon

75%

Overflatedesinfeksjon



Antibac® Overflatedesinfeksjon 75 % er det originale og bestselgende desinfeksjonsmiddelet beregnet på synlig rene overflater som tåler alkohol. Effektiv mot bakterier, mykobakterier, ulike virus og gjærsopp. Formelen består av forskjellige alkoholer. Etanol er hovedingrediensen og har farmasøytisk kvalitet.

Produktet leveres i ulike forpakninger og størrelser, se oversikt nedenfor.

Bruksområde

Bruksklar, etanolbasert desinfeksjon for synlig rene overflater som tåler alkohol.

Produktegenskaper

Produktet inneholder 75 vol% denaturert etanol av farmasøytisk kvalitet. Væsken fordamper raskt og etterlater ikke rester på overflaten (ingen behov for avskylling etter desinfisering).

Mikrobiologisk informasjon:

EN13727 (effekt bakterier) - 30 sec

EN13697 (effekt bakterier) - 5 min

EN13624 (effekt gjærsopp/muggsopp) - 30 sec/15 min

EN13697 (effekt gjærsopp/muggsopp) - 5 min

EN16615 (effekt bakterier/gjærsopp) - 2 min

EN14476 (effekt kappeklede virus, Adenovirus, Murine Norovirus) - 30 sec

EN14348 (effekt tuberkulose) - 1 min

Bruksanvisning

Brukes på synlig rene overflater som tåler alkohol. Hvis du er usikker på om overflaten tåler alkohol, kan du prøve et lite synlig område først.

Bruksanvisning:

1. Rengjør overflaten med et vanlig rengjøringsmiddel dersom den ikke er synlig ren
2. Fordel rikelig med væske på overflaten eller direkte på en klut.
3. Tørk over flaten gjentatte ganger slik at den er fuktig gjennom hele kontakttiden (se etiketten eller informasjonen om kontakttider over)
4. La overflaten lufttørke (ikke behov for avskylling)

Ikke anbefalt for treverk, stoffmaterialer, naturgummi, malte flater, papirbelagte flater eller silikon.

Innhold**Aktive stoffer****Effekt**

Etanol	623 g/kg	Biocide
Isopropylalkohol	64 g/kg	Biocide
2-Metyl-2-propanol	<1%	Denaturering

Oppbevaring

3 års holdbarhet fra produksjonsdato.
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningsskilder.

Utseende og lukt

Transparent væske med alkohollukt.

Bruker- og miljø sikkerhet

Alvorlige hendelser i forbindelse med Antibac® Overflate 75% bør rapporteres til reklamasjon.no@kiilto.com og til de nasjonale myndigheter for medisinsk utstyr (Statens Legemiddelverk).
PT2 biocid for profesjonelt bruk.

Forpakkingsstørrelse / Artikkel nr.

Salgsenhet	Artikkel nr.	GTIN	GTIN (salgsenhet)	Type forpakning
3 x 4 l	600643	7054956006435	7054957006434	Kanne
1 x 25 l	601311	7054956013112		Kanne
20 x 50 ml	603032	7054956030324	7054957030323	Sprayflaske
1 x 186 l	600980	7054956009801		Fat
6 x 750 ml	603002	7054956030027	7054957030026	Sprayflaske
12 x 1000 ml	600644	7054956006442	7054957006441	Flaske med fliptop

Tilleggsinformasjon

Sjekk den oppdaterte versjonen av en trykket brosjyre på vår nettside www.kiilto.no, eller send en epost til vår kundeservice post.no@kiilto.com.