


MONOSETT

ONEMED

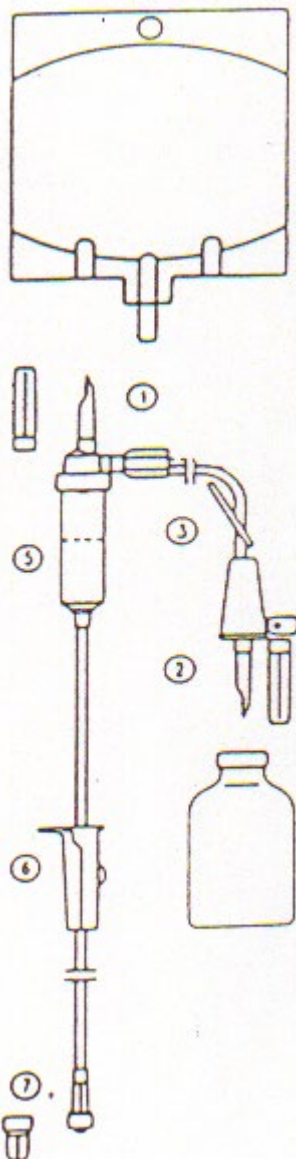

1. Steng alle klemmer og filter. (Rulleklemme ca. midt på slangen)
2. Sett innstikkspissen på infusjonsslangen i væskebeholder, halvveis inn.
3. Fyll dråpekammeret ca. halvfullt.
4. Hold infusjonsslangen i en bue under kammeret og åpne slangeklemmen forsiktig og fyll slangen. Steng så rulleklemmen. Fest slangen på rulleklemmen slik at den ikke faller i gulvet etc.
5. Sette spiken på sideslangen i hetteglasset, halvveis inn. Deretter åpnes klemmen på slangen, så åpnes filteret og væsken renner i glasset. Unngå å klemme på saltvannspose/bag. Ved tilstrekkelig væske i glasset. Steng klemme og filter.
6. Rist så medikamentglasset med bunnen ned et par ganger og så løft glasset opp og fortsett risting til pulveret er oppløst.
7. Plasser så tommel og pekefinger rundt spiken på sideslangen (Bunnen på hetteglasset peker opp) og la settet henge ned.
8. Deretter åpnes klemmen på sideslangen og så filteret. Da renner medikamentet tilbake til infusjonsposen.
9. Prosedyren kan gjentas hvis nødvendig.
10. Husk å skru av lyseblå «propp» på enden av infusjonsslangen før Monosett kobles til pasient.

OneMed AS

Telefon: 22 30 91 00