

## Skin X<sup>®</sup> - Hudskyddsring och Absorbent

Speciellt utvecklade för att skydda huden, förebyggande eller vid redan befintligt läckage, runt t.ex. gastrostomi, jejunostomi m.fl. stomier.

**Skin X<sup>®</sup> Hudskyddsring och Absorbent är godkända som hjälpmedel av Läkemedelsförmånsnämnden (LFN)!**

Det innebär att dina patienter kan få dem utskrivna under högkostnadsskyddet när de inte längre är på sjukhuset. (Apotekets varunummer finns längst ned på sidan).



Mer eller mindre irriterad hud runt PEG-knapp och PEG-kateter är inte så ovanligt.



**Skin X<sup>®</sup> Hudskyddsring** fästs direkt på huden, även när den redan är mycket irriterad. Den skyddar huden från irritation, eller från vidare irritation, så att huden kan läka och patienten slipper smärta.

**Skin X<sup>®</sup> Hudskyddsring** är tillverkad av ett *mycket* hudvänligt material, hydrokolloid, och tål duschen!



**Skin X<sup>®</sup> Absorbent** förhindrar att frätande mag- och tarmsafter sipprar utanför Hudskyddsringen och irriterar huden ytterligare.

Absorbenten består av en superabsorbent, som *inte* sväller, där ena sidan är belagd med en polyetenfilm så läckaget inte kan blöta igenom.

Byt *bara* Absorbenten när Hudskyddsringen är intakt, så får huden vila.



Från ett irriterat och ömmande stoma till ett utläkt – **ENKELT och EFFEKTIVT.**

Art.nr.	Skin X <sup>®</sup> Produkt	Y.D.	Hålstorlek	French	Frp.	Apotekets varunr
P75003	Hudskyddsring	50 mm	3 mm	ca. 9 F	30 st	20 32 28
P75007	Hudskyddsring	50 mm	7 mm	ca. 20 F	30 st	20 32 29
P75510	Hudskyddsring	75 mm	10 mm	ca. 30 F	30 st	20 32 30
P75515	Hudskyddsring	75 mm	15 mm	ca. 45 F	30 st	20 32 31
PA5003	Absorbent	50 mm	3 mm	ca. 9 F	100 st	20 32 23
PA5007	Absorbent	50 mm	7 mm	ca. 20 F	100 st	20 32 25
PA7510	Absorbent	75 mm	10 mm	ca. 30 F	100 st	20 32 26
PA7515	Absorbent	75 mm	15 mm	ca. 45 F	100 st	20 32 27

## **Skin X™ Hudskyddsring** BRUKSANVISNING (svenska)

**Skin X™ Hudskyddsring** används för att skydda huden. Finns i 4 storlekar för att kunna individuellt utprovas efter stomi-, kateter-, sond- eller dränstorlek. Används med fördel tillsammans med **Skin X™ Absorbent**.

### **Tillpassning till rätt hålstorlek**

Var noga med tillpassningen!

**Skin X™ Hudskyddsring** ska sluta tätt runt stomi, kateter, sond eller drän.

### **Hudens skötsel**

Tvätta först huden runt stomat med vanligt ljummet kranvatten.

Används tvål skall den vara oparfymerad.

Lösningemedel, som t.ex. bensin, får absolut inte användas!

### **Applicering av Skin X™ Hudskyddsring**

Huden skall vara ren, varm och torr innan applicering. Via slitsen i ringen förs den först på plats, så att den sluter tätt. Sedan avlägsnas skyddspappret och hudskyddsringen fästs på huden. Håll fingrarna mot ringen i ca 15 sekunder efter applicering. Kroppsvärme ökar vidhäftningen!

### **Byte av Skin X™ Hudskyddsring**

Hudskyddsringen byts vid behov och kan sitta i 2-3 dygn. När materialet är mättat får det en gråaktig färg. Vid byte bada med ljummet vatten mellan Hudskyddsring och hud tills ringen lossar.

Lösningemedel, som t.ex. bensin, får absolut inte användas!

## **Skin X™ Absorbent** BRUKSANVISNING (svenska)

**Skin X™ Absorbent** påminner om en kompress men har superabsorberande fibrer som suger upp t.ex. sårsekret, urin och avföringsläckage. Används med fördel tillsammans med **Skin X™ Hudskyddsring**.

### **Tillpassning till rätt hålstorlek**

Var noga med tillpassningen!

**Skin X™ Absorbent** ska sluta tätt runt stomi, kateter, sond eller drän.

### **Applicering av Skin X™ Absorbent**

Via slitsen i ringen förs **Skin X™ Absorbent** på plats så att den sluter tätt runt stomi, kateter, sond eller drän. Den glansiga sidan är plastad, mot läckage, och ska därför vara vänd utåt, *från* huden. Den andra sidan, som är absorberande, ska vara vänd *mot* huden.

### **Byte av Skin X™ Absorbent**

Absorbenten byts efter behov.

## **Förvaring och hållbarhet**

Förvaras i rumstemperatur. Undvik hög värme, direkt solljus, kyla och hög luftfuktighet. Hållbarheten är fem år från tillverkningsdatum. Utgångsdatum finns på förpackningen.