




Hydrocoll®/Hydrocoll®.thin

Hydrokolloid bandasje

I granulasjonsfasen øker Hydrocoll dannelsen av nytt vev gjennom å stimulere aktiviteten til fibroblaster. Gjennom sin høye andel av hydroaktive kolloider har Hydrocoll ekstra god absorberingskapasitet og egner seg derfor også til sår med sekresjon. Sår væsken absorberes raskt og holdes på plass i bandasjens tekstur. På denne måten kan mikrosirkulasjonen i sårområdet økes. Det bidrar til å aktivere kroppens egne renselsesmekanismer, særlig ved kroniske tilstander med dårligere tilhelingsfrekvens.

God absorberingsevne,
hele platen absorberer,
ingen limkanter.

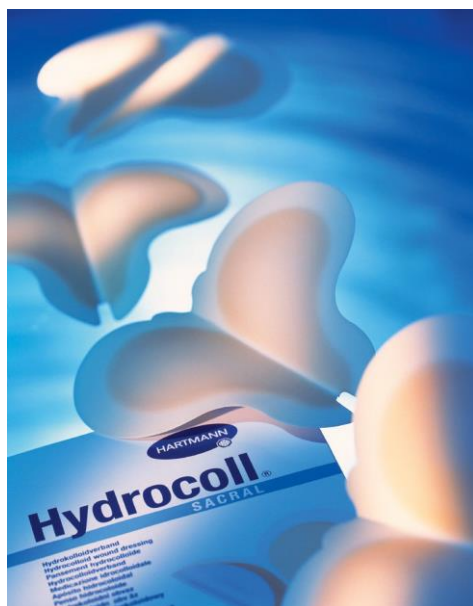

Enkel håndtering

Transparent



Indikasjon

For behandling av kroniske, langsomt helende sår, f.eks. venøse bensår og trykksår, hudtransplanterte områder og annengrads forbrenning.

Kontraindikasjoner:

Hydrocoll skal ikke brukes på synlige ben, muskler eller sener, og heller ikke på klinisk infiserte sår, diabetesfotsår, soppinfeksjoner eller ved tredjegrads forbrenning. Risikopasienter, f.eks. diabetikere, bør undersøkes nøye ved bruk.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tlf.: 0371-58 74 00 • Faks: 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besøk oss på vår hjemmeside:
www.hartmann.se

Hydrocoll er en selvheftende, absorberende hydrokolloid bandasje.

Egenskaper


Hydrocoll er en selvheftende, absorberende hydrokolloid bandasje som er dekket av en semipermeabel polyuretanfilm, som hindrer bakterier og væske i å trenge inn. Når sårvesken absorberes, sveller de hydrokolloidale partiklene og danner en gel som fyller sårhulen og sørger for at sårområdet holder seg fuktig. Den gelen som er dannet, fortsetter å absorbere til hydrokolloiden er mettet. Oversiden sveller og er mettet når forhøyningen er cirka 1 cm over kanten på bandasjen. Det gelformede sjiktet på bandasjens underside forhindrer at Hydrocoll setter seg fast i såret. Bandasjen kan fjernes smertefritt uten å skade granulasjonen og det nye vevet som er dannet.

Det øverste sjiktet fungerer som en sikker barriere mot bakterier og beskytter såret mot infeksjon og væske som trenger inn. Pasienten kan dusje og bade med bandasjen på. Hydrocoll beskytter mot UV-A og UV-B stråling fra solen.

Materiale

Platene er sammensatt av syntetiske elastomerer og natriumkarboksymetylcellulose (NaCMC) i matrixstruktur dekket med en semipermeabel polyuretanfilm. Platen inneholder ikke gelatin eller kolofonium. Standardplatene er 0,67 mm tykke, og thin-versjonen er 0,37 mm.

Produktet er klassifisert som medisinsk utstyr, klasse IIb, sterilt utstyr. Det er CE-merket i henhold til rådsdirektiv 93/42/EØF.

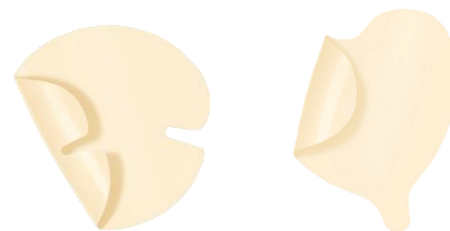

Hydrocoll finnes i ulike former:
Concave for hæler og albuer.

Sacral for det sakrale området.

Hydrocoll thin

Hydrocoll thin har en lavere absorberingskapasitet (cirka 50%) og kan med fordel brukes i epiteliseringsfasen. Under epiteliseringsfasen støtter Hydrocoll thin, gjennom det fuktige sårmiljøet, epitelens celledeling og cellenes spredning. Man kan her forlenge intervallet for å skifte bandasje, men bandasjen bør ikke sitte på i mer enn sju dager. Kontroll av sårområdet forenkles ettersom platene er transparente.

Begge bandasjene, først og fremst Hydrocoll thin, kan også brukes til okklusjonsbehandling av ulike typer hudsykdommer, men alltid under tilsyn av lege.

Fordeler:

- Høy absorberingskapasitet
- Enkel håndtering
- Hele platen absorberer
- Kan klippes til ønsket størrelse
- Transparent
- Myk og smidig
- Inneholder ikke kolofonium og gelatin

Vareutvalg	Størrelse	Art. nr.	Afp.	Tfp
Hydrocoll®	5 x 5 cm	900 947	10 stk.	8 Afp
Steril, pakket enkeltvis	7,5 x 7,5 cm	900 948	10 stk.	8 Afp
	10 x 10 cm	900 938	10 stk.	8 Afp
	15 x 15 cm	900 939	10 stk.	8 Afp
	20 x 20 cm	900 940	10 stk.	8 Afp
Hydrocoll® sacral	18 x 18 cm	900 945	10 stk.	8 Afp
Hydrocoll® concave	15 x 13,5 cm	900 946	10 stk.	8 Afp
Hydrocoll®thin	5 x 5 cm	900 953	10 stk.	8 Afp
	7,5 x 7,5 cm	900 954	10 stk.	8 Afp
	10 x 10 cm	900 942	10 stk.	8 Afp
	15 x 15 cm	900 943	10 stk.	8 Afp