

Sorbalgon®/Sorbalgon® T

Bandasje av kalsiumalginatfiber

Sorbalgon er en kalsiumalginatbandasje høy absorpsjonsevne. Når Sorbalgon kommer i kontakt med salter i ekskret og blod, dannes en gele som beskytter såret og kapsler inn overflødig ekskret og bakterier. Geleen har en fuktende effekt hvilket gir et bedre helingsmiljø. Det er viktig med god ekskrehåndtering, da det kan forårsake skader på hud rundt såret samt motvirke helingsprosessen, dersom det går for lenge mellom hvert skift.

Høy absorpsjonsevne



Blodstillende



Sorbalgon T,
tamponeringsremse



Indikasjon

Alle typer sår som væsker, akutte såvel som sår som tar tid å lege. Eksempler: transplantasjonsområder, neseblod, ben- og trykksår, men også sår fra ulykker og tumorkirurgi.

Kontraindikasjoner:

Ingen kjente. Bør ikke brukes på tørre sår eller sår som væsker lite.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Sorbalgon er en kalsiumalginatbandasje som brukes på væskende sår.

Egenskaper

Sorbalgon har en svært høy absorpsjonsevne, ca 20 ganger sin egen vekt. Bandasjens geleaktige konsistens har samme effekt som en fuktgivende bandasje, den forhindrer uttørring. Gjennom at såret holdes fuktig, bidrar det til en forenklet helingsprosess. Sorbalgon finnes som kvadratiske kompresser i flere størrelser. For dype sår finnes Sorbalgon også som tamponeringsremser.

Material

99% kalsiumalginat og 1% polysorbat.

Tips

Når Sorbalgon brukes i dype sårhuler skal de fylles luftig, ettersom alginatfibrene ekspanderer når de absorberer sårekskret. Pakkes fibrene for hardt, kan de forårsake smerte og skade da de presser mot sårets kanter.

Sorbalgon kan fikseres med filmbandasje, hydrokollide bandasjer eller absorpsjonsbandasjer.



Sorbalgon luftig pakket i en sårhule

Fordeler:

Høy absorpsjonsevne

Blodstillende

Enkel håndtering

Myk, pasientkomfort

Økonomisk

Beskytter såret