

Produktdatablad TENA Comfort Original

Bruksområde

TENA Comfort er et svært lekkasjesikkert og komfortabelt todelt system for middels til tung inkontinens. TENA Comfort Original finnes i fem ulike absorpsjonsnivåer (Normal, Plus, Extra, Super og Maxi). Riktig størrelse og kvalitet på fikseringstrusene er viktig for at produktet skal sitte godt mot kroppen.



Unik skålformet
lekkasjesperre

Diskret
våtindikator

Anatomisk utforming

Overflaten kapsler
raskt inn urin og holder
huden tørr

Myke, tekstilliknende
materialer som puster.

Odour Neutralizer for
nøytraliserende effekt
på uønsket lukt



Produktdatablad TENA Comfort Original

Produktegenskaper











TENA Comfort Original er både lekkasjesikkert og komfortabelt. Doble absorberende kjerner med superabsorbenter i kombinasjon med innkapslende overflate gjør at urinen spres og absorberes effektivt. Overflaten mot huden holdes tørr, hvilket legger grunnlaget for sunn hud.

Produktet har en anatomisk utforming og en unik patentert skålformet lekkasjesperre som gjør produktet mer lekkasjesikkert.

TENA Comfort Original har Odour Neutralizer, som betyr at produktet har superabsorbenter som kapsler inn urin, og har en nøytraliserende effekt på uønsket lukt. Produktet har våtindikator og tydelig fargemarkering til hjelp ved valg av absorpsjonsnivå.

TENA Comfort Original									
Absorpsjonsnivå/ størrelse	Lengde cm	Bredde cm	Vekt g	Antall/pose stk	Antall/kart stk	Antall kart pall	Praktisk absorpsjon	ISO 11948-1 Absorpsjons- kapasitet	Essity Art.nr
Normal	52	22	46	42	126	16	352	1020	212742
Plus	63	27	70	46	92	16	504	1500	212846
Extra	63	27	78	40	80	16	610	1800	212940
Super	63	27	88	36	72	16	757	2090	218036
Maxi	66	29,5	111	28	56	16	1064	2760	219028

Bruksanvisning

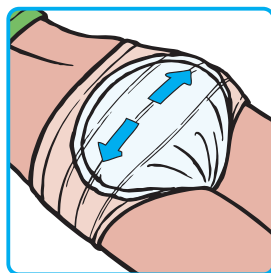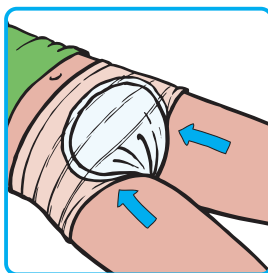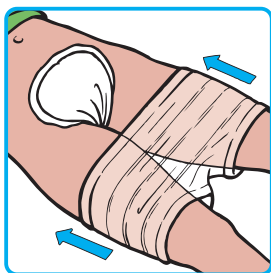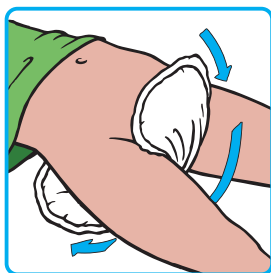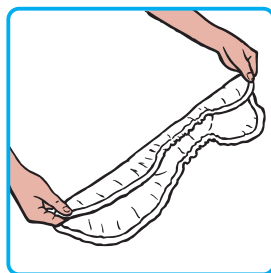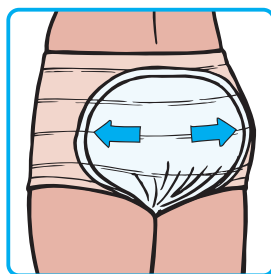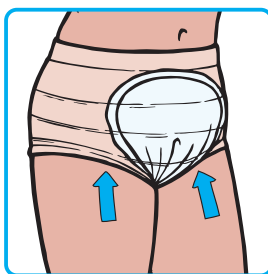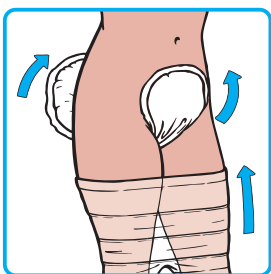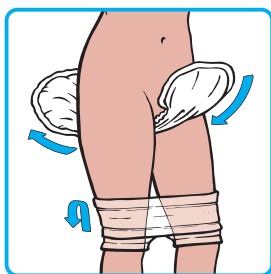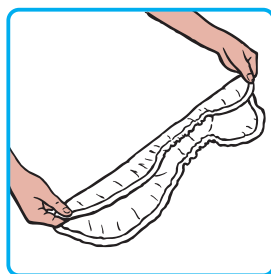

Produktdatablad TENA Comfort Original

Produktegenskaper










TENA Comfort Original er både lekkasjesikkert og komfortabelt. Doble absorberende kjerner med superabsorbenter i kombinasjon med innkapslende overflate gjør at urinen spres og absorberes effektivt. Overflaten mot huden holdes tørr, hvilket legger grunnlaget for sunn hud.

Produktet har en anatomisk utforming og en unik patentert skålformet lekkasjesperre som gjør produktet mer lekkasjesikkert.

TENA Comfort Original har Odour Neutralizer, som betyr at produktet har superabsorbenter som kapsler inn urin, og har en nøytraliserende effekt på uønsket lukt. Produktet har våtindikator og tydelig fargemarkering til hjelp ved valg av absorpsjonsnivå.

TENA Comfort Original								
Absorpsjonsnivå/ størrelse	Lengde cm	Bredde cm	Vekt g	Antall pose/kart	Absorpsjons- evne	Fargekode	Godkjent Helfo	Essity Art.nr
Normal	52	22	46	42/126			Nei	212742
Plus	63	27	70	46/92			Nei	212846
Extra	63	27	78	40/80			Nei	212940
Super	63	27	88	36/72			Nei	218036
Maxi	66	29,5	111	28/56			Nei	219028

Bruksanvisning

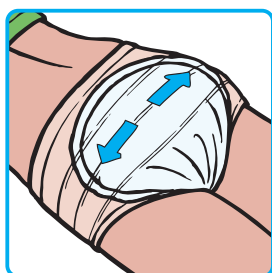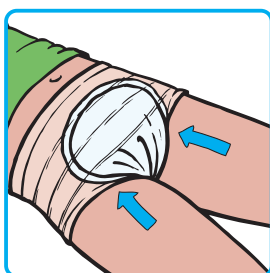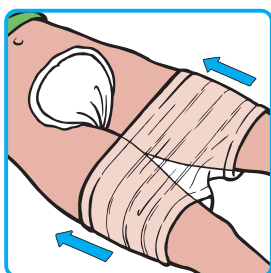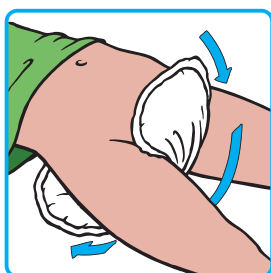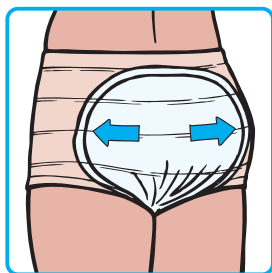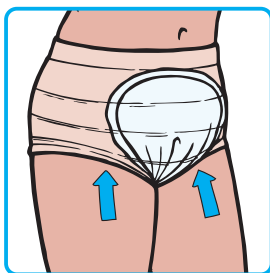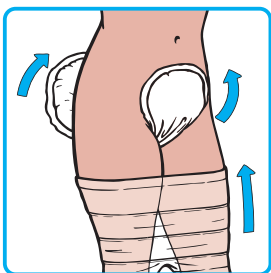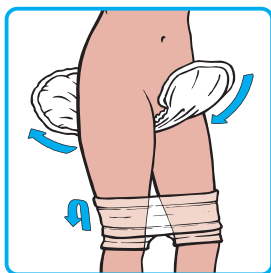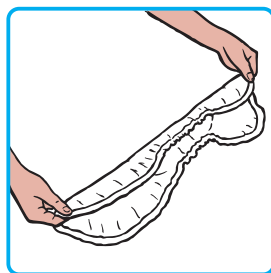

Produktdatablad TENA Comfort Original

Varedeklarasjon

OVERFLATE INNSIDEN

Materiale: Nonwoven

Funksjon: Tørrhet/mykhet mot huden

OVERFLATE UTSIDEN

Materiale: Nonwoven

Funksjon: Økt komfort og diskresjon

INNSLIPP- OG SPREDNINGSMATERIALE

Materiale: Polyethylene

Funksjon: Rask absorbering og effektiv spredning av urin, hindrer urinen i å trekke tilbake til overflaten

ABSORBSJONSKJERNE, Øvre

Materiale: Cellulosemasse og superabsorbenter

Funksjon: Spre, absorbere og holde på væsken

ABSORBSJONSKJERNE, Nedre

Materiale: Cellulosemasse og superabsorbenter

Funksjon: Spre, absorbere og holde på væsken

SUPERABSORBENT

Materiale: Polyacrylat

Funksjon: Absorbere og holde på væsken, samt nøytralisere uønsket lukt

SPERRESJIKT

Materiale: Pustende polyeten

Funksjon: Forhindre lekkasje/gjennomvæting, tillate fuktig luft å ventileres ut fra produktet, og således bidra til komfort og et godt miljø for huden

ELASTIKK (TENA Comfort skålformet lekkasjesperre)

Materiale: Polyisopren

Funksjon: Bygge skålfasongen og forhindre lekkasje

TENA Comfort produkter inneholder ikke:

naturgummi (latex), PVC, kolofonium, duftkomponenter, hudpleiende midler eller parfyme.

Produktene kan benyttes inntil tre år etter produksjonsdato. Lagres under normale forhold, og bør ikke utsettes for ekstreme temperaturer eller fukt. Produktene er klassifisert som medisintekniske, og de er CE-merkede.

Kontakt oss for mer informasjon

☎ 22 70 62 00

tena.no

