


 **smith&nephew**
OPSITE[®]
FLEXIFIX[®]
Transparent Film Roll

Vann – og bakterietett fikseringsfilm på rull

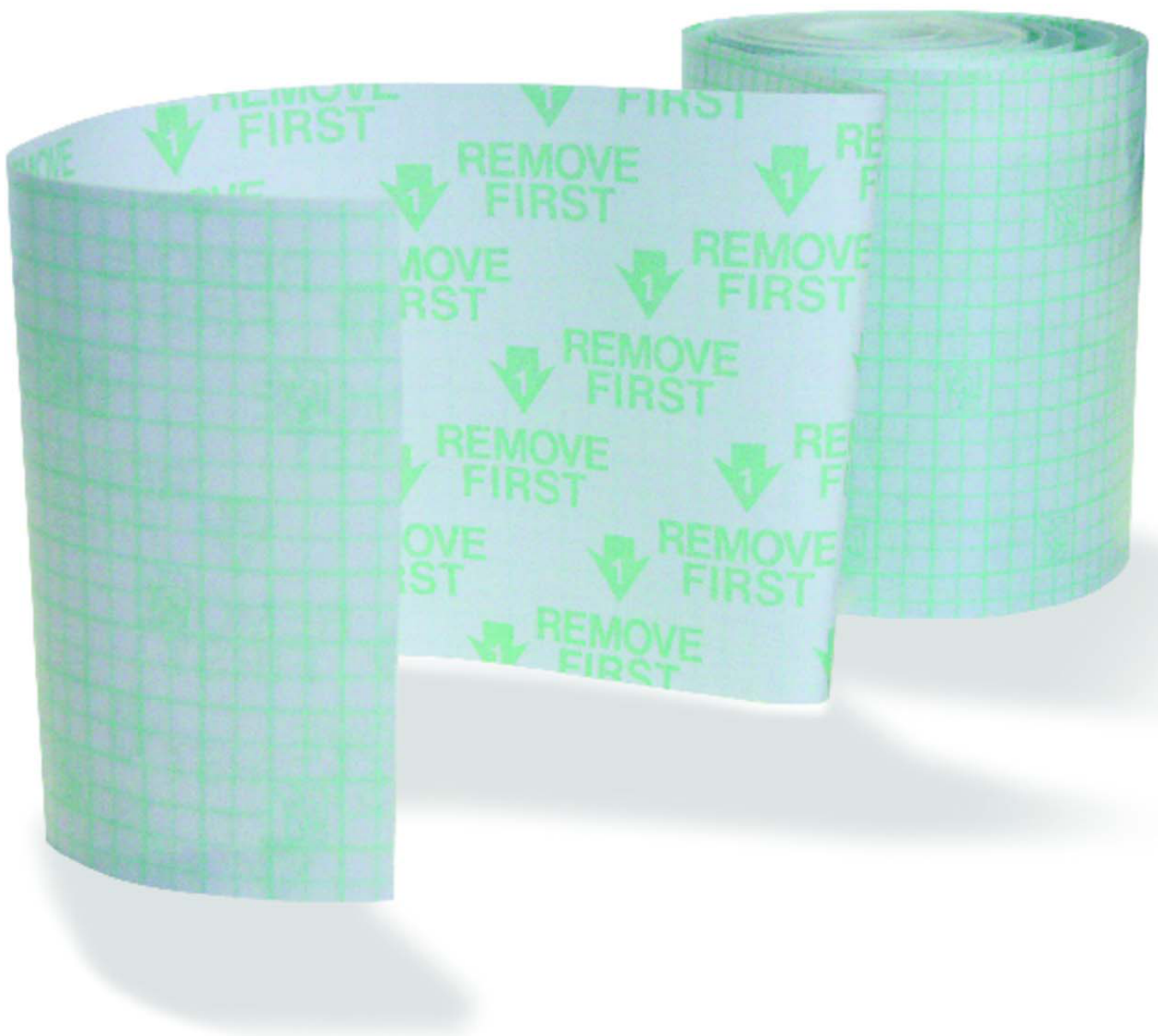

OPSITE FLEXIFIX[◊], ideell for fiksering av andre bandasjer

OPSITE FLEXIFIX er en transparent adhesiv film på rull, ideell for fiksering av annen bandasje, slanger, som forsterkning av annen bandasje eller som smertelindring ved diabetisk neuropati¹. Den kombinerer fordelene til Opsite film med et unikt applikasjonssystem som gir sikkert og enkelt feste for alle typer bandasjer.

Fordeler

OPSITE Film

Filmen er vanntett og en barriere mot bakterier. Den slipper igjennom vanndamp og tillater huden å puste slik at fuktighet ikke bygger seg opp under bandasjen og løsner denne fra huden. Man bør unngå eksponering fra ultrafiolett lys, slik det også er for andre polyuretanfilmer.

Enkel fiksering på vanskelige steder

Filmen er meget elastisk og formbar. Det gjør det enkelt å bandasjere på vanskelige, kurvede områder eller fikserer tuber og lignende. Filmen hindrer ikke bevegelser slik at pasientene får en myk og behagelig bandasje.

Forhindrer blemmedannelser

Lagt på huden vil filmen redusere friksjon og derved blemmedannelser.

Unikt pakkesystem

Måten dekkpapper og toppfilm er lagt på, gir et enkelt og raskt applikasjonssystem. Ved fiksering av andre bandasjer kan man lage vanntette forbindelser som gir økonomiske og praktiske bandasjer.

Applisering

OPSITE FLEXIFIX skal legges på ren og tørr hud, slik som vist på bildene. For å fjerne bandasjen enklest, strekkes filmen parallelt med huden vekk fra sentrum av bandasjen.

Indikasjoner

OPSITE FLEXIFIX kan benyttes som:


- Fiksering av andre bandasjer som MELOLIN[®] eller ALLEVYN[®]
- Fiksering av tuber og slanger
- Reduksjon av neuropatiske diabetessmerter
- Hudbeskyttelse ved bruk av stomi utstyr el.

Kontra-indikasjoner

Skal ikke benyttes på åpne sår.

Forsiktighetsregel

Som for alle andre adhesive produkter skal OPSITE FLEXIFIX benyttes med forsiktighet ved applisering eller fjerning fra ømtålig eller skadet hud.

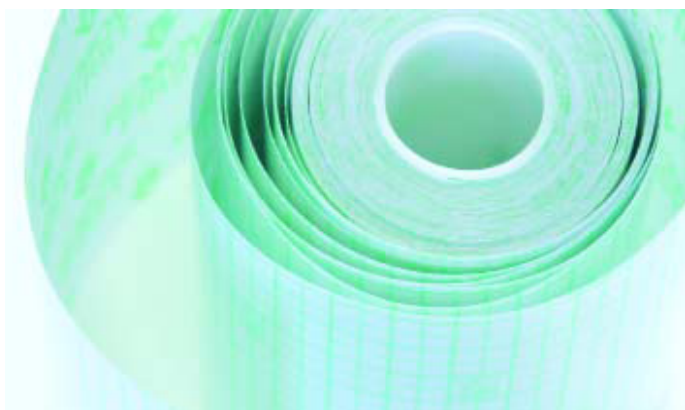

Sortiment

Art. nr.	Størrelse
66000040	5cm x 10m
66000041	10cm x 10m
66000375	15cm x 10m

References

¹Foster A.V.M et al (1994) "Application of OPSITE Film: a new and effective treatment of painful diabetic neuropathy". Diabetic Medicine Vol 11.8 pp 768-772

Wound Management www.smith-nephew.com

Smith & Nephew
Medical Ltd
101 Hessle Road
Hull HU3 2BN
England

T 66842020
F 66842090

[◊]Trademarks of Smith & Nephew
6718/FLEXIFIX/SS/GLOBAL/0503A/V3