



Semipermeabelt sprayförband

Minskar risken för infektion
God häftförmåga
Enkel och bekväm

 **smith&nephew**
OpSite[◇] Spray
Sårpray

 **smith&nephew**

OpSite[◇] Spray - Sårsspray

OPSITE Spray är en transparent och snabbtorkande film som är enkel och bekväm att använda. Filmen bildar ett skydd över torra kirurgiska och ytliga sår. OPSITE Spray är genomsläpplig för vattenånga och luft.

FÖRDELAR

Minskar risken för infektion

OPSITE Spray bildar ett skydd över torra kirurgiska och ytliga sår.

Vattenfast

Skyddar effektivt mot vatten och patienten kan duscha.

Enkel och bekväm

OPSITE Spray torkar snabbt och är enkel att använda över områden som vanligen är svåra att bandagera.

BRUKSANVISNING

1. Tvätta händerna.

2. Rengör och torka av huden noggrant.

3. Omskakas väl och sprayas mot den tänkta ytan med ca 15-20 cm avstånd. Upprepas en gång till. För bästa resultat sprayas flera tunna lager. Produkten ska inte användas på djupa sår.

FÖRBANDSBYTE

De tunna filmlagren kan dras bort från torr hud eller sitta kvar tills dess att det lossnar.

INDIKATION

Mindre skärsår, torra och rena suturerade sår, för tätning vid dränagetuber och externa ortopediska fixationer såsom Steinman stift, efter suturtagning och som skydd efter injektion.

KONTRAINDIKATION

Använd inte produkten på barn under 18 månader.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Får ej användas i samband med intravaskulära produkter av plast. Undvik inandning av ångorna.

Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med ögon. Får ej riktas mot öppen eld eller brännbart material. Tom sprayburk får ej punkteras eller brännas. Endast för utvärtes bruk. Lokala hudreaktioner kan förekomma i samband med användande av jodlösning tillsammans med ocklusiva förband. Ej avsett att användas tillsammans med lokalt administrerade läkemedel.

FÖRVARING

Förvaras torrt (<25° C) och ej i närheten av värme och självantändande material. Ej rökning. Tryckbehållare: skyddas från solljus och får ej utsättas för temperaturer över 50° C. Förvaras utom räckhåll för barn

<i>Art.nr</i>	<i>Produkt</i>	<i>Vnr</i>	<i>Fp</i>
66004979	100 ml	277707	12
66004980	240 ml		12



Wound management

Smith&nephew AB Box 143, 431 22 Mölndal Sverige
Tel: 031-7465800 Fax: 031-870531

www.smith-nephew.com
www.smith-nephew.se