



 **smith&nephew**
ACTICOAT[®] FLEX
an illumine
SILCRYST[®]
NANOCRYSTALS

Silvrets nya ansikte

Extrem flexibilitet som förbättrar patientresultaten



ACTICOAT[®] Flex

ACTICOAT[®] Flex har utformats för att ge en mycket bekväm kontaktyta mellan skadeområdet och sekundärförbandet. Den långvariga antimikrobiella effekten ger extra skydd.


- Bibehållen kontakt med sårbädden även i svåråtkomliga anatomiska områden.
- Dödar vanligt förekommande sårpatogener vilket minskar infektionsrisken.¹
- Bekvämt – patienten kan röra sig utan att förbandet rubbas.⁶
- Kan användas som komplement till trycksårsbehandling.³

Egenskaper


1. ACTICOAT[®] Flex är mjukt och mycket formbart och elastiskt.

- Följer den skadade kroppsdelens rörelser.⁶
- Minimerar obehaget för patienten.
- Kan avlägsnas utan trauma på sårbädden.⁴

2. ACTICOAT[®] Flex släpper igenom vätska till sekundärförbandet vilket minimerar risken för maceration.⁵

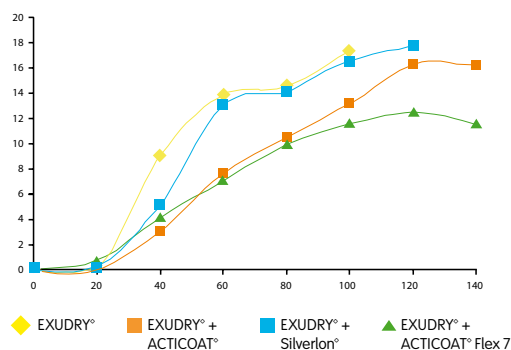


3. ACTICOAT[®] Flex har en långvarig (3 eller 7 dagar) antimikrobiell effekt mot en rad olika sårpatogener, bland annat MRSA och Pseudomonas aeruginosa¹. Elimineras alla läkningshinderande faktorer vilket gör att patienten återfår kontrollen och såret läker snabbare.

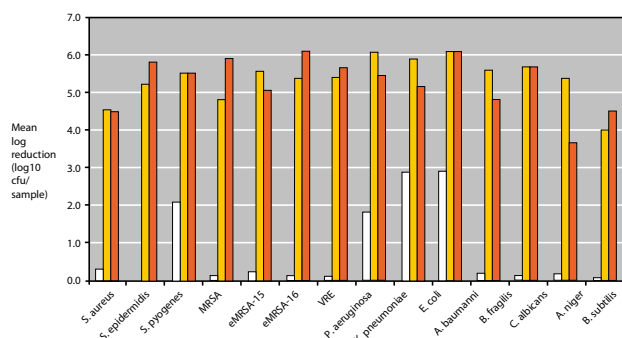

Figur 1. ACTICOAT[®] Flex 7 – Antimikrobiell effekt mot vanligt förekommande sårpatogener under 24 timmar, uppmätt genom reducering av antalet mikrober (genomsnittresultat, n=3)

4. ACTICOAT[®] Flex dödar bakterier på endast trettio minuter². Den antibakteriella effekten bidrar till att ge ett snabbt skydd mot bakteriebildning och förebygger resistens.

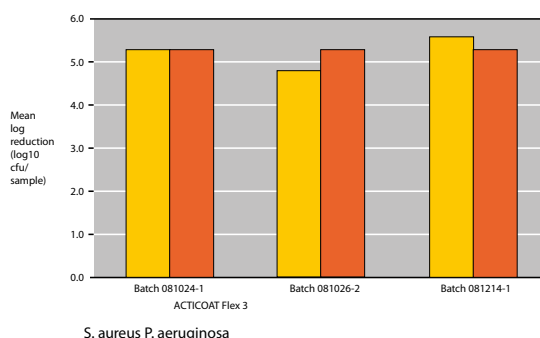

Figur 2. ACTICOAT[®] Flex 3 – Antimikrobiell effekt mot S. aureus och P. aeruginosa under 30 minuter (genomsnittresultat, n=3), uppmätt genom reducering av antalet mikrober

Sortiment

ACTICOAT[®] Flex finns i en 7-dagarsvariant (ACTICOAT[®] Flex 7) och en 3-dagarsvariant (ACTICOAT[®] Flex 3).

ACTICOAT Flex 3

Katalog	Storlek	Förpacknings- antal
66800396	5 cm x 5 cm	5 stk.
66800398	10 cm x 10 cm	5 stk.
66800399	10 cm x 10 cm	12 stk.
66800409	10 cm x 20 cm	12 stk.
66800419	20 cm x 40 cm	6 stk.
66800432	40 cm x 40 cm	6 stk.

ACTICOAT Flex 7

Katalog	Storlek	Förpacknings- antal
66800395	5 cm x 5 cm	5 stk.
66800397	10 cm x 12.5 cm	5 stk.
66800420	15 cm x 15 cm	5 stk.
66800400	20 cm x 40 cm	6 stk.
66800401	40 cm x 40 cm	6 stk.

References

1. Evaluation of extensibility - Smith and Nephew report reference DS.08.123.R1.
2. ACTICOAT Dressing: Wound bed preparation and trauma
3. Smith & Nephew Wound Management. Data on file report – 0810018. October 2008
4. Smith & Nephew Wound Management. Data on file report – 0810014. October 2008
5. Smith & Nephew Wound Management. Data on file report – 0810016. October 2008
6. Smith & Nephew Wound Management. Data on file report – 0810012. October 2008

*Nanocrystalline Silver is a patented technology of NUCRYST Pharmaceuticals Corp. SILCRYST is a trademark of NUCRYST Pharmaceuticals Corp., used under licence.

Wound Management

Smith & Nephew AB
Kräketorpsgatan 20
Box 143
431 22 Mölndal
Sverige

Tel: 031-746 58 00
Fax: 031-87 05 32

www.smith-nephew.com
www.acticoat.com